

LV: AUTOCLIP – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Modeļa numurs: JLL7501

Ieejas parametri: DC 5V / 1A (USB uzlāde)

Akumulatora specifikācija: 3.7V, 220mAh, 0.81Wh

Nominālā jauda: 2W

ĀTRUMA REŽĪMI

1. ātrums – zema ātruma režīms

Piemērots zīdaiņiem un maziem bērniem vecumā no 0 līdz 3 gadiem maigai nagu pulēšanai un izlīdzināšanai.

2. ātrums – vidēja ātruma režīms

Piemērots pieaugušajiem un regulārai nagu apgriešanai vai pulēšanai.

3. ātrums – augsta ātruma režīms

Piemērots biezākiem, cietākiem vai izturīgākiem nagiem, kuriem nepieciešama spēcīgāka pulēšana.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

1. Viegli pieskarieties ieslēgšanas pogai, lai ieslēgtu ierīci 1. ātrumā (zema ātruma režīms). Baltā LED gaisma iedegsies vienlaikus.
 2. Vēlreiz īsi nospiediet ieslēgšanas pogu, lai pārslēgtos uz 2. ātrumu (vidēja ātruma režīms).
 3. Vēl vienu reizi īsi nospiediet ieslēgšanas pogu, lai aktivizētu 3. ātrumu (augsta ātruma režīms).
 4. Lai izlīdzinātu un noapaļotu naga malas, novietojiet naga galu perpendikulāri pulēšanas galviņai un viegli virziet ierīci gar naga malu.
 5. Naga virsmas pulēšanai novietojiet naga virsmu paralēli pulēšanas galviņai. Lēni un uzmanīgi virziet pulēšanas galviņu pa naga virsmu, lai iegūtu gludu rezultātu.
 6. Nelietojiet pulēšanas galviņas malu tieši uz naga virsmas, jo tas var saskrāpēt vai bojāt nagu.
 7. Vēlreiz īsi nospiediet ieslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci. LED gaisma izslēgsies vienlaikus.
 8. Uzlādes laikā apakšējā indikatora gaisma mirgos. Kad akumulators būs pilnībā uzlādēts, indikatora gaisma degs nepārtraukti.
-

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

1. Šis produkts ir paredzēts tikai roku nagu kopšanai. Nelietojiet to uz citām ķermeņa daļām.
2. Neuzlādējiet ierīci mitrā vai slapjā vidē. Pirms uzlādes pārliedzinieties, ka uzlādes ports ir pilnīgi sauss.
3. Uzlādei izmantojiet tikai 5V / 1A USB adapteri vai saderīgu USB barošanas avotu.
4. Pievienojot vai atvienojot uzlādes kabeli, turiet pašu spraudni. Nevelciet tieši aiz kabeļa.
5. Nemēģiniet pats izjaukt, pārveidot vai remontēt produktu.

6. Šo produktu nav ieteicams lietot maziem bērniem vai personām ar samazinātām fiziskām, sensorām vai kognitīvām spējām bez atbilstošas uzraudzības.
 7. Ierīce satur iebūvētu uzlādējamu akumulatoru. Nepakļaujiet produktu ugunij, pārmērīgam karstumam, tiešiem saules stariem vai augstas temperatūras videi.
 8. Ja produkts netiks lietots ilgāku laiku, uzlādējiet to vismaz reizi 1–2 mēnešos, lai saglabātu akumulatora veikspēju.
 9. Pirms produkta utilizācijas iebūvētais akumulators ir jāizņem un jāutilizē saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Pirms akumulatora izņemšanas pārliedzinieties, ka ierīce ir izslēgta.
 10. Pēc lietošanas uzturiet ierīci tīru. Regulāri noņemiet nagu putekļus, lai saglabātu optimālu veikspēju un higiēnu.
 11. Uzglabājiet produktu vēsā, sausā vietā, prom no mitruma, putekļiem un tiešiem saules stariem.
-

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.