

DE: EARPUC – BENUTZERHANDBUCH

Automatischer Ohrenreiniger

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell: BE011

Produktabmessungen: 265 × 90 × 90 mm

Nettogewicht: 330 g

Geräuschpegel: < 65 dB


Nennspannung: 3,7 V

Fassungsvermögen des Wassertanks: 200 ml

Eingangsspannung: 5 V = 1 A

Akkukapazität: 1000 mAh

PRODUKTÜBERSICHT

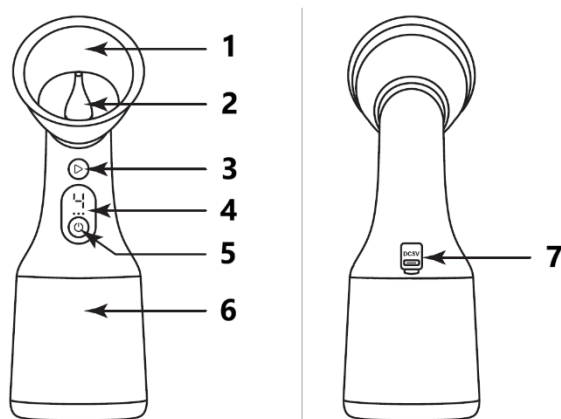

1. Ohrbecher
 2. Düse
 3. Start/Pause-Taste
 4. Bildschirm
 5. Ein/Aus-/Modus-Taste
 6. Wassertank
 7. Ladeanschluss
-


LIEFERUMFANG



- 1 × Hauptgerät
- 4 × Düsen
- 1 × Ladekabel
- 1 × Benutzerhandbuch

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Display-Anzeigen

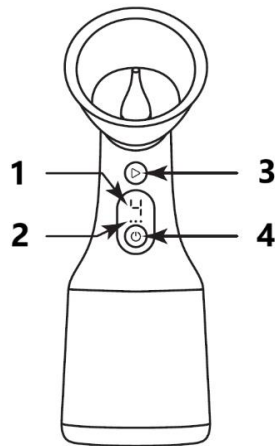

1. Modusanzeige
2. Akkuanzeige
3. Start/Pause-Anzeige
4. Ein/Aus-/Modus-Anzeige

Betriebsmodi

- **Stufe 1 – Sanfter Modus:** Empfohlen für Erstnutzer und empfindliche Ohren.
- **Stufe 2 – Starker Modus:** Bietet erhöhten Wasserdruck für eine intensivere Reinigung.
- **Stufe 3 – Pulsmodus:** Bietet einen unterbrochenen Wasserfluss für eine pulsierende Reinigung.
- **Stufe 4 – Benutzerdefinierter Modus:** Ermöglicht das Speichern Ihrer bevorzugten Reinigungsintensität.

Einrichtung des benutzerdefinierten Modus

Halten Sie im benutzerdefinierten Modus die Start/Pause-Taste gedrückt. Die Stufenanzeige beginnt zu blinken und der Wasserdruck erhöht sich schrittweise von niedrig auf hoch. Lassen Sie die Taste los, sobald der gewünschte Druck erreicht ist. Das Gerät speichert diese Einstellung automatisch und ruft sie jedes Mal ab, wenn der benutzerdefinierte Modus ausgewählt wird.


Akkuanzeige

- Drei dauerhaft leuchtende Balken zeigen einen vollständig geladenen Akku an.
- Blinkende Akkubalken zeigen einen niedrigen Akkustand an und das Gerät sollte geladen werden.

- Alle drei Balken bleiben beleuchtet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Wählen Sie bei der ersten Verwendung den sanften Modus.
- Es wird empfohlen, Ohrenschmalz vor der Anwendung mit einer ärztlich zugelassenen Ohrenschmalz-Erweichungslösung zu erweichen.
- Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus.

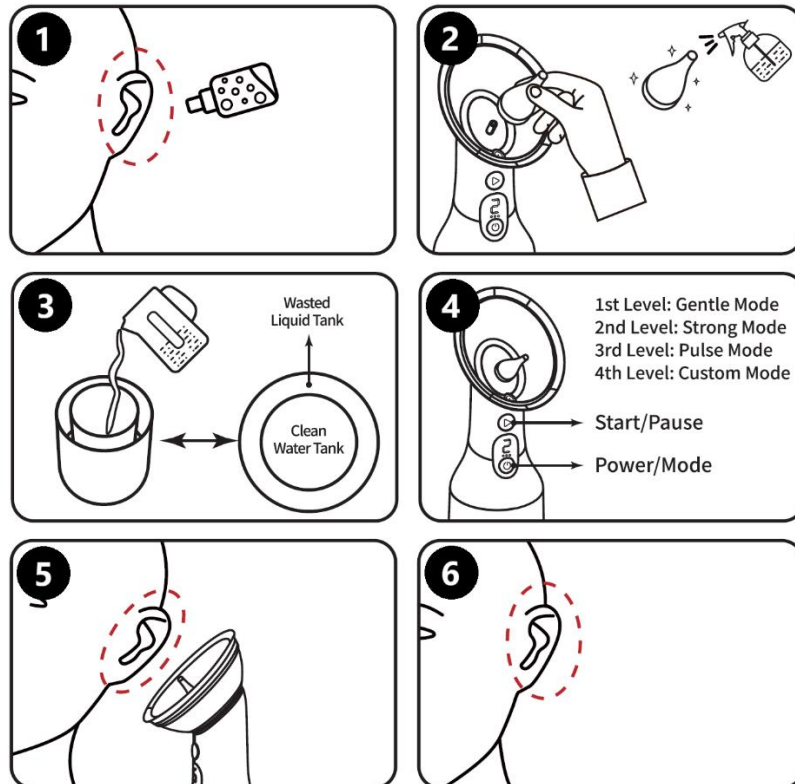

Reinigungsvorgang

1. Ohrenschmalz erweichen

Tragen Sie eine geeignete Lösung zur Erweichung von Ohrenschmalz gemäß den Anweisungen des Herstellers oder den Empfehlungen Ihres medizinischen Fachpersonals in den Gehörgang auf.

Hinweis: Wenn das Ohrenschmalz trocken oder verhärtet ist, lösen Sie es vor der Spülung vorsichtig mit einem geeigneten Ohrreinigungswerkzeug.

2. Düse anbringen

Bringen Sie eine saubere Düse am Gerät an.

Hinweis: Es wird empfohlen, die Düse vor der Verwendung mit 75 % Alkohol zu desinfizieren. Wenn mehrere Personen das Gerät gemeinsam nutzen, sollte jede Person eine eigene Düse verwenden, um Kreuzkontamination zu vermeiden.

3. Wassertank füllen

Füllen Sie den Tank mit warmem Wasser oder einer anderen Lösung, die von Ihrem medizinischen Fachpersonal empfohlen wird.

Hinweis: Die empfohlene Flüssigkeitstemperatur beträgt $37\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ($98\text{ °F} \pm 4\text{ °F}$).

4. Modus auswählen

Drücken Sie die Ein/Aus-/Modus-Taste, um das Gerät einzuschalten und den gewünschten Reinigungsmodus auszuwählen.

5. Reinigung beginnen

Positionieren Sie die Düse am Eingang des Gehörgangs und drücken Sie die Start/Pause-Taste, um die Spülung zu starten. Drücken Sie die Taste jederzeit erneut, um den Vorgang zu pausieren.

6. Gehörgang trocknen

Trocknen Sie nach der Reinigung vorsichtig das äußere Ohr und entfernen Sie verbleibende Feuchtigkeit mit einem Wattestäbchen oder einem geeigneten Gerät zum Trocknen der Ohren.

EIN-/AUSSCHALTEN, PAUSE UND LADEN

- **Einschalten:** Drücken Sie einmal die Ein/Aus-/Modus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
- **Pause:** Drücken Sie während des Betriebs die Start/Pause-Taste, um die Spülung zu pausieren. Drücken Sie sie erneut, um fortzufahren.
- **Ausschalten:** Halten Sie die Ein/Aus-/Modus-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- **Niedriger Akkustand:** Blinkende Akkuanzeigen zeigen an, dass der Akkustand niedrig ist und der Akku aufgeladen werden sollte.
- **Laden:** Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte weiß.
- **Ladevorgang abgeschlossen:** Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft weiß.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Produktschäden führen.

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie eine Ohrenentzündung, ein perforiertes Trommelfell, Paukenröhrchen oder eine Verletzung am Ohr haben.

2. Wenn während der Anwendung Schmerzen, Schwindel, Unwohlsein oder Reizungen auftreten, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.
3. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.
4. Kinder über 8 Jahren dürfen dieses Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
6. Das Gerät enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Akku. Halten Sie es von Feuer, übermäßiger Hitze und Feuchtigkeit fern.
7. Verwenden Sie kein Wasser und keine Reinigungslösungen unter Körpertemperatur, da dies Schwindel oder Unwohlsein verursachen kann.
8. Zerlegen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
10. Trennen Sie das Ladekabel, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
11. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.

WARTUNG UND PFLEGE

1. Entleeren Sie nach jedem Gebrauch die verbleibende Flüssigkeit aus dem Wassertank und wischen Sie das Gerät trocken. Bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort auf.
2. Wischen Sie das Hauptgerät mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Spülen Sie das Gerät nicht ab und tauchen Sie es nicht in Wasser.
3. Die Düsen können mit 75 % Alkohol desinfiziert werden. Sterilisieren Sie sie nicht mit Hochtemperatur- oder Hochdruckmethoden.
4. Um Kreuzkontamination zu vermeiden, wird empfohlen, dass jede Person eine eigene Düse verwendet.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Wasseraustritt oder schwacher Wasserdruck	Niedriger Akkustand	Gerät aufladen
Kein Wasseraustritt oder schwacher Wasserdruck	Verstopfter Filter oder verstopfte Düse	Filter/Düse reinigen oder austauschen
Rissige Düse	Übermäßige Abnutzung oder Beschädigung	Düse austauschen
Gerät startet nicht	Niedriger Akkustand oder interner Fehler	Gerät vollständig aufladen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst oder Ihren Händler
Andere Probleme	Unbekannte Ursache	Wenden Sie sich an den Kundendienst oder Ihren lokalen Händler

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.