

BG: EARPUS – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Автоматичен почистващ уред за уши

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Модел: BE011

Размери на продукта: 265 × 90 × 90 mm

Нетно тегло: 330 g

Ниво на шум: < 65 dB


Номинално напрежение: 3,7 V

Капацитет на резервоара за вода: 200 ml

Входно напрежение: 5 V = 1 A

Капацитет на батерията: 1000 mAh

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

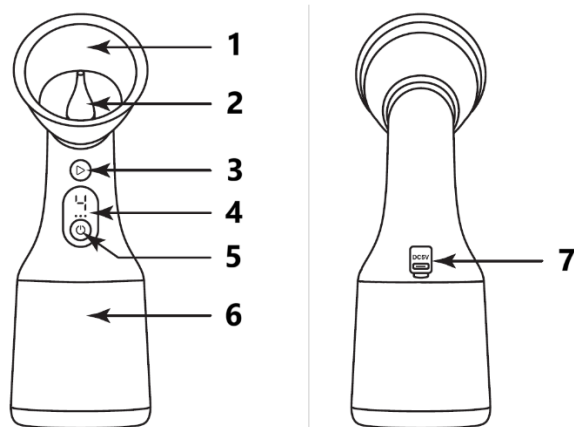

1. Чашка за ухо
2. Дюза
3. Бутон Старт/Пауза
4. Дисплей
5. Бутон Включване/Режим
6. Резервоар за вода
7. Порт за зареждане


СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА



- 1 × Основен уред
- 4 × Дюзи
- 1 × Кабел за зареждане
- 1 × Ръководство за потребителя

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

Индикатори на дисплея

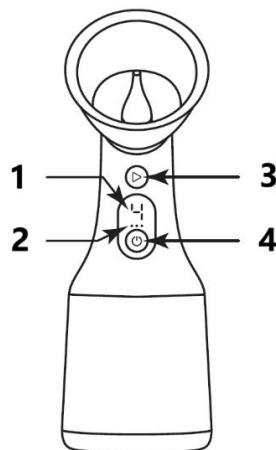

1. Индикатор за режим
2. Индикатор за батерия
3. Индикатор Старт/Пауза
4. Индикатор Включване/Режим

Режими на работа

- **Ниво 1 – Нежен режим:** Препоръчва се за потребители, които използват уреда за първи път, и за чувствителни уши.
- **Ниво 2 – Силен режим:** Осигурява по-високо водно налягане за по-интензивно почистване.
- **Ниво 3 – Пулсиращ режим:** Осигурява прекъснат воден поток за пулсиращо почистване.
- **Ниво 4 – Персонализиран режим:** Позволява да запазите предпочитаната интензивност на почистване.

Настройка на персонализиран режим


Натиснете и задръжте бутона Старт/Пауза, докато сте в Персонализиран режим. Индикаторът за ниво ще започне да мига, а водното налягане постепенно ще се увеличава от ниско към високо. Освободете бутона, когато достигнете желаното налягане. Уредът автоматично ще запази тази настройка и ще я използва всеки път, когато бъде избран Персонализиран режим.

Индикатор за батерия

- Три постоянно светещи ленти показват напълно заредена батерия.
- Мигащите ленти на батерията показват ниско ниво на батерията и необходимост от зареждане на уреда.
- И трите ленти остават осветени, когато зареждането е завършено.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- При първа употреба изберете Нежен режим.
- Преди употреба се препоръчва ушната кал да се омекоти с разтвор за омекотяване на ушна кал, одобрен от лекар.
- Уредът ще се изключи автоматично след 10 минути неактивност.

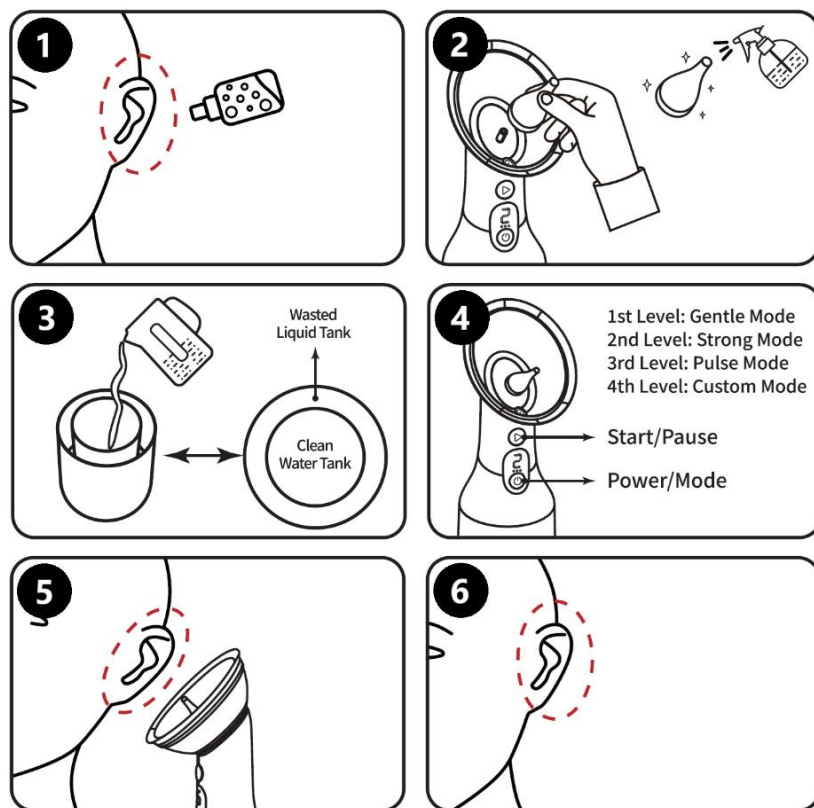

Процедура за почистване

1. Омекотете ушната кал

Нанесете подходящ разтвор за омекотяване на ушната кал в ушния канал според инструкциите на производителя или препоръките на медицински специалист.

Забележка: Ако ушната кал е суха или втвърдена, внимателно я разхлабете с подходящ инструмент за почистване на уши преди промиване.

2. Поставете дюзата

Прикрепете чиста дюза към уреда.

Забележка: Препоръчва се дюзата да се дезинфекцира със 75 % алкохол преди употреба. Ако уредът се използва от няколко души, всеки потребител трябва да използва отделна дюза, за да се предотврати кръстосано замърсяване.

3. Напълнете резервоара за вода

Напълнете резервоара с топла вода или друг разтвор, препоръчан от медицински специалист.

Забележка: Препоръчителната температура на течността е $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ($98^{\circ}\text{F} \pm 4^{\circ}\text{F}$).

4. Изберете режим

Натиснете бутона Включване/Режим, за да включите уреда и да изберете желанния режим на почистване.

5. Започнете почистването

Поставете дюзата на входа на ушния канал и натиснете бутона Старт/Пауза, за да започнете промиването. Натиснете бутона отново по всяко време, за да поставите работата на пауза.

6. Подсушете ушния канал

След почистване внимателно подсушете външната част на ухото и отстранете остатъчната влага с памучен тампон или подходящ уред за подсушаване на уши.

ВКЛЮЧВАНЕ, ПАУЗА И ЗАРЕЖДАНЕ

- **Включване:** Натиснете веднъж бутона Включване/Режим, за да включите уреда. Уредът ще премине в режим на готовност.
- **Пауза:** По време на работа натиснете бутона Старт/Пауза, за да поставите промиването на пауза. Натиснете го отново, за да продължите.
- **Изключване:** Натиснете и задръжте бутона Включване/Режим за приблизително 2 секунди, за да изключите уреда.
- **Ниско ниво на батерията:** Мигащите индикатори на батерията показват, че нивото на батерията е ниско и тя трябва да се зареди.
- **Зареждане:** По време на зареждане индикаторната светлина мига в бяло.
- **Зареждането е завършено:** Когато зареждането е завършено, индикаторната светлина свети постоянно в бяло.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете внимателно всички инструкции преди употреба. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване или повреда на продукта.

1. Не използвайте този продукт, ако имате инфекция на ухото, перфорирано тъпанче, ушни тръбички или каквото и да е нараняване на ухото.

2. Ако по време на употреба почувствате болка, замайване, дискомфорт или раздразнение, незабавно спрете да използвате уреда.
3. Този продукт не е подходящ за деца под 8 години.
4. Деца над 8 години трябва да използват този продукт само под наблюдение на възрастен.
5. Този продукт не е играчка. Дръжте го далеч от деца.
6. Уредът съдържа вградена акумулаторна батерия. Дръжте го далеч от огън, прекомерна топлина и влага.
7. Не използвайте вода или почистващи разтвори с температура под телесната, тъй като това може да причини замайване или дискомфорт.
8. Не разглобявайте, не модифицирайте и не се опитвайте сами да ремонтирате продукта.
9. Не използвайте уреда, докато се зарежда.
10. Изключете кабела за зареждане, когато уредът не се използва.
11. Изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби за електронни отпадъци.

ПОДДРЪЖКА И ГРИЖА

1. След всяка употреба изпразнете останалата течност от резервоара за вода и подсушете уреда. Съхранявайте го на хладно, сухо и добре проветриво място.
2. Почиствайте основния уред с мека, влажна кърпа. Не изплаквайте и не потапяйте уреда във вода.
3. Дюзите могат да се дезинфекцират със 75 % алкохол. Не ги стерилизирайте с методи с висока температура или високо налягане.
4. За да се избегне кръстосано замърсяване, се препоръчва всеки потребител да има собствена дюза.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Няма изтичане на вода или водното налягане е слабо	Ниско ниво на батерията	Заредете уреда
Няма изтичане на вода или водното налягане е слабо	Запушен филтър или дюза	Почистете или сменете филтъра/дюзата
Напукана дюза	Прекомерно износване или повреда	Сменете дюзата
Уредът не се стартира	Ниско ниво на батерията или вътрешна повреда	Заредете уреда напълно. Ако проблемът продължи, свържете се с обслужване на клиенти или с вашия търговец
Други проблеми	Неизвестна причина	Свържете се с обслужване на клиенти или с местния търговец

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.