

CS: EARPUC – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Automatický čistič uší

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model: BE011

Rozměry produktu: 265 × 90 × 90 mm

Čistá hmotnost: 330 g

Hladina hluku: < 65 dB


Jmenovité napětí: 3,7 V

Kapacita nádržky na vodu: 200 ml

Vstupní napětí: 5 V = 1 A

Kapacita baterie: 1000 mAh

PŘEHLED PRODUKTU

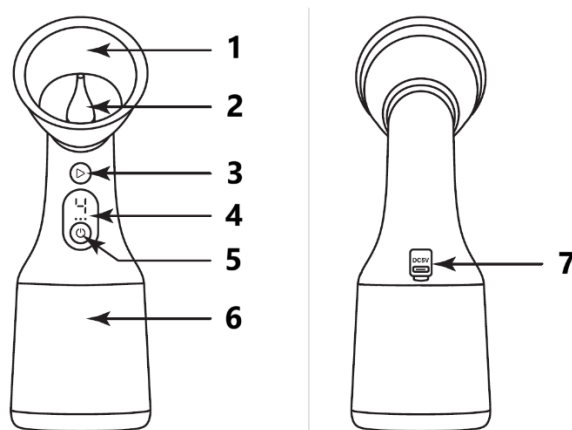

1. Ušní kalíšek
2. Tryska
3. Tlačítko Start/Pauza
4. Displej
5. Tlačítko Zapnutí/Režim
6. Nádržka na vodu
7. Nabíjecí port


OBSAH BALENÍ



- 1 × Hlavní jednotka
 - 4 × Trysky
 - 1 × Nabíjecí kabel
 - 1 × Uživatelská příručka
-

POPIS FUNKCÍ

Indikátory displeje

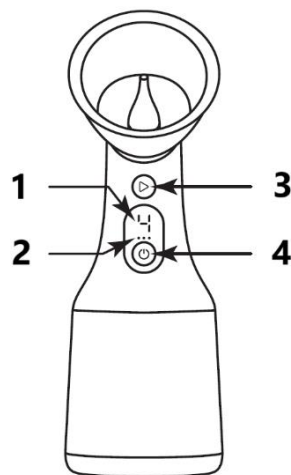

1. Indikátor režimu
2. Indikátor baterie
3. Indikátor Start/Pauza
4. Indikátor Zapnutí/Režim

Provozní režimy

- **Úroveň 1 – Jemný režim:** Doporučeno pro první použití a citlivé uši.
- **Úroveň 2 – Silný režim:** Poskytuje vyšší tlak vody pro intenzivnější čištění.
- **Úroveň 3 – Pulzní režim:** Poskytuje přerušovaný proud vody pro pulzující čištění.
- **Úroveň 4 – Vlastní režim:** Umožňuje uložit preferovanou intenzitu čištění.

Nastavení vlastního režimu


Stiskněte a podržte tlačítko Start/Pauza ve Vlastním režimu. Indikátor úrovně začne blikat a tlak vody se bude postupně zvyšovat od nízkého po vysoký. Jakmile dosáhnete požadovaného tlaku, tlačítko uvolněte. Zařízení toto nastavení automaticky uloží a vyvolá jej pokaždé, když zvolíte Vlastní režim.

Indikátor baterie

- Tři trvale svítící čárky označují plně nabitou baterii.
 - Blikající čárky baterie označují nízkou úroveň nabití a zařízení je třeba nabít.
 - Všechny tři čárky zůstanou svítit, když je nabíjení dokončeno.
-

NÁVOD K POUŽITÍ

- Při prvním použití zvolte Jemný režim.
- Před použitím se doporučuje změkčit ušní maz roztokem na změkčení ušního mazu schváleným lékařem.
- Zařízení se automaticky vypne po 10 minutách nečinnosti.

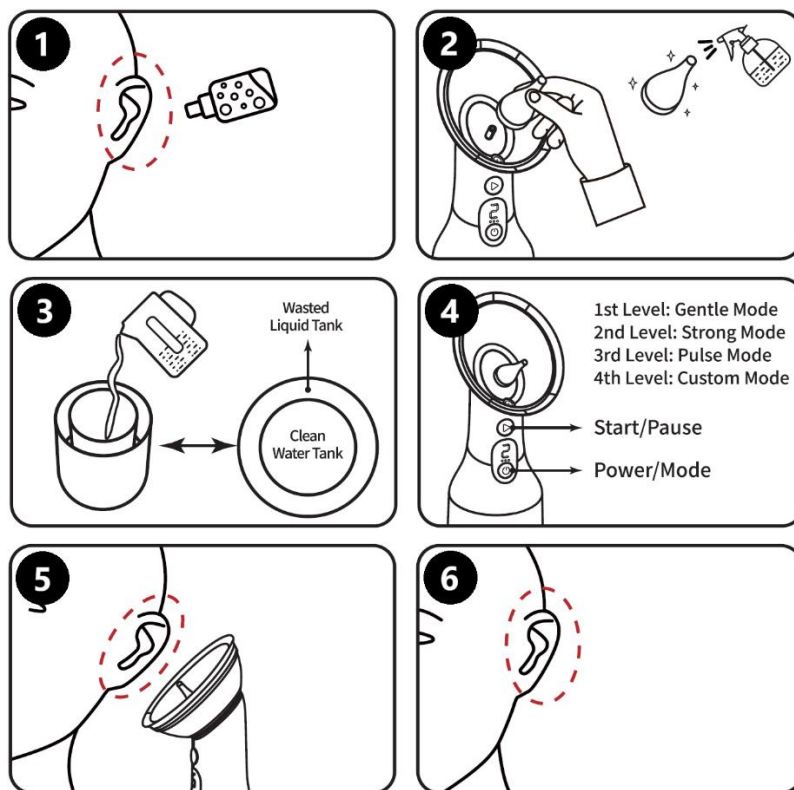

Postup čištění

1. Změkčete ušní maz

Aplikujte vhodný roztok pro změkčení ušního mazu do zvukovodu podle pokynů výrobce nebo doporučení zdravotnického pracovníka.

Poznámka: Pokud je ušní maz suchý nebo ztvrdlý, před výplachem jej jemně uvolněte vhodným nástrojem pro čištění uší.

2. Nasaďte trysku

Připevněte k zařízení čistou trysku.

Poznámka: Před použitím se doporučuje dezinfikovat trysku 75% alkoholem. Pokud zařízení používá více osob, každý uživatel by měl používat samostatnou trysku, aby se zabránilo křížové kontaminaci.

3. Naplňte nádržku na vodu

Naplňte nádržku teplou vodou nebo jiným roztokem doporučeným zdravotnickým pracovníkem.

Poznámka: Doporučená teplota kapaliny je 37 °C ± 2 °C (98 °F ± 4 °F).

4. Vyberte režim

Stiskněte tlačítko Zapnutí/Režim pro zapnutí zařízení a vyberte požadovaný režim čištění.

5. Zahajte čištění

Umístěte trysku ke vstupu do zvukovodu a stiskněte tlačítko Start/Pauza pro zahájení výplachu. Opětovným stisknutím tlačítka můžete provoz kdykoli pozastavit.

6. Osušte zvukovod

Po čištění jemně osušte vnější ucho a odstraňte zbývající vlhkost pomocí vatové tyčinky nebo vhodného zařízení pro sušení uší.

ZAPNUTÍ, PAUZA A NABÍJENÍ

- **Zapnutí:** Jednou stiskněte tlačítko Zapnutí/Režim pro zapnutí zařízení. Zařízení přejde do pohotovostního režimu.
- **Pauza:** Během provozu stiskněte tlačítko Start/Pauza pro pozastavení výplachu. Opětovným stisknutím pokračujte.
- **Vypnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko Zapnutí/Režim přibližně 2 sekundy pro vypnutí zařízení.
- **Nízký stav baterie:** Blikající indikátory baterie znamenají, že úroveň nabití je nízká a baterii je třeba dobít.
- **Nabíjení:** Během nabíjení kontrolka bliká bíle.
- **Nabíjení dokončeno:** Po dokončení nabíjení kontrolka svítí trvale bíle.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění nebo poškození produktu.

1. Nepoužívejte tento produkt, pokud máte infekci ucha, perforovaný ušní bubínek, ušní ventilační trubičky nebo jakékoli poranění ucha.
2. Pokud během používání pocítíte bolest, závratě, nepohodlí nebo podráždění, okamžitě přestaňte zařízení používat.
3. Tento produkt není vhodný pro děti mladší 8 let.
4. Děti starší 8 let smí tento produkt používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
5. Tento produkt není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
6. Zařízení obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii. Uchovávejte jej mimo dosah ohně, nadměrného tepla a vlhkosti.
7. Nepoužívejte vodu ani čisticí roztoky s teplotou nižší než tělesná teplota, protože to může způsobit závratě nebo nepohodlí.
8. Produkt nerozebírejte, neopravujte ani se jej nepokoušejte sami opravovat.
9. Nepoužívejte zařízení během nabíjení.
10. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte nabíjecí kabel.

11. Produkt zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad.

ÚDRŽBA A PÉČE

1. Po každém použití vyprázdněte zbývající kapalinu z nádržky na vodu a zařízení otřete dosucha. Uchovávejte jej na chladném, suchém a dobře větraném místě.
2. Hlavní jednotku otřete měkkým vlhkým hadříkem. Zařízení neoplachujte ani jej neponořujte do vody.
3. Trysky lze dezinfikovat 75% alkoholem. Nesterilizujte je metodami vysoké teploty nebo vysokého tlaku.
4. Aby se zabránilo křížové kontaminaci, doporučuje se, aby měl každý uživatel vlastní tryšku.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Nevychází voda nebo je tlak vody slabý	Nízký stav baterie	Nabijte zařízení
Nevychází voda nebo je tlak vody slabý	Ucpaný filtr nebo tryška	Vyčistěte nebo vyměňte filtr/tryšku
Prasklá tryška	Nadměrné opotřebení nebo poškození	Vyměňte tryšku
Zařízení se nespustí	Nízký stav baterie nebo vnitřní závada	Zařízení plně nabijte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu nebo prodejce
Jiné problémy	Neznámá příčina	Kontaktujte zákaznickou podporu nebo místního prodejce

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.