

DA: EARPUC – BRUGERVEJLEDNING

Automatisk ørerenser

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Model: BE011

Produktmål: 265 × 90 × 90 mm

Nettovægt: 330 g

Støjniveau: < 65 dB


Nominel spænding: 3,7 V

Vandtankens kapacitet: 200 ml

Indgangsspænding: 5 V = 1 A

Batterikapacitet: 1000 mAh

PRODUKTOVERSIGT

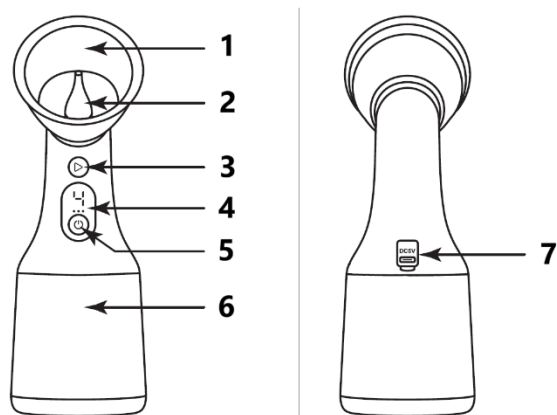

1. Ørekep
 2. Dyse
 3. Start/Pause-knap
 4. Skærm
 5. Tænd/Sluk-/Tilstandsknap
 6. Vandtank
 7. Opladningsport
-


PAKKENS INDHOLD



- 1 × Hovedenhed
- 4 × Dyser
- 1 × Opladningskabel
- 1 × Brugervejledning

FUNKTIONSBESKRIVELSE

Displayindikatorer

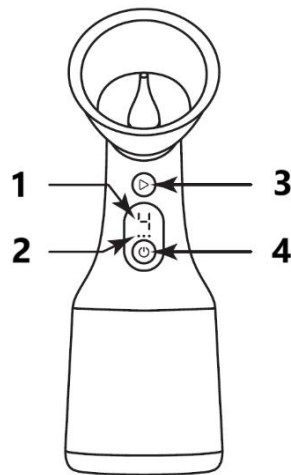

1. Tilstandsindikator
2. Batteriindikator
3. Start/Pause-indikator
4. Tænd/Sluk-/Tilstandsindikator

Driftstilstande

- **Niveau 1 – Skånsom tilstand:** Anbefales til førstegangsbrugere og følsomme ører.
- **Niveau 2 – Kraftig tilstand:** Giver øget vandtryk til mere intensiv rengøring.
- **Niveau 3 – Pulstilstand:** Giver en afbrudt vandstrøm til pulserende rengøring.
- **Niveau 4 – Brugerdefineret tilstand:** Gør det muligt at gemme din foretrukne rengøringsintensitet.

Opsætning af brugerdefineret tilstand


Tryk og hold Start/Pause-knappen nede, mens enheden er i Brugerdefineret tilstand. Niveauindikatoren begynder at blinke, og vandtrykket øges gradvist fra lavt til højt. Slip knappen, når det ønskede tryk er nået. Enheden gemmer automatisk denne indstilling og bruger den, hver gang Brugerdefineret tilstand vælges.

Batteriindikator

- Tre konstant lysende bjælker angiver fuldt batteri.
- Blinkende batteribjælker angiver lavt batteriniveau, og enheden skal oplades.
- Alle tre bjælker forbliver tændte, når opladningen er færdig.

BRUGSANVISNING

- Vælg Skånsom tilstand ved første brug.
- Det anbefales at blødgøre ørevoks med en lægegodkendt opløsning til blødgøring af ørevoks før brug.
- Enheden slukker automatisk efter 10 minutters inaktivitet.

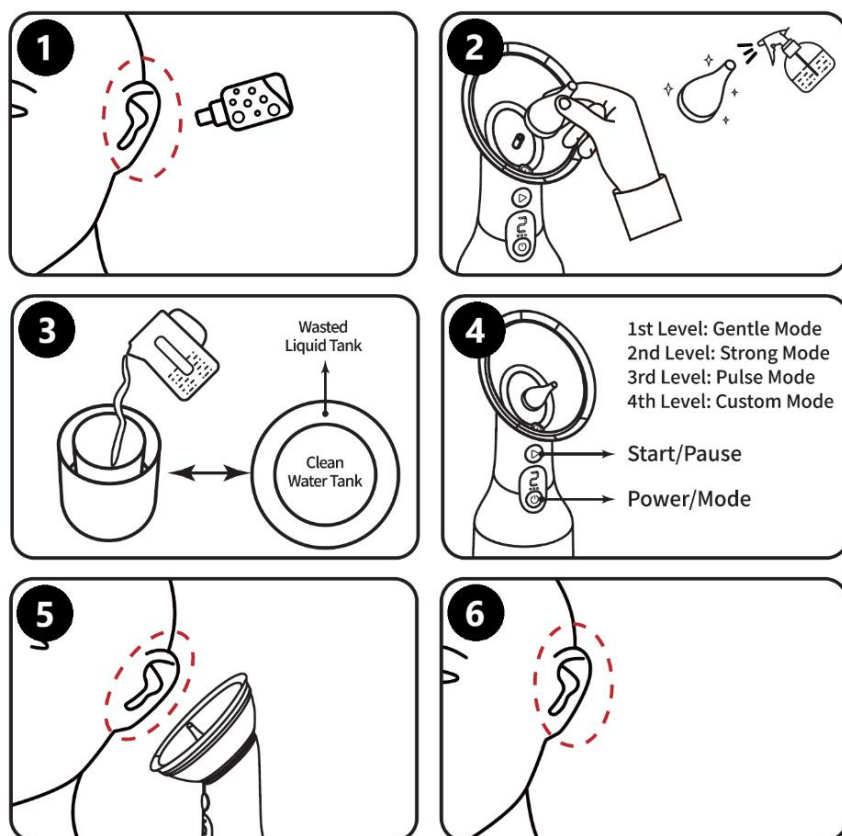

Rengøringsprocedure

1. Blødgør ørevoksen

Påfør en passende opløsning til blødgøring af ørevoks i øregangen i henhold til producentens anvisninger eller anbefalinger fra sundhedspersonale.

Bemærk: Hvis ørevoksen er tør eller hærdet, skal den forsigtigt løsnes med et egnet ørerengøringsværktøj før skylning.

2. Monter dysen

Sæt en ren dyse på enheden.

Bemærk: Det anbefales at desinficere dysen med 75 % alkohol før brug. Hvis flere brugere deler enheden, bør hver bruger anvende sin egen dyse for at forhindre krydskontaminering.

3. Fyld vandtanken

Fyld tanken med varmt vand eller en anden opløsning anbefalet af sundhedspersonale.

Bemærk: Den anbefalede væsketemperatur er $37\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ($98\text{ °F} \pm 4\text{ °F}$).

4. Vælg en tilstand

Tryk på Tænd/Sluk-/Tilstandsknappen for at tænde enheden og vælge den ønskede rengøringsstilstand.

5. Start rengøringen

Placer dysen ved indgangen til øregangen, og tryk på Start/Pause-knappen for at starte skylningen. Tryk på knappen igen når som helst for at sætte driften på pause.

6. Tør øregangen

Efter rengøring skal du forsigtigt tørre det ydre øre og fjerne resterende fugt med en vatpind eller en egnet enhed til tørring af ører.

TÆND/SLUK, PAUSE OG OPLADNING

- **Tænd:** Tryk én gang på Tænd/Sluk-/Tilstandsknappen for at tænde enheden. Enheden går i standbytilstand.
- **Pause:** Under drift skal du trykke på Start/Pause-knappen for at sætte skylningen på pause. Tryk igen for at fortsætte.
- **Sluk:** Tryk og hold Tænd/Sluk-/Tilstandsknappen nede i cirka 2 sekunder for at slukke enheden.
- **Lavt batteriniveau:** Blinkende batteriindikatorer viser, at batteriniveauet er lavt og skal genoplades.
- **Opladning:** Under opladning blinker indikatorlyset hvidt.
- **Opladning færdig:** Når opladningen er færdig, lyser indikatorlyset konstant hvidt.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs venligst alle instruktioner grundigt før brug. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre personskade eller beskadigelse af produktet.

1. Brug ikke dette produkt, hvis du har en øreinfektion, perforeret trommehinde, dræn i øret eller nogen form for øreskade.
2. Hvis du oplever smerte, svimmelhed, ubehag eller irritation under brug, skal du straks stoppe med at bruge enheden.
3. Dette produkt er ikke egnet til børn under 8 år.
4. Børn over 8 år må kun bruge dette produkt under opsyn af en voksen.
5. Dette produkt er ikke legetøj. Opbevar det utilgængeligt for børn.

6. Enheden indeholder et indbygget genopladeligt batteri. Hold den væk fra ild, overdreven varme og fugt.
7. Brug ikke vand eller rengøringsopløsninger under kropstemperatur, da dette kan forårsage svimmelhed eller ubehag.
8. Adskil, modificer eller forsøg ikke selv at reparere produktet.
9. Brug ikke enheden, mens den oplades.
10. Frakobl opladningskablet, når enheden ikke er i brug.
11. Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale regler for elektronisk affald.

VEDLIGEHODELSE OG PLEJE

1. Efter hver brug skal du tømme resterende væske fra vandtanken og tørre enheden af, indtil den er tør. Opbevar den et køligt, tørt og godt ventileret sted.
2. Tør hovedenheden af med en blød, fugtig klud. Skyl ikke enheden, og nedsenk den ikke i vand.
3. Dyserne kan desinficeres med 75 % alkohol. Steriliser dem ikke ved hjælp af metoder med høj temperatur eller højt tryk.
4. For at undgå krydskontaminering anbefales det, at hver bruger har sin egen dyse.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ingen vandudgang eller svagt vandtryk	Lavt batteriniveau	Oplad enheden
Ingen vandudgang eller svagt vandtryk	Tilstoppet filter eller dyse	Rengør eller udskift filter/dyse
Revnet dyse	Overdreven slitage eller skade	Udskift dysen
Enheden starter ikke	Lavt batteriniveau eller intern fejl	Oplad enheden helt. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte kundesupport eller din forhandler
Andre problemer	Ukendt årsag	Kontakt kundesupport eller din lokale forhandler

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.