

ET: EARPUC – KASUTUSJUHEND

Automaatne kõrvapuhastaja

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Mudel: BE011

Toote mõõtmed: 265 × 90 × 90 mm

Netokaal: 330 g

Müratase: < 65 dB


Nimipinge: 3,7 V

Veepaagi maht: 200 ml

Sisendpinge: 5 V = 1 A

Aku mahtuvus: 1000 mAh

TOOTE ÜLEVAADE

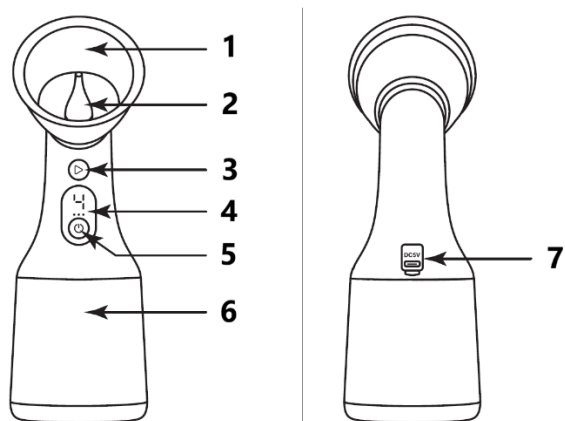

1. Kõrvatops
2. Otsik
3. Start/Paus nupp
4. Ekraan
5. Toite/Režiimi nupp
6. Veepaak
7. Laadimisport


PAKENDI SISU



- 1 × Põhiseade
- 4 × Otsikut
- 1 × Laadimiskaabel
- 1 × Kasutusjuhend

FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS

Ekraani indikaatorid

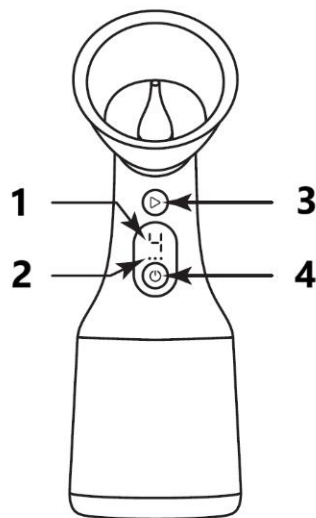

1. Režiimi indikaator
2. Aku indikaator
3. Start/Paus indikaator
4. Toite/Režiimi indikaator

Töörežiimid

- **Tase 1 – Õrn režiim:** Soovitav esmakasutajatele ja tundlikele kõrvadele.
- **Tase 2 – Tugev režiim:** Tagab suurema veesurve intensiivsemaks puhastamiseks.
- **Tase 3 – Pulseeriv režiim:** Tagab katkendliku veevoolu pulseerivaks puhastamiseks.
- **Tase 4 – Kohandatud režiim:** Võimaldab salvestada eelistatud puhastusintensiivsuse.

Kohandatud režiimi seadistamine

Vajutage ja hoidke all Start/Paus nuppu, kui seade on Kohandatud režiimis. Taseme indikaator hakkab vilkuma ja veesurve suureneb järk-järgult madalast kõrgeni. Vabastage nupp, kui soovitud surve on saavutatud. Seade salvestab selle seadistuse automaatselt ja kasutab seda iga kord, kui valitakse Kohandatud režiim.


Aku indikaator

- Kolm püsivalt põlevat riba tähistavad täielikult laetud akut.
- Vilkuvad akuribad tähistavad madalat akutaset ja seadet tuleb laadida.

- Kõik kolm riba jäävad põlema, kui laadimine on lõppenud.

KASUTUSJUHISED

- Esmakordsel kasutamisel valige Õrn režiim.
- Enne kasutamist on soovitatav pehmedada kõrvavaiku arsti heakskiidetud kõrvavaigu pehmedava lahusega.
- Seade lülitub automaatselt välja pärast 10-minutilist tegevusetust.

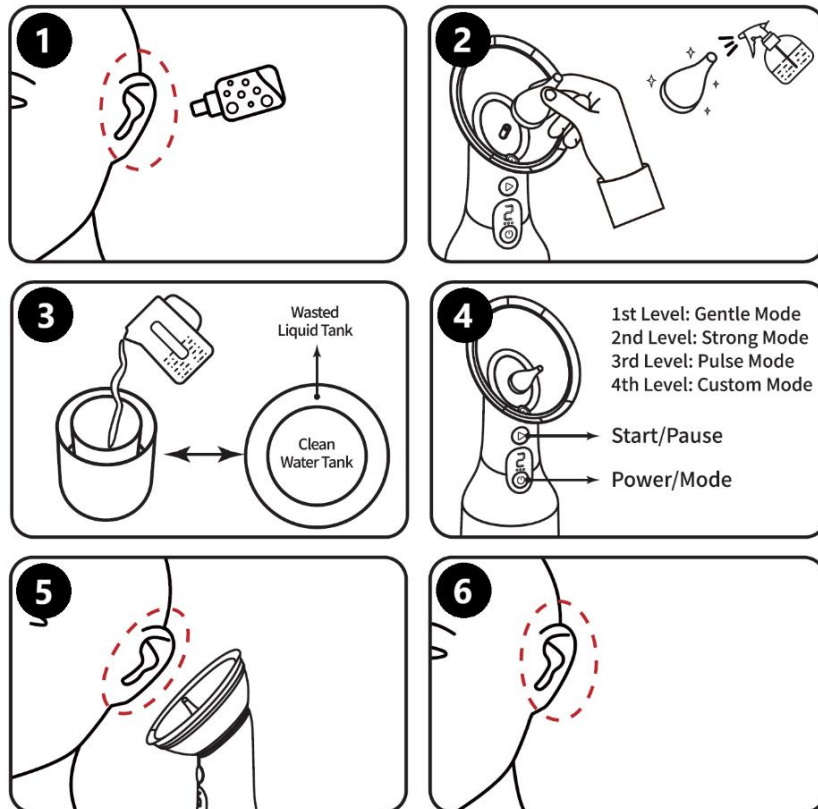

Puhastusprotseduur

1. Pehmedage kõrvavaik

Kandke sobiv kõrvavaigu pehmedav lahus kuulmekäiku vastavalt tootja juhiste või tervishoiutöötaja soovitudele.

Märkus: Kui kõrvavaik on kuiv või kõvastunud, vabastage see enne loputamist ettevaatlikult sobiva kõrvapuhastusvahendiga.

2. Paigaldage otsik

Kinnitage seadmele puhas otsik.

Märkus: Enne kasutamist on soovitatav otsik desinfitseerida 75 % alkoholiga. Kui seadet kasutab mitu inimest, peaks iga kasutaja kasutama eraldi otsikut, et vältida ristsaastumist.

3. Täitke veepaak

Täitke paak sooja veega või muu tervishoiutöötaja soovitatud lahusega.

Märkus: Soovitatav vedeliku temperatuur on $37\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ($98\text{ °F} \pm 4\text{ °F}$).

4. Valige režiim

Vajutage Toite/Režiimi nuppu, et seade sisse lülitada ja valida soovitud puhastusrežiim.

5. Alustage puhastamist

Asetage otsik kuulmekäigu sissepääsu juurde ja vajutage Start/Paus nuppu, et alustada loputamist. Vajutage nuppu uuesti mis tahes ajal, et töö peatada.

6. Kuivatage kuulmekäik

Pärast puhastamist kuivatage õrnalt väliskõrv ja eemaldage järelejäänud niiskus vatitikuga või sobiva kõrvade kuivatamise seadmega.

SISSELÜLITAMINE, PAUS JA LAADIMINE

- **Sisselülitamine:** Vajutage üks kord Toite/Režiimi nuppu, et seade sisse lülitada. Seade läheb ooterežiimi.
- **Paus:** Töö ajal vajutage Start/Paus nuppu, et loputamine peatada. Jätkamiseks vajutage seda uuesti.
- **Väljalülitamine:** Vajutage ja hoidke Toite/Režiimi nuppu umbes 2 sekundit all, et seade välja lülitada.
- **Madal akutase:** Vilkuvad akuindikaatorid näitavad, et aku tase on madal ja seda tuleb laadida.
- **Laadimine:** Laadimise ajal vilgub märgutuli valgena.
- **Laadimine lõpetatud:** Kui laadimine on lõppenud, põleb märgutuli püsivalt valgena.

OHUTUSABINÕUD

Lugege enne kasutamist hoolikalt läbi kõik juhised. Nende juhiste eiramine võib põhjustada vigastusi või toodet kahjustada.

1. Ärge kasutage seda toodet, kui teil on kõrvapõletik, perforeeritud kuulmekile, kõrvatorud või mis tahes kõrvavigastus.
2. Kui kasutamise ajal tekib valu, pearinglus, ebamugavustunne või ärritus, lõpetage seadme kasutamine kohe.
3. See toode ei sobi alla 8-aastastele lastele.
4. Üle 8-aastased lapsed tohivad seda toodet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
5. See toode ei ole mänguasi. Hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.
6. Seade sisaldab sisseehitatud taaslaetavat akut. Hoidke seda eemal tulest, liigsest kuumusest ja niiskusest.

7. Ärge kasutage vett ega puhastuslahuseid, mille temperatuur on madalam kui kehatemperatuur, kuna see võib põhjustada pearinglust või ebamugavustunnet.
8. Ärge võtke toodet lahti, ärge muutke seda ega proovige seda ise parandada.
9. Ärge kasutage seadet laadimise ajal.
10. Ühendage laadimiskaabel lahti, kui seadet ei kasutata.
11. Kõrvaldage toode vastavalt kohalikele elektroonikajäätmete eeskirjadele.

HOOLDUS JA KORRASHOID

1. Pärast iga kasutamist tühjendage veepaagist järelejäänud vedelik ja pühkige seade kuivaks. Hoidke seda jahedas, kuivas ja hästi ventileeritud kohas.
2. Pühkige põhiseadet pehme niiske lapiga. Ärge loputage ega kastke seadet vette.
3. Otsikuid võib desinfitseerida 75 % alkoholiga. Ärge steriliseerige neid kõrge temperatuuri või kõrge rõhuga meetoditega.
4. Ristsaastumise vältimiseks on soovitatav, et igal kasutajal oleks oma otsik.

TÕRKEOTSING

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Vett ei tule või veesurve on nõrk	Madal akutase	Laadige seadet
Vett ei tule või veesurve on nõrk	Ummistunud filter või otsik	Puhastage või vahetage filter/otsik
Pragunenud otsik	Liigne kulumine või kahjustus	Vahetage otsik
Seade ei käivitu	Madal akutase või sisemine rike	Laadige seade täielikult. Kui probleem püsib, võtke ühendust klienditoe või edasimüüjaga
Muud probleemid	Tundmatu põhjus	Võtke ühendust klienditoe või kohaliku edasimüüjaga

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.