

FR: EARPUC – MANUEL D'UTILISATION

Nettoyeur automatique d'oreilles

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle : BE011

Dimensions du produit : 265 × 90 × 90 mm

Poids net : 330 g

Niveau sonore : < 65 dB


Tension nominale : 3,7 V

Capacité du réservoir d'eau : 200 ml

Tension d'entrée : 5 V = 1 A

Capacité de la batterie : 1000 mAh

APERÇU DU PRODUIT

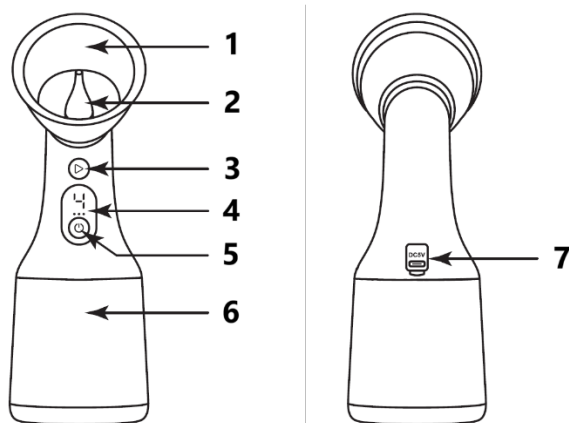

1. Coupelle auriculaire
2. Buse
3. Bouton Démarrer/Pause
4. Écran
5. Bouton Marche/Mode
6. Réservoir d'eau
7. Port de charge


CONTENU DE L'EMBALLAGE



- 1 × Unité principale
 - 4 × Buses
 - 1 × Câble de charge
 - 1 × Manuel d'utilisation
-

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Indicateurs de l'écran

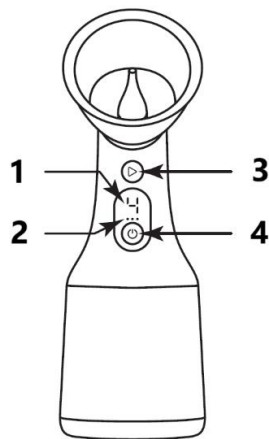

1. Indicateur de mode
2. Indicateur de batterie
3. Indicateur Démarrer/Pause
4. Indicateur Marche/Mode

Modes de fonctionnement

- **Niveau 1 – Mode doux** : Recommandé pour les nouveaux utilisateurs et les oreilles sensibles.
- **Niveau 2 – Mode puissant** : Fournit une pression d'eau plus élevée pour un nettoyage plus intensif.
- **Niveau 3 – Mode pulsé** : Fournit un débit d'eau intermittent pour un nettoyage par pulsations.
- **Niveau 4 – Mode personnalisé** : Permet d'enregistrer votre intensité de nettoyage préférée.

Configuration du mode personnalisé

Maintenez le bouton Démarrer/Pause enfoncé lorsque vous êtes en Mode personnalisé. L'indicateur de niveau commence à clignoter et la pression de l'eau augmente progressivement de faible à élevée. Relâchez le bouton lorsque la pression souhaitée est atteinte. L'appareil enregistre automatiquement ce réglage et le rappelle chaque fois que le Mode personnalisé est sélectionné.


Indicateur de batterie

- Trois barres fixes indiquent une batterie pleine.
- Les barres de batterie clignotantes indiquent un niveau de batterie faible et que l'appareil doit être chargé.

- Les trois barres restent allumées lorsque la charge est terminée.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Pour la première utilisation, sélectionnez le Mode doux.
- Il est recommandé de ramollir le cérumen avec une solution de ramollissement du cérumen approuvée par un médecin avant utilisation.
- L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

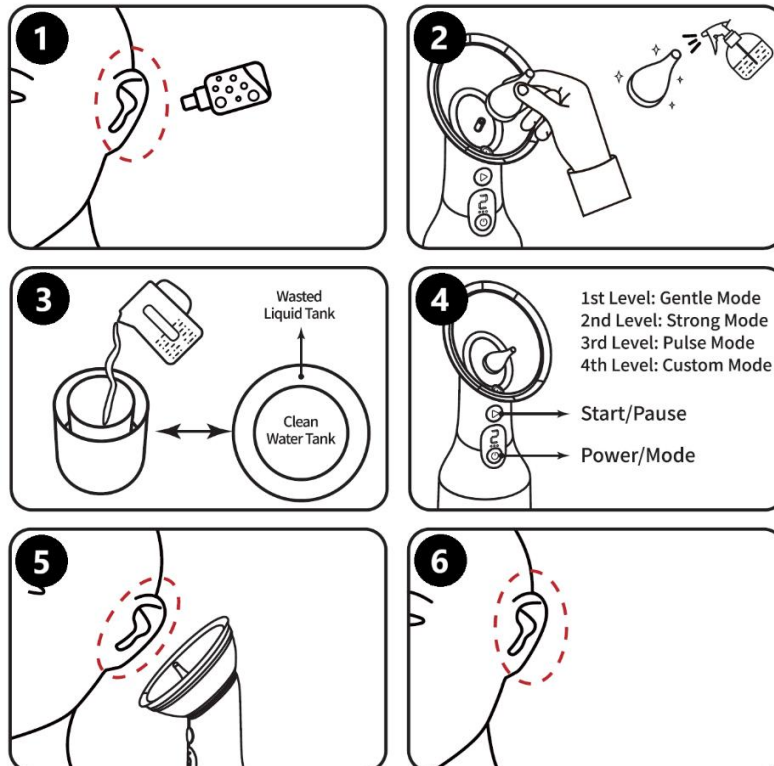

Procédure de nettoyage

1. Ramollir le cérumen

Appliquez une solution adaptée pour ramollir le cérumen dans le conduit auditif conformément aux instructions du fabricant ou aux recommandations de votre professionnel de santé.

Remarque : Si le cérumen est sec ou durci, détachez-le délicatement avec un outil de nettoyage auriculaire approprié avant l'irrigation.

2. Installer la buse

Fixez une buse propre sur l'appareil.

Remarque : Il est recommandé de désinfecter la buse avec de l'alcool à 75 % avant utilisation. Si plusieurs utilisateurs partagent l'appareil, chaque utilisateur doit utiliser une buse séparée afin d'éviter la contamination croisée.

3. Remplir le réservoir d'eau

Remplissez le réservoir avec de l'eau tiède ou une autre solution recommandée par votre professionnel de santé.

Remarque : La température recommandée du liquide est de $37\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ($98\text{ °F} \pm 4\text{ °F}$).

4. Sélectionner un mode

Appuyez sur le bouton Marche/Mode pour allumer l'appareil et sélectionner le mode de nettoyage souhaité.

5. Commencer le nettoyage

Positionnez la buse à l'entrée du conduit auditif et appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour commencer l'irrigation. Appuyez à nouveau sur le bouton à tout moment pour mettre l'opération en pause.

6. Sécher le conduit auditif

Après le nettoyage, séchez délicatement l'oreille externe et retirez toute humidité restante à l'aide d'un coton-tige ou d'un dispositif adapté au séchage des oreilles.

MARCHE, PAUSE ET CHARGE

- **Marche :** Appuyez une fois sur le bouton Marche/Mode pour allumer l'appareil. L'appareil passe en mode veille.
- **Pause :** Pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour interrompre l'irrigation. Appuyez à nouveau pour reprendre.
- **Arrêt :** Maintenez le bouton Marche/Mode enfoncé pendant environ 2 secondes pour éteindre l'appareil.
- **Batterie faible :** Les indicateurs de batterie clignotants indiquent que le niveau de batterie est faible et qu'elle doit être rechargée.
- **Charge :** Pendant la charge, le voyant lumineux clignote en blanc.
- **Charge terminée :** Lorsque la charge est terminée, le voyant lumineux reste blanc fixe.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou endommager le produit.

1. N'utilisez pas ce produit si vous avez une infection de l'oreille, un tympan perforé, des drains transtympaniques ou toute blessure à l'oreille.
2. Si vous ressentez une douleur, des vertiges, une gêne ou une irritation pendant l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.
3. Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.

4. Les enfants de plus de 8 ans doivent utiliser ce produit uniquement sous la surveillance d'un adulte.
5. Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.
6. L'appareil contient une batterie rechargeable intégrée. Gardez-le à l'écart du feu, de la chaleur excessive et de l'humidité.
7. N'utilisez pas d'eau ou de solutions de nettoyage à une température inférieure à la température corporelle, car cela peut provoquer des vertiges ou une gêne.
8. Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne tentez pas de réparer le produit vous-même.
9. N'utilisez pas l'appareil pendant la charge.
10. Débranchez le câble de charge lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
11. Éliminez le produit conformément aux réglementations locales relatives aux déchets électroniques.

ENTRETIEN ET SOIN

1. Après chaque utilisation, videz tout liquide restant du réservoir d'eau et essuyez l'appareil jusqu'à ce qu'il soit sec. Rangez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
2. Essuyez l'unité principale avec un chiffon doux et humide. Ne rincez pas et n'immergez pas l'appareil dans l'eau.
3. Les buses peuvent être désinfectées avec de l'alcool à 75 %. Ne les stérilisez pas avec des méthodes à haute température ou à haute pression.
4. Pour éviter la contamination croisée, il est recommandé que chaque utilisateur dispose de sa propre buse.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Aucune sortie d'eau ou pression d'eau faible	Batterie faible	Rechargez l'appareil
Aucune sortie d'eau ou pression d'eau faible	Filtre ou buse obstrué	Nettoyez ou remplacez le filtre/la buse
Buse fissurée	Usure excessive ou dommage	Remplacez la buse
L'appareil ne démarre pas	Batterie faible ou défaut interne	Chargez complètement l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service client ou votre revendeur
Autres problèmes	Cause inconnue	Contactez le service client ou votre revendeur local

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.