

EL: ΕΑΡΡΥC – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αυτόματος καθαριστής αυτιών

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο: BE011

Διαστάσεις προϊόντος: 265 × 90 × 90 mm

Καθαρό βάρος: 330 g

Επίπεδο θορύβου: < 65 dB


Ονομαστική τάση: 3,7 V

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 200 ml

Τάση εισόδου: 5 V = 1 A


Χωρητικότητα μπαταρίας: 1000 mAh

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

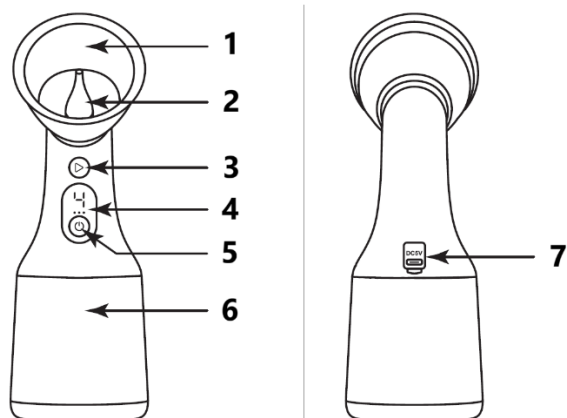

1. Κύπελλο αυτιού
2. Ακροφύσιο
3. Κουμπί Έναρξη/Παύση
4. Οθόνη
5. Κουμπί Ενεργοποίηση/Λειτουργία
6. Δεξαμενή νερού
7. Θύρα φόρτισης


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

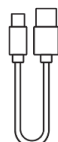

- 1 × Κύρια μονάδα
- 4 × Ακροφύσια
- 1 × Καλώδιο φόρτισης
- 1 × Εγχειρίδιο χρήστη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ενδείξεις οθόνης

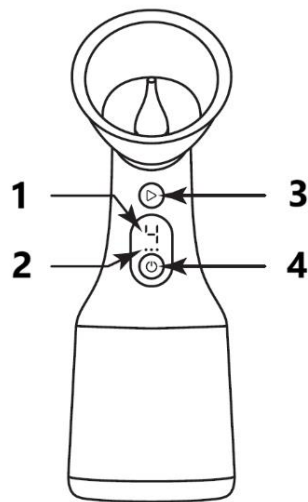

1. Ένδειξη λειτουργίας
2. Ένδειξη μπαταρίας
3. Ένδειξη Έναρξη/Παύση
4. Ένδειξη Ενεργοποίηση/Λειτουργία

Λειτουργίες χρήσης

- **Επίπεδο 1 – Ήπια λειτουργία:** Συνιστάται για χρήστες που χρησιμοποιούν τη συσκευή για πρώτη φορά και για ευαίσθητα αυτιά.
- **Επίπεδο 2 – Ισχυρή λειτουργία:** Παρέχει αυξημένη πίεση νερού για πιο εντατικό καθαρισμό.
- **Επίπεδο 3 – Παλμική λειτουργία:** Παρέχει διακεκομμένη ροή νερού για παλμικό καθαρισμό.
- **Επίπεδο 4 – Προσαρμοσμένη λειτουργία:** Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την προτιμώμενη ένταση καθαρισμού.

Ρύθμιση προσαρμοσμένης λειτουργίας


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Έναρξη/Παύση ενώ βρίσκεστε στην Προσαρμοσμένη λειτουργία. Η ένδειξη επιπέδου θα αρχίσει να αναβοσβήνει και η πίεση του νερού θα αυξάνεται σταδιακά από χαμηλή σε υψηλή. Αφήστε το κουμπί όταν επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση. Η συσκευή θα αποθηκεύσει αυτόματα αυτή τη ρύθμιση και θα την ανακαλεί κάθε φορά που επιλέγεται η Προσαρμοσμένη λειτουργία.

Ένδειξη μπαταρίας

- Τρεις σταθερά φωτισμένες μπάρες υποδεικνύουν πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Οι μπάρες μπαταρίας που αναβοσβήνουν υποδεικνύουν χαμηλή στάθμη μπαταρίας και ότι η συσκευή πρέπει να φορτιστεί.
- Και οι τρεις μπάρες παραμένουν φωτισμένες όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Για την πρώτη χρήση, επιλέξτε την Ήπια λειτουργία.
- Συνιστάται να μαλακώσετε το κερί των αυτιών με διάλυμα μαλάκωσης κεριού αυτιών εγκεκριμένο από γιατρό πριν από τη χρήση.
- Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά αδράνειας.

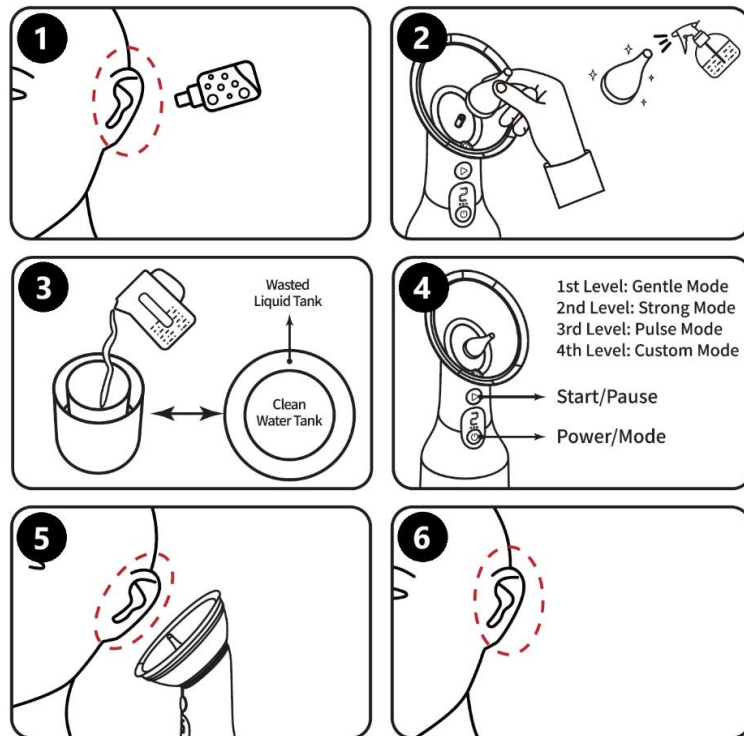

Διαδικασία καθαρισμού

1. Μαλακώστε το κερί των αυτιών

Εφαρμόστε κατάλληλο διάλυμα για τη μαλάκωση του κεριού των αυτιών στον ακουστικό πόρο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή τις συστάσεις του επαγγελματία υγείας σας.

Σημείωση: Εάν το κερί των αυτιών είναι ξηρό ή σκληρυμένο, χαλαρώστε το απαλά με κατάλληλο εργαλείο καθαρισμού αυτιών πριν από την έκπλυση.

2. Τοποθετήστε το ακροφύσιο

Προσαρμόστε ένα καθαρό ακροφύσιο στη συσκευή.

Σημείωση: Συνιστάται η απολύμανση του ακροφυσίου με αλκοόλη 75 % πριν από τη χρήση. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται από περισσότερους χρήστες, κάθε χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί ξεχωριστό ακροφύσιο για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης.

3. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού

Γεμίστε τη δεξαμενή με ζεστό νερό ή άλλο διάλυμα που συνιστάται από επαγγελματία υγείας.

Σημείωση: Η συνιστώμενη θερμοκρασία υγρού είναι $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ($98^{\circ}\text{F} \pm 4^{\circ}\text{F}$).

4. Επιλέξτε λειτουργία

Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Λειτουργία για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία καθαρισμού.

5. Ξεκινήστε τον καθαρισμό

Τοποθετήστε το ακροφύσιο στην είσοδο του ακουστικού πόρου και πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσει η έκπλυση. Πατήστε ξανά το κουμπί οποιαδήποτε στιγμή για να διακόψετε προσωρινά τη λειτουργία.

6. Στεγνώστε τον ακουστικό πόρο

Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε απαλά το εξωτερικό αυτί και αφαιρέστε τυχόν υπολειπόμενη υγρασία χρησιμοποιώντας μπατονέτα ή κατάλληλη συσκευή στεγνώματος αυτιών.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ

- **Ενεργοποίηση:** Πατήστε μία φορά το κουμπί Ενεργοποίηση/Λειτουργία για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία αναμονής.
- **Παύση:** Κατά τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να διακόψετε προσωρινά την έκπλυση. Πατήστε το ξανά για συνέχιση.
- **Απενεργοποίηση:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ενεργοποίηση/Λειτουργία για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- **Χαμηλή στάθμη μπαταρίας:** Οι ενδείξεις μπαταρίας που αναβοσβήνουν υποδεικνύουν ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και πρέπει να επαναφορτιστεί.
- **Φόρτιση:** Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει λευκή.
- **Ολοκλήρωση φόρτισης:** Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η ενδεικτική λυχνία παραμένει σταθερά λευκή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

1. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν έχετε λοίμωξη στο αυτί, διάτρητο τύμπανο, σωληνίσκους στο αυτί ή οποιονδήποτε τραυματισμό στο αυτί.

- Εάν κατά τη χρήση αισθανθείτε πόνο, ζάλη, δυσφορία ή ερεθισμό, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Παιδιά άνω των 8 ετών πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε το μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Κρατήστε τη μακριά από φωτιά, υπερβολική θερμότητα και υγρασία.
- Μη χρησιμοποιείτε νερό ή καθαριστικά διαλύματα κάτω από τη θερμοκρασία του σώματος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζάλη ή δυσφορία.
- Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ φορτίζεται.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για ηλεκτρονικά απόβλητα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Μετά από κάθε χρήση, αδειάστε το υπόλοιπο υγρό από τη δεξαμενή νερού και σκουπίστε τη συσκευή μέχρι να στεγνώσει. Φυλάξτε τη σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- Σκουπίστε την κύρια μονάδα με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μην ξεπλένετε και μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Τα ακροφύσια μπορούν να απολυμανθούν με αλκοόλη 75 %. Μην τα αποστειρώνετε με μεθόδους υψηλής θερμοκρασίας ή υψηλής πίεσης.
- Για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης, συνιστάται κάθε χρήστης να έχει το δικό του ακροφύσιο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν υπάρχει έξοδος νερού ή η πίεση του νερού είναι αδύναμη	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας	Φορτίστε τη συσκευή
Δεν υπάρχει έξοδος νερού ή η πίεση του νερού είναι αδύναμη	Φραγμένο φίλτρο ή ακροφύσιο	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο/ακροφύσιο
Ραγισμένο ακροφύσιο	Υπερβολική φθορά ή ζημιά	Αντικαταστήστε το ακροφύσιο
Η συσκευή δεν ξεκινά	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας ή εσωτερική βλάβη	Φορτίστε πλήρως τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών ή τον προμηθευτή σας
Άλλα προβλήματα	Άγνωστη αιτία	Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών ή τον τοπικό προμηθευτή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.