

HR: EARPUC – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Automatski čistač ušiju

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model: BE011

Dimenzije proizvoda: 265 × 90 × 90 mm

Neto težina: 330 g

Razina buke: < 65 dB


Nazivni napon: 3,7 V

Kapacitet spremnika za vodu: 200 ml

Ulazni napon: 5 V = 1 A

Kapacitet baterije: 1000 mAh

PREGLED PROIZVODA

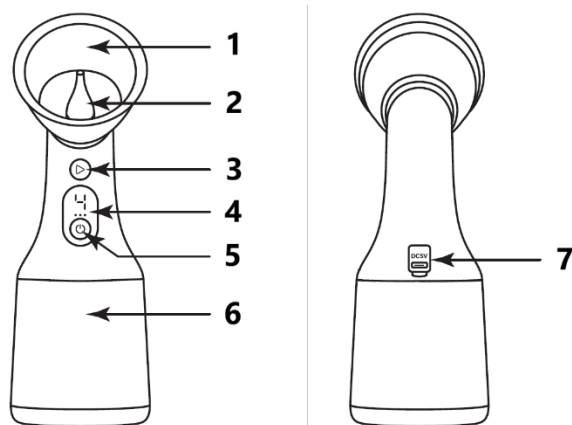

1. Čašica za uho
2. Mlaznica
3. Gumb Pokretanje/Pauza
4. Zaslon
5. Gumb Uključivanje/Način rada
6. Spremnik za vodu
7. Priključak za punjenje


SADRŽAJ PAKIRANJA



- 1 × Glavna jedinica
- 4 × Mlaznice
- 1 × Kabel za punjenje
- 1 × Korisnički priručnik

OPIS FUNKCIJA

Indikatori zaslona

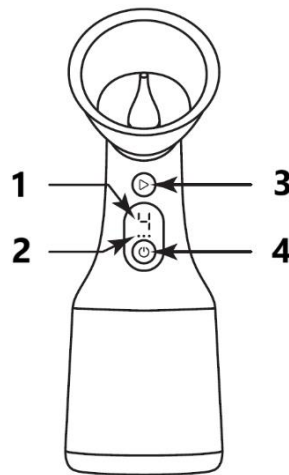

1. Indikator načina rada
2. Indikator baterije
3. Indikator Pokretanje/Pauza
4. Indikator Uključivanje/Način rada

Načini rada

- **Razina 1 – Nježni način rada:** Preporučuje se za korisnike koji prvi put koriste uređaj i za osjetljive uši.
- **Razina 2 – Snažni način rada:** Omogućuje veći tlak vode za intenzivnije čišćenje.
- **Razina 3 – Pulsirajući način rada:** Omogućuje isprekidan protok vode za pulsirajuće čišćenje.
- **Razina 4 – Prilagođeni način rada:** Omogućuje spremanje željenog intenziteta čišćenja.

Postavljanje prilagođenog načina rada


Pritisnite i držite gumb Pokretanje/Pauza dok ste u Prilagođenom načinu rada. Indikator razine počeo će treptati, a tlak vode postupno će se povećavati od niskog prema visokom. Otpustite gumb kada postignete željeni tlak. Uređaj će automatski spremati ovu postavku i koristiti je svaki put kada odaberete Prilagođeni način rada.

Indikator baterije

- Tri stalno osvijetljene crtice označavaju potpuno napunjenu bateriju.
- Trepereće crtice baterije označavaju nisku razinu baterije i potrebu za punjenjem uređaja.
- Sve tri crtice ostaju osvijetljene kada je punjenje završeno.

UPUTE ZA UPORABU

- Prilikom prve uporabe odaberite Nježni način rada.
- Preporučuje se omekšati ušni vosak otopinom za omekšavanje ušnog voska koju je odobrio liječnik prije uporabe.
- Uređaj će se automatski isključiti nakon 10 minuta neaktivnosti.

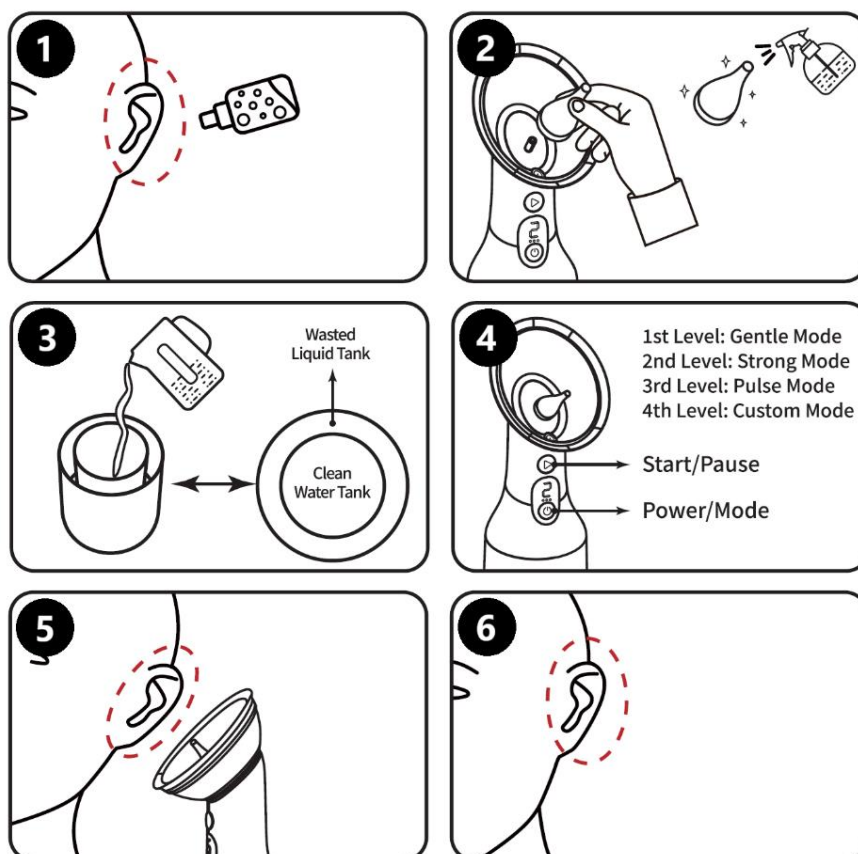

Postupak čišćenja

1. Omekšajte ušni vosak

Nanesite odgovarajuću otopinu za omekšavanje ušnog voska u zvukovod prema uputama proizvođača ili preporukama zdravstvenog stručnjaka.

Napomena: Ako je ušni vosak suh ili stvrdnut, nježno ga otpustite odgovarajućim alatom za čišćenje ušiju prije ispiranja.

2. Postavite mlaznicu

Pričvrstite čistu mlaznicu na uređaj.

Napomena: Preporučuje se dezinficirati mlaznicu 75 %-tnim alkoholom prije uporabe. Ako uređaj koristi više osoba, svaki korisnik treba koristiti vlastitu mlaznicu kako bi se spriječila unakrsna kontaminacija.

3. Napunite spremnik za vodu

Napunite spremnik toplom vodom ili drugom otopinom koju preporuča zdravstveni stručnjak.

Napomena: Preporučena temperatura tekućine je $37\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($98\text{ }^{\circ}\text{F} \pm 4\text{ }^{\circ}\text{F}$).

4. Odaberite način rada

Pritisnite gumb Uključivanje/Način rada kako biste uključili uređaj i odabrali željeni način čišćenja.

5. Započnite čišćenje

Postavite mlaznicu na ulaz u zvukovod i pritisnite gumb Pokretanje/Pauza kako biste započeli ispiranje. Ponovno pritisnite gumb u bilo kojem trenutku kako biste pauzirali rad.

6. Osušite zvukovod

Nakon čišćenja nježno osušite vanjski dio uha i uklonite preostalu vlagu pomoću pamučnog štapića ili odgovarajućeg uređaja za sušenje ušiju.

UKLJUČIVANJE, PAUZIRANJE I PUNJENJE

- **Uključivanje:** Jednom pritisnite gumb Uključivanje/Način rada kako biste uključili uređaj. Uređaj će prijeći u stanje pripravnosti.
- **Pauza:** Tijekom rada pritisnite gumb Pokretanje/Pauza kako biste zaustavili ispiranje. Ponovno ga pritisnite za nastavak rada.
- **Isključivanje:** Pritisnite i držite gumb Uključivanje/Način rada približno 2 sekunde kako biste isključili uređaj.
- **Niska razina baterije:** Trepereći indikatori baterije označavaju da je baterija pri kraju i da ju je potrebno napuniti.
- **Punjenje:** Tijekom punjenja indikatorsko svjetlo treperi bijelo.
- **Punjenje završeno:** Kada je punjenje završeno, indikatorsko svjetlo svijetli neprekidno bijelo.

SIGURNOSNE MJERE

Molimo pažljivo pročitajte sve upute prije uporabe. Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati ozljede ili oštećenje proizvoda.

1. Nemojte koristiti ovaj proizvod ako imate infekciju uha, perforirani bubnjić, ugrađene cjevčice u uhu ili bilo kakvu ozljedu uha.
2. Ako tijekom uporabe osjetite bol, vrtoglavicu, nelagodu ili iritaciju, odmah prestanite koristiti uređaj.
3. Ovaj proizvod nije prikladan za djecu mlađu od 8 godina.
4. Djeca starija od 8 godina smiju koristiti ovaj proizvod samo pod nadzorom odrasle osobe.
5. Ovaj proizvod nije igračka. Držite ga izvan dohvata djece.
6. Uređaj sadrži ugrađenu punjivu bateriju. Držite ga podalje od vatre, prekomjerne topline i vlage.

7. Nemojte koristiti vodu ili otopine za čišćenje koje su hladnije od tjelesne temperature jer mogu uzrokovati vrtoglavicu ili nelagodu.
8. Nemojte rastavljati, preinačavati niti pokušavati sami popravljati proizvod.
9. Nemojte koristiti uređaj tijekom punjenja.
10. Isključite kabel za punjenje kada uređaj nije u uporabi.
11. Zbrinite proizvod u skladu s lokalnim propisima o elektroničkom otpadu.

ODRŽAVANJE I NJEGA

1. Nakon svake uporabe ispraznite preostalu tekućinu iz spremnika za vodu i obrišite uređaj do suhog. Čuvajte ga na hladnom, suhom i dobro prozračenom mjestu.
2. Glavnu jedinicu obrišite mekom, vlažnom krpom. Nemojte ispirati niti uranjati uređaj u vodu.
3. Mlaznice se mogu dezinficirati 75 %-tnim alkoholom. Nemojte ih sterilizirati metodama visoke temperature ili visokog tlaka.
4. Kako bi se izbjegla unakrsna kontaminacija, preporučuje se da svaki korisnik ima vlastitu mlaznicu.

RJEŠAVANJE POTEŠKOĆA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Nema protoka vode ili je tlak vode slab	Niska razina baterije	Napunite uređaj
Nema protoka vode ili je tlak vode slab	Začepljen filter ili mlaznica	Očistite ili zamijenite filter/mlaznicu
Napuknuta mlaznica	Prekomjerno trošenje ili oštećenje	Zamijenite mlaznicu
Uređaj se ne pokreće	Niska razina baterije ili unutarnji kvar	Potpuno napunite uređaj. Ako problem i dalje postoji, obratite se korisničkoj podršci ili prodavaču
Ostali problemi	Nepoznat uzrok	Obratite se korisničkoj podršci ili lokalnom prodavaču

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.