

HU: EARPUC – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Automatikus fültisztító

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Modell: BE011

Termék méretei: 265 × 90 × 90 mm

Nettó tömeg: 330 g

Zajszint: < 65 dB


Névleges feszültség: 3,7 V

Víztartály kapacitása: 200 ml

Bemeneti feszültség: 5 V = 1 A

Akkumulátor kapacitása: 1000 mAh

TERMÉKÁTTEKINTÉS

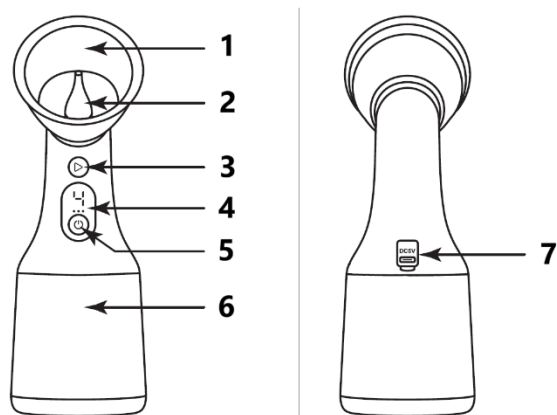

1. Fülcsésze
2. Fúvóka
3. Start/Szünet gomb
4. Kijelző
5. Bekapcsolás/Mód gomb
6. Víztartály
7. Töltőport


A CSOMAG TARTALMA



- 1 × Főegység
- 4 × Fúvóka
- 1 × Töltőkábel
- 1 × Használati útmutató

FUNKCIÓLEÍRÁS

Kijelzőjelzők

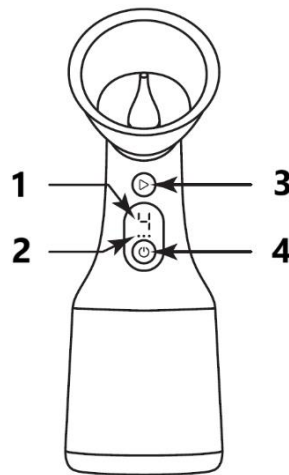

1. Módjelző
2. Akkumulátorjelző
3. Start/Szünet jelző
4. Bekapcsolás/Mód jelző

Üzem módok

- **szint – Kímélő mód:** Első használóknak és érzékeny fülűeknek ajánlott.
- **szint – Erős mód:** Nagyobb víznyomást biztosít az intenzívebb tisztításhoz.
- **szint – Pulzáló mód:** Szakaszos vízáramlást biztosít pulzáló tisztításhoz.
- **szint – Egyéni mód:** Lehetővé teszi a kívánt tisztítási intenzitás elmentését.

Egyéni mód beállítása


Nyomja meg és tartsa lenyomva a Start/Szünet gombot Egyéni módban. A szintjelző villogni kezd, a víznyomás pedig fokozatosan növekszik alacsonyról magasra. Engedje el a gombot, amikor eléri a kívánt nyomást. A készülék automatikusan elmenti ezt a beállítást, és minden alkalommal előhívja, amikor az Egyéni módot kiválasztja.

Akkumulátorjelző

- Három folyamatosan világító sáv teljesen feltöltött akkumulátort jelez.
- A villogó akkumulátorsávok alacsony akkumulátorszintet jeleznek, és a készüléket fel kell tölteni.
- Mindhárom sáv világítva marad, amikor a töltés befejeződött.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Első használatkor válassza a Kímélő módot.
- Használat előtt ajánlott a fülzsírt orvos által jóváhagyott fülzsírlágyító oldattal fellazítani.
- A készülék 10 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.

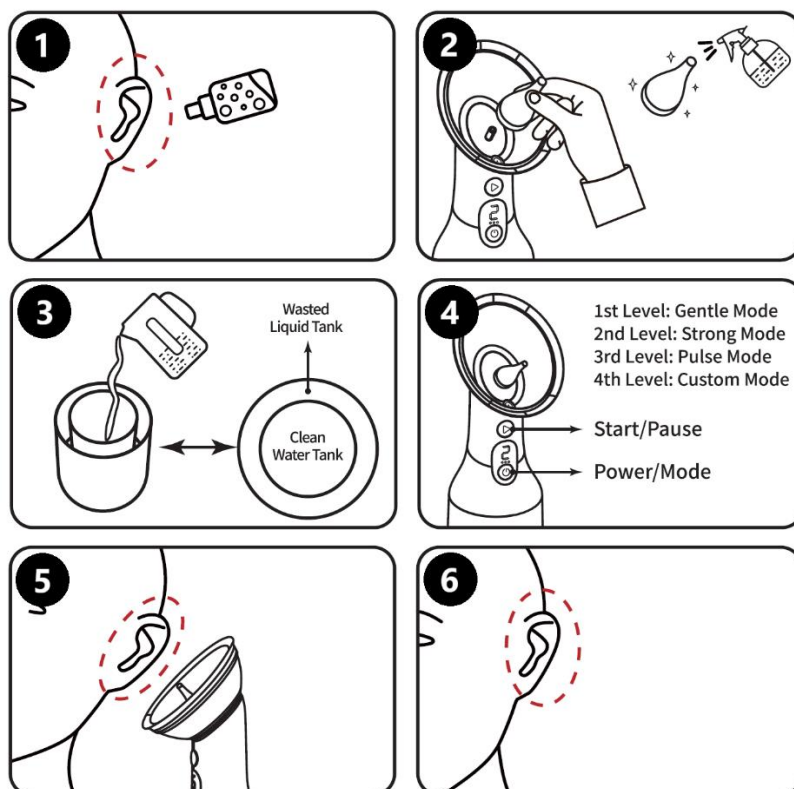

Tisztítási eljárás

1. Lágyítsa fel a fülzsírt

Alkalmazzon megfelelő fülzsírlágyító oldatot a hallójáratba a gyártó utasításai vagy egészségügyi szakember ajánlásai szerint.

Megjegyzés: Ha a fülzsír száraz vagy megkeményedett, öblítés előtt óvatosan lazítsa fel megfelelő fültisztító eszközzel.

2. Helyezze fel a fúvókát

Rögzítsen egy tiszta fúvókát a készülékhez.

Megjegyzés: Használat előtt ajánlott a fúvókát 75 %-os alkohollal fertőtleníteni. Ha a készüléket több felhasználó használja, minden felhasználónak külön fúvókát kell használnia a keresztszennyeződés elkerülése érdekében.

3. Töltse fel a víztartályt

Töltse fel a tartályt meleg vízzel vagy más, egészségügyi szakember által ajánlott oldattal.

Megjegyzés: Az ajánlott folyadék hőmérséklet $37\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ($98\text{ °F} \pm 4\text{ °F}$).

4. Válasszon üzemmódot

Nyomja meg a Bekapcsolás/Mód gombot a készülék bekapcsolásához és a kívánt tisztítási mód kiválasztásához.

5. Kezdje meg a tisztítást

Helyezze a fúvókát a hallójárat bejáratához, majd nyomja meg a Start/Szünet gombot az öblítés megkezdéséhez. A művelet szüneteltetéséhez bármikor nyomja meg újra a gombot.

6. Szárítsa meg a hallójáratot

Tisztítás után óvatosan szárítsa meg a külső fület, és távolítsa el a maradék nedvességet vattapálcával vagy megfelelő fülszáritó eszközzel.

BEKAPCSOLÁS, SZÜNET ÉS TÖLTÉS

- **Bekapcsolás:** Nyomja meg egyszer a Bekapcsolás/Mód gombot a készülék bekapcsolásához. A készülék készenléti módba lép.
- **Szünet:** Működés közben nyomja meg a Start/Szünet gombot az öblítés szüneteltetéséhez. A folytatáshoz nyomja meg újra.
- **Kikapcsolás:** Tartsa lenyomva a Bekapcsolás/Mód gombot körülbelül 2 másodpercig a készülék kikapcsolásához.
- **Alacsony akkumulátorszint:** A villogó akkumulátorjelzők azt jelzik, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony, és fel kell tölteni.
- **Töltés:** Töltés közben a jelzőfény fehéren villog.
- **Töltés befejezve:** Amikor a töltés befejeződött, a jelzőfény folyamatosan fehéren világít.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. Az utasítások be nem tartása sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.

1. Ne használja ezt a terméket, ha fülgyulladás, perforált dobhártyája, fülbe helyezett tubusa vagy bármilyen fülsérülése van.
2. Ha használat közben fájdalmat, szédülést, kellemetlen érzést vagy irritációt tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
3. Ez a termék nem alkalmas 8 év alatti gyermekek számára.
4. A 8 év feletti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják ezt a terméket.
5. Ez a termék nem játék. Gyermekektől elzárva tartandó.

6. A készülék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Tartsa távol tűztől, túlzott hőtől és nedvességtől.
7. Ne használjon testhőmérsékletnél hidegebb vizet vagy tisztítóoldatot, mert ez szédülést vagy kellemetlen érzést okozhat.
8. Ne szerelje szét, ne módosítsa, és ne próbálja saját maga megjavítani a terméket.
9. Ne használja a készüléket töltés közben.
10. Húzza ki a töltőkábelt, amikor a készülék nincs használatban.
11. A terméket a helyi elektronikai hulladéokra vonatkozó előírások szerint ártalmatlanítsa.

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

1. Minden használat után ürítse ki a maradék folyadékot a víztartályból, és törölje szárazra a készüléket. Hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolja.
2. A főegységet puha, nedves ruhával törölje le. Ne öblítse le, és ne merítse vízbe a készüléket.
3. A fúvókák 75 %-os alkohollal fertőtleníthetők. Ne sterilizálja őket magas hőmérsékletű vagy nagy nyomású módszerekkel.
4. A keresztszennyeződés elkerülése érdekében ajánlott, hogy minden felhasználónak saját fúvókája legyen.

HIBAELOHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nincs vízkibocsátás vagy gyenge a víznyomás	Alacsony akkumulátorszint	Töltse fel a készüléket
Nincs vízkibocsátás vagy gyenge a víznyomás	Eltömődött szűrő vagy fúvóka	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt/fúvókát
Repedt fúvóka	Túlzott kopás vagy sérülés	Cserélje ki a fúvókát
A készülék nem indul el	Alacsony akkumulátorszint vagy belső hiba	Töltse fel teljesen a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy a kereskedőhöz
Egyéb problémák	Ismeretlen ok	Forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy a helyi kereskedőhöz

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.