

IT: EARPUC – MANUALE UTENTE

Pulitore automatico per le orecchie

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello: BE011

Dimensioni del prodotto: 265 × 90 × 90 mm

Peso netto: 330 g

Livello di rumore: < 65 dB


Tensione nominale: 3,7 V

Capacità del serbatoio dell'acqua: 200 ml

Tensione in ingresso: 5 V = 1 A


Capacità della batteria: 1000 mAh

PANORAMICA DEL PRODOTTO

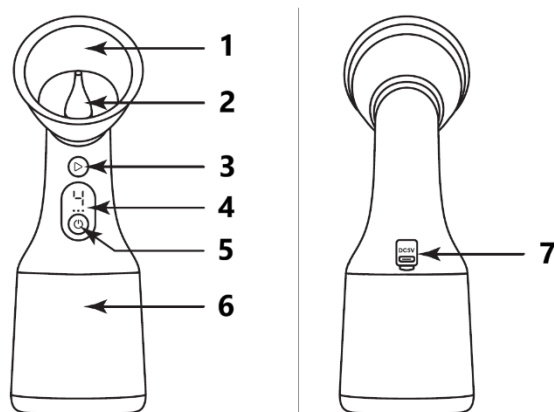

1. Coppetta auricolare
2. Ugello
3. Pulsante Avvio/Pausa
4. Schermo
5. Pulsante Accensione/Modalità
6. Serbatoio dell'acqua
7. Porta di ricarica


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

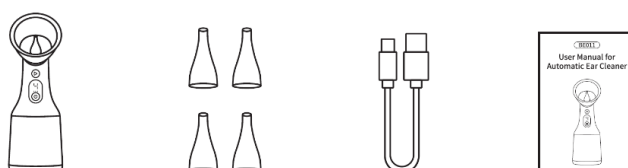

- 1 × Unità principale
- 4 × Ugelli
- 1 × Cavo di ricarica
- 1 × Manuale utente

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

Indicatori del display

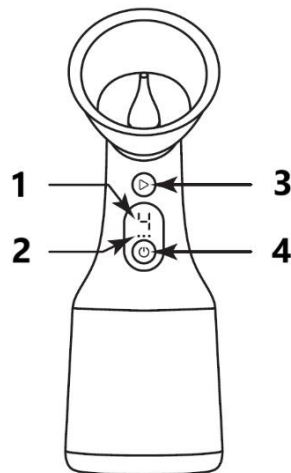

1. Indicatore modalità
2. Indicatore batteria
3. Indicatore Avvio/Pausa
4. Indicatore Accensione/Modalità

Modalità operative

- **Livello 1 – Modalità delicata:** Consigliata per chi utilizza il dispositivo per la prima volta e per orecchie sensibili.
- **Livello 2 – Modalità forte:** Fornisce una maggiore pressione dell'acqua per una pulizia più intensa.
- **Livello 3 – Modalità a impulsi:** Fornisce un flusso d'acqua intermittente per una pulizia pulsante.
- **Livello 4 – Modalità personalizzata:** Consente di salvare l'intensità di pulizia preferita.

Configurazione della modalità personalizzata


Tenere premuto il pulsante Avvio/Pausa mentre si è in Modalità personalizzata. L'indicatore del livello inizierà a lampeggiare e la pressione dell'acqua aumenterà gradualmente da bassa ad alta. Rilasciare il pulsante quando viene raggiunta la pressione desiderata. Il dispositivo salverà automaticamente questa impostazione e la richiamerà ogni volta che viene selezionata la Modalità personalizzata.

Indicatore batteria

- Tre barre fisse indicano una batteria completamente carica.
- Le barre della batteria lampeggianti indicano un livello di batteria basso e che il dispositivo deve essere ricaricato.
- Tutte e tre le barre rimangono illuminate quando la ricarica è completa.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Al primo utilizzo, selezionare la Modalità delicata.
- Prima dell'uso, si consiglia di ammorbidire il cerume con una soluzione ammorbidente per cerume approvata dal medico.
- Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività.

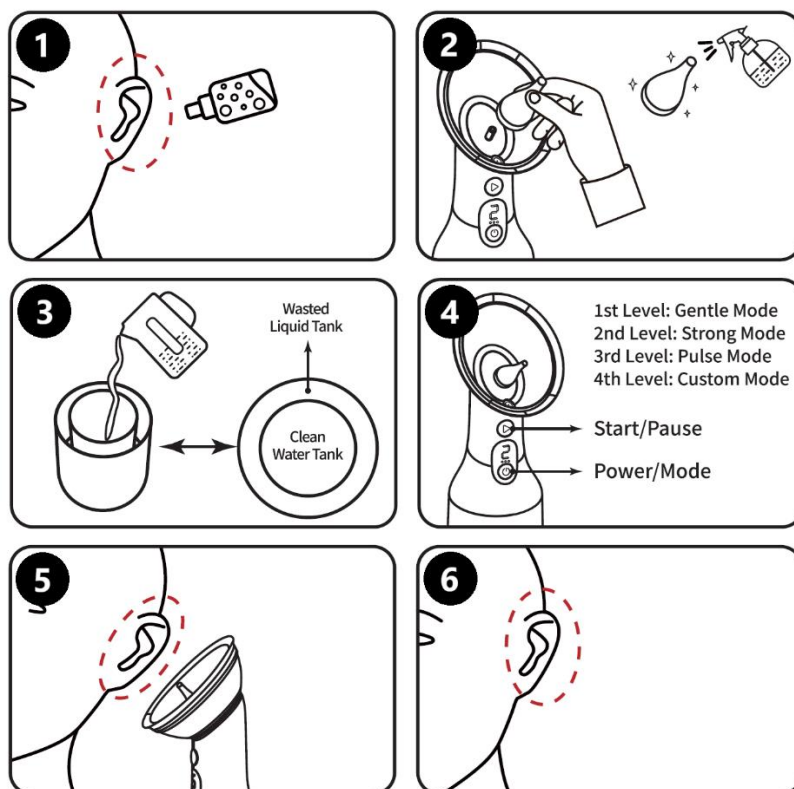

Procedura di pulizia

1. Ammorbidire il cerume

Applicare una soluzione adatta per ammorbidire il cerume nel condotto uditivo secondo le istruzioni del produttore o le raccomandazioni del proprio medico.

Nota: Se il cerume è secco o indurito, allentarlo delicatamente con uno strumento adeguato per la pulizia delle orecchie prima dell'irrigazione.

2. Installare l'ugello

Applicare un ugello pulito al dispositivo.

Nota: Si consiglia di disinfettare l'ugello con alcol al 75 % prima dell'uso. Se il dispositivo viene condiviso da più utenti, ciascun utente dovrebbe utilizzare un ugello separato per prevenire la contaminazione incrociata.

3. Riempire il serbatoio dell'acqua

Riempire il serbatoio con acqua tiepida o con un'altra soluzione raccomandata dal proprio medico.

Nota: La temperatura consigliata del liquido è $37\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ($98\text{ °F} \pm 4\text{ °F}$).

4. Selezionare una modalità

Premere il pulsante Accensione/Modalità per accendere il dispositivo e selezionare la modalità di pulizia desiderata.

5. Iniziare la pulizia

Posizionare l'ugello all'ingresso del condotto uditivo e premere il pulsante Avvio/Pausa per avviare l'irrigazione. Premere nuovamente il pulsante in qualsiasi momento per mettere in pausa l'operazione.

6. Asciugare il condotto uditivo

Dopo la pulizia, asciugare delicatamente l'orecchio esterno e rimuovere l'umidità residua con un bastoncino di cotone o un dispositivo adatto per l'asciugatura delle orecchie.

ACCENSIONE, PAUSA E RICARICA

- **Accensione:** Premere una volta il pulsante Accensione/Modalità per accendere il dispositivo. Il dispositivo entrerà in modalità standby.
- **Pausa:** Durante il funzionamento, premere il pulsante Avvio/Pausa per sospendere l'irrigazione. Premere di nuovo per riprendere.
- **Spegnimento:** Tenere premuto il pulsante Accensione/Modalità per circa 2 secondi per spegnere il dispositivo.
- **Batteria scarica:** Gli indicatori della batteria lampeggianti indicano che il livello della batteria è basso e deve essere ricaricata.
- **Ricarica:** Durante la ricarica, la spia lampeggia in bianco.
- **Ricarica completa:** Quando la ricarica è completa, la spia rimane bianca fissa.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni o danni al prodotto.

1. Non utilizzare questo prodotto in caso di infezione all'orecchio, timpano perforato, tubicini auricolari o qualsiasi lesione all'orecchio.
2. Se durante l'uso si avverte dolore, vertigini, fastidio o irritazione, interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo.
3. Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 8 anni.
4. I bambini di età superiore a 8 anni devono utilizzare questo prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
5. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
6. Il dispositivo contiene una batteria ricaricabile integrata. Tenerlo lontano da fuoco, calore eccessivo e umidità.
7. Non utilizzare acqua o soluzioni detergenti a temperatura inferiore a quella corporea, poiché ciò può causare vertigini o fastidio.
8. Non smontare, modificare o tentare di riparare il prodotto autonomamente.
9. Non utilizzare il dispositivo mentre è in carica.
10. Scollegare il cavo di ricarica quando il dispositivo non è in uso.
11. Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.

MANUTENZIONE E CURA

1. Dopo ogni utilizzo, svuotare il liquido residuo dal serbatoio dell'acqua e asciugare il dispositivo. Conservarlo in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.
2. Pulire l'unità principale con un panno morbido e umido. Non risciacquare né immergere il dispositivo in acqua.
3. Gli ugelli possono essere disinfettati con alcol al 75 %. Non sterilizzarli con metodi ad alta temperatura o alta pressione.
4. Per evitare la contaminazione incrociata, si consiglia che ogni utente abbia il proprio ugello.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Nessuna fuoriuscita d'acqua o pressione dell'acqua debole	Batteria scarica	Ricaricare il dispositivo
Nessuna fuoriuscita d'acqua o pressione dell'acqua debole	Filtro o ugello ostruito	Pulire o sostituire il filtro/ugello
Ugello incrinato	Usura eccessiva o danno	Sostituire l'ugello
Il dispositivo non si avvia	Batteria scarica o guasto interno	Ricaricare completamente il dispositivo. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti o il rivenditore
Altri problemi	Causa sconosciuta	Contattare l'assistenza clienti o il rivenditore locale

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.