

LT: EARPUC – NAUDOTOJO VADOVAS

Automatinis ausų valiklis

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Modelis: BE011

Gaminio matmenys: 265 × 90 × 90 mm

Grynasis svoris: 330 g

Triukšmo lygis: < 65 dB


Vardinė įtampa: 3,7 V

Vandens bakelio talpa: 200 ml

Įėjimo įtampa: 5 V = 1 A


Baterijos talpa: 1000 mAh

GAMINIO APŽVALGA

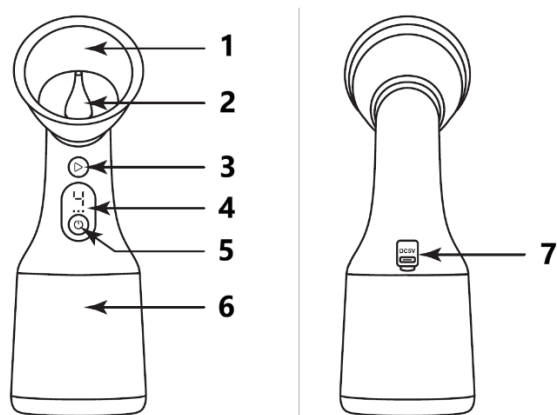

1. Ausies kaušelis
2. Antgalis
3. Starto/Pauzės mygtukas
4. Ekranas
5. Įjungimo/Režimo mygtukas
6. Vandens bakelis
7. Įkrovimo jungtis


PAKUOTĖS TURINYS

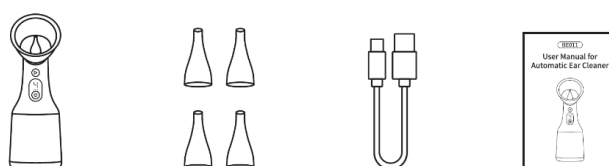

- 1 × Pagrindinis įrenginys
- 4 × Antgaliai
- 1 × Įkrovimo laidas
- 1 × Naudotojo vadovas

FUNKCIJŲ APRAŠYMAS

Ekranų indikatoriai

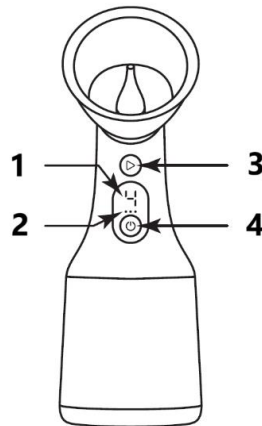

1. Režimo indikatorius
2. Baterijos indikatorius
3. Starto/Pauzės indikatorius
4. Įjungimo/Režimo indikatorius

Veikimo režimai

- **1 lygis – Švelnus režimas:** Rekomenduojamas pirmą kartą naudojantiems ir jautrioms ausims.
- **2 lygis – Stiprus režimas:** Užtikrina didesnę vandens slėgį intensyvesniam valymui.
- **3 lygis – Pulsavimo režimas:** Užtikrina pertraukiamą vandens srautą pulsuojančiam valymui.
- **4 lygis – Individualus režimas:** Leidžia išsaugoti pageidaujamą valymo intensyvumą.

Individualaus režimo nustatymas


Paspauskite ir laikykite Starto/Pauzės mygtuką, kai įjungtas Individualus režimas. Lygio indikatorius pradės mirksėti, o vandens slėgis palaipsniui didės nuo žemo iki aukšto. Atleiskite mygtuką, kai pasiekiamas norimas slėgis. Įrenginys automatiškai išsaugos šį nustatymą ir naudos jį kiekvieną kartą pasirinkus Individualų režimą.

Baterijos indikatorius

- Trys nuolat šviečiančios juostelės rodo visiškai įkrautą bateriją.
 - Mirksinčios baterijos juostelės rodo žemą baterijos lygį ir tai, kad įrenginį reikia įkrauti.
 - Visos trys juostelės lieka šviesti, kai įkrovimas baigtas.
-

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Naudojant pirmą kartą, pasirinkite Švelnų režimą.
- Prieš naudojimą rekomenduojama suminkštinti ausų sierą gydytojo patvirtintu ausų sieros minkštinimo tirpalu.
- Įrenginys automatiškai išsijungs po 10 minučių neveikimo.

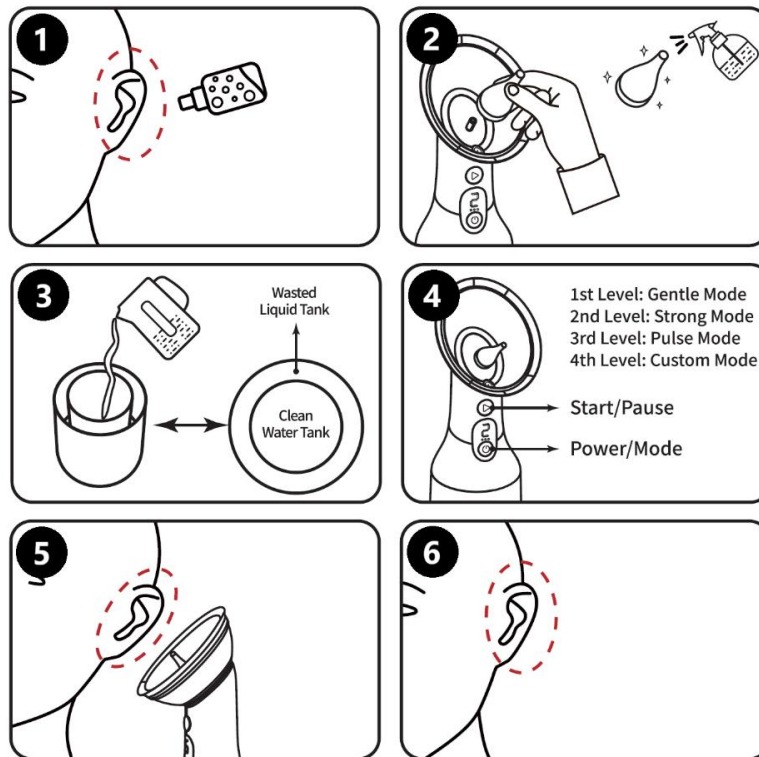

Valymo procedūra

1. Suminkštinkite ausų sierą

Įlašinkite tinkamą ausų sieros minkštinimo tirpalą į ausies kanalą pagal gamintojo instrukcijas arba sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas.

Pastaba: Jei ausų siera yra sausa arba sukietėjusi, prieš skalavimą švelniai ją atlaisvinkite tinkamu ausų valymo įrankiu.

2. Uždėkite antgalį

Pritvirtinkite švarų antgalį prie įrenginio.

Pastaba: Prieš naudojimą rekomenduojama dezinfekuoti antgalį 75 % alkoholiu. Jei įrenginiu naudojasi keli asmenys, kiekvienas naudotojas turėtų naudoti atskirą antgalį, kad būtų išvengta kryžminės taršos.

3. Pripildykite vandens bakelį

Pripildykite bakelį šiltu vandeniu arba kitu sveikatos priežiūros specialisto rekomenduotu tirpalu.

Pastaba: Rekomenduojama skysčio temperatūra yra $37\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($98\text{ }^{\circ}\text{F} \pm 4\text{ }^{\circ}\text{F}$).

4. Pasirinkite režimą

Paspauskite Įjungimo/Režimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį ir pasirinktumėte norimą valymo režimą.

5. Pradėkite valymą

Padėkite antgalį prie ausies kanalo įėjimo ir paspauskite Starto/Pauzės mygtuką, kad pradėtumėte skalavimą. Norėdami bet kada pristabdyti veikimą, dar kartą paspauskite mygtuką.

6. Nusausinkite ausies kanalą

Po valymo švelniai nusausinkite išorinę ausį ir pašalinkite likusią drėgmę naudodami vatos pagaliuką arba tinkamą ausų džiovinimo įrenginį.

ĮJUNGIMAS, PAUZĖ IR ĮKROVIMAS

- **Įjungimas:** Vieną kartą paspauskite Įjungimo/Režimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį. Įrenginys pereis į budėjimo režimą.
- **Pauzė:** Veikimo metu paspauskite Starto/Pauzės mygtuką, kad pristabdytumėte skalavimą. Paspauskite dar kartą, kad tęstumėte.
- **Išjungimas:** Paspauskite ir laikykite Įjungimo/Režimo mygtuką maždaug 2 sekundes, kad išjungtumėte įrenginį.
- **Žemas baterijos lygis:** Mirksintys baterijos indikatoriai rodo, kad baterijos lygis yra žemas ir ją reikia įkrauti.
- **Įkrovimas:** Įkrovimo metu indikatoriaus lemputė mirksi baltai.
- **Įkrovimas baigtas:** Kai įkrovimas baigtas, indikatoriaus lemputė nuolat šviečia baltai.

SAUGOS PRIEMONĖS

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite visas instrukcijas. Nesilaikant šių instrukcijų galima susižaloti arba sugadinti gaminį.

1. Nenaudokite šio gaminio, jei turite ausies infekciją, perforuotą ausies būgnelį, ausų vamzdelius arba bet kokią ausies sužalojimą.
2. Jei naudojimo metu jaučiate skausmą, galvos svaigimą, diskomfortą ar sudirginimą, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį.
3. Šis gaminys netinka vaikams iki 8 metų.
4. Vyresni nei 8 metų vaikai šį gaminį turi naudoti tik prižiūrimi suaugusiojo.
5. Šis gaminys nėra žaislas. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
6. Įrenginyje yra įmontuota įkraunama baterija. Laikykite jį atokiau nuo ugnies, per didelio karščio ir drėgmės.
7. Nenaudokite vandens ar valymo tirpalų, kurių temperatūra žemesnė nei kūno temperatūra, nes tai gali sukelti galvos svaigimą ar diskomfortą.
8. Neardykite, nemodifikuokite ir nebandykite patys taisyti gaminio.

9. Nenaudokite įrenginio, kol jis kraunamas.
10. Atjunkite įkrovimo laidą, kai įrenginys nenaudojamas.
11. Gaminį utilizuokite pagal vietinius elektroninių atliekų reglamentus.

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

1. Po kiekvieno naudojimo išpilkite likusį skystį iš vandens bakelio ir sausai nuvalykite įrenginį. Laikykite jį vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje.
2. Pagrindinį įrenginį nuvalykite minkšta, drėgna šluoste. Neplaukite ir nemerkite įrenginio į vandenį.
3. Antgalius galima dezinfekuoti 75 % alkoholiu. Nesterilizuokite jų aukštos temperatūros ar aukšto slėgio metodais.
4. Siekiant išvengti kryžminės taršos, rekomenduojama, kad kiekvienas naudotojas turėtų savo antgalį.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Nėra vandens ištekėjimo arba silpnas vandens slėgis	Žemas baterijos lygis	Įkraukite įrenginį
Nėra vandens ištekėjimo arba silpnas vandens slėgis	Užsikimšęs filtras arba antgalis	Išvalykite arba pakeiskite filtrą/antgalį
Įskilęs antgalis	Per didelis nusidėvėjimas arba pažeidimas	Pakeiskite antgalį
Įrenginys neįsijungia	Žemas baterijos lygis arba vidinis gedimas	Visiškai įkraukite įrenginį. Jei problema išlieka, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba arba pardavėju
Kitos problemos	Nežinoma priežastis	Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba arba vietiniu pardavėju

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.