

LV: EARPUC – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Automātisks ausu tīrītājs

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Modelis: BE011

Produkta izmēri: 265 × 90 × 90 mm

Neto svars: 330 g

Trokšņa līmenis: < 65 dB


Nominālais spriegums: 3,7 V

Ūdens tvertnes tilpums: 200 ml

Ieejas spriegums: 5 V = 1 A

Akumulatora ietilpība: 1000 mAh

PRODUKTA PĀRSKATS

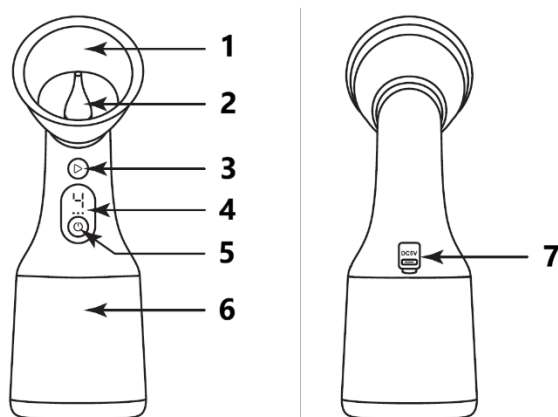

1. Auss kausiņš
2. Sprausla
3. Starta/Pauzes poga
4. Displejs
5. Ieslēgšanas/Režīma poga
6. Ūdens tvertne
7. Uzlādes ports


IEPAKOJUMA SATURS



- 1 × Galvenā ierīce
- 4 × Spraustlas
- 1 × Uzlādes kabelis
- 1 × Lietotāja rokasgrāmata

FUNKCIJU APRAKSTS

Displeja indikatori

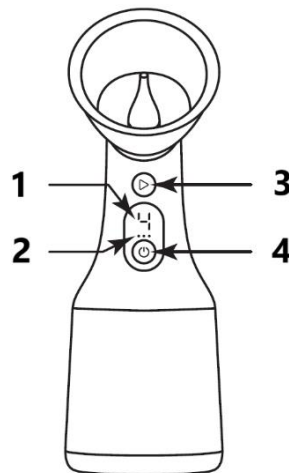

1. Režīma indikators
2. Akumulatora indikators
3. Starta/Pauzes indikators
4. Ieslēgšanas/Režīma indikators

Darbības režīmi

- **līmenis – Saudzīgais režīms:** Ieteicams lietotājiem, kuri ierīci izmanto pirmo reizi, un jutīgām ausīm.
- **līmenis – Spēcīgais režīms:** Nodrošina lielāku ūdens spiedienu intensīvākai tīrīšanai.
- **līmenis – Pulsējošais režīms:** Nodrošina pārtrauktu ūdens plūsmu pulsējošai tīrīšanai.
- **līmenis – Pielāgotais režīms:** Ļauj saglabāt vēlamo tīrīšanas intensitāti.

Pielāgotā režīma iestatīšana


Nospiediet un turiet Starta/Pauzes pogu, atrodoties Pielāgotajā režīmā. Līmeņa indikators sāks mirgot, un ūdens spiediens pakāpeniski palielināsies no zema līdz augstam. Atlaidiet pogu, kad ir sasniegts vēlamais spiediens. Ierīce automātiski saglabās šo iestatījumu un izmantos to katru reizi, kad tiks izvēlēts Pielāgotais režīms.

Akumulatora indikators

- Trīs nepārtraukti izgaismotas joslas norāda pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Mirgojošas akumulatora joslas norāda zemu akumulatora līmeni, un ierīce ir jāuzlādē.
- Visas trīs joslas paliek izgaismotas, kad uzlāde ir pabeigta.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Pirmajā lietošanas reizē izvēlieties Saudzīgo režīmu.
- Pirms lietošanas ieteicams mīkstināt ausu sēru ar ārsta apstiprinātu ausu sēra mīkstināšanas šķīdumu.
- Ierīce automātiski izslēgsies pēc 10 minūšu neaktivitātes.

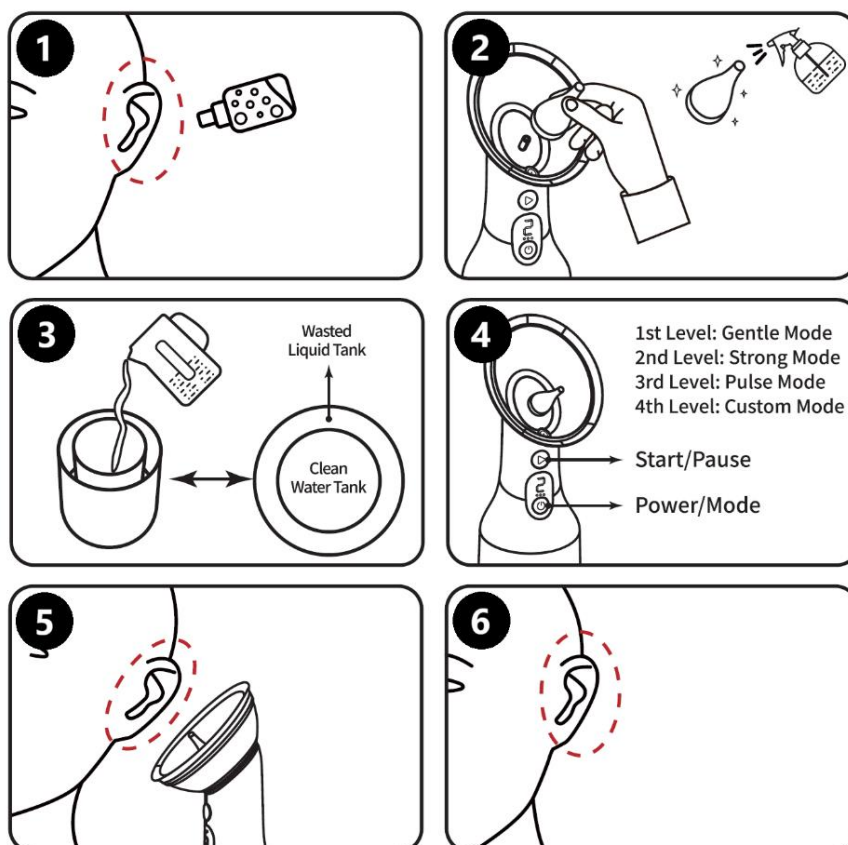

Tīrīšanas procedūra

1. Mīkstiniet ausu sēru

Uzklājiet piemērotu ausu sēra mīkstināšanas šķīdumu auss kanālā saskaņā ar ražotāja norādījumiem vai veselības aprūpes speciālista ieteikumiem.

Piezīme: Ja ausu sērs ir sauss vai sacietējis, pirms skalošanas to uzmanīgi atbrīvojiet ar piemērotu ausu tīrīšanas instrumentu.

2. Uzstādiet sprauslu

Piestipriniet tīru sprauslu pie ierīces.

Piezīme: Pirms lietošanas ieteicams dezinficēt sprauslu ar 75 % alkoholu. Ja ierīci izmanto vairāki lietotāji, katram lietotājam jāizmanto atsevišķa sprausla, lai novērstu krustenisko piesārņojumu.

3. Piepildiet ūdens tvertni

Piepildiet tvertni ar siltu ūdeni vai citu veselības aprūpes speciālista ieteiktu šķidrumu.

Piezīme: Ieteicamā šķidruma temperatūra ir $37\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ($98\text{ °F} \pm 4\text{ °F}$).

4. Izvēlieties režīmu

Nospiediet Ieslēgšanas/Režīma pogu, lai ieslēgtu ierīci un izvēlētos vēlamo tīrīšanas režīmu.

5. Sāciet tīrīšanu

Novietojiet sprauslu pie auss kanāla ieejas un nospiediet Starta/Pauzes pogu, lai sāktu skalošanu. Nospiediet pogu vēlreiz jebkurā brīdī, lai apturētu darbību.

6. Nosusiniet auss kanālu

Pēc tīrīšanas uzmanīgi nosusiniet ārējo ausi un noņemiet atlikušo mitrumu, izmantojot vates kociņu vai piemērotu ausu žāvēšanas ierīci.

IESLĒGŠANA, PAUZE UN UZLĀDE

- **Ieslēgšana:** Vienreiz nospiediet Ieslēgšanas/Režīma pogu, lai ieslēgtu ierīci. Ierīce pāries gaidstāves režīmā.
- **Pauze:** Darbības laikā nospiediet Starta/Pauzes pogu, lai apturētu skalošanu. Nospiediet to vēlreiz, lai turpinātu.
- **Izslēgšana:** Nospiediet un turiet Ieslēgšanas/Režīma pogu aptuveni 2 sekundes, lai izslēgtu ierīci.
- **Zems akumulatora līmenis:** Mirgojoši akumulatora indikatori norāda, ka akumulatora līmenis ir zems un tas ir jāuzlādē.
- **Uzlāde:** Uzlādes laikā indikatora gaisma mirgo baltā krāsā.
- **Uzlāde pabeigta:** Kad uzlāde ir pabeigta, indikatora gaisma nepārtraukti deg baltā krāsā.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet visus norādījumus. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt traumas vai produkta bojājumus.

1. Nelietojiet šo produktu, ja jums ir auss infekcija, perforēta bungādiņa, ausu caurulītes vai jebkāds auss ievainojums.
2. Ja lietošanas laikā jūtat sāpes, reiboni, diskomfortu vai kairinājumu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.
3. Šis produkts nav piemērots bērniem līdz 8 gadu vecumam.
4. Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, drīkst lietot šo produktu tikai pieaugušo uzraudzībā.
5. Šis produkts nav rotaļlieta. Glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.
6. Ierīcē ir iebūvēts uzlādējams akumulators. Sargājiet to no uguns, pārmērīga karstuma un mitruma.

7. Nelietojiet ūdeni vai tīrīšanas šķīdumus, kuru temperatūra ir zemāka par ķermeņa temperatūru, jo tas var izraisīt reiboni vai diskomfortu.
8. Neizjauciet, nepārveidojiet un nemēģiniet labot produktu pats.
9. Nelietojiet ierīci uzlādes laikā.
10. Atvienojiet uzlādes kabeli, kad ierīce netiek lietota.
11. Utilizējiet produktu saskaņā ar vietējiem noteikumiem par elektroniskajiem atkritumiem.

APKOPE UN KOPŠANA

1. Pēc katras lietošanas iztukšojiet atlikušo šķidrumu no ūdens tvertnes un noslaukiet ierīci sausu. Glabājiet to vēsā, sausā un labi vēdināmā vietā.
2. Noslaukiet galveno ierīci ar mīkstu, mitru drānu. Neskalojiet un neiegremdējiet ierīci ūdenī.
3. Sprauslas var dezinficēt ar 75 % alkoholu. Nesterilizējiet tās, izmantojot augstas temperatūras vai augsta spiediena metodes.
4. Lai izvairītos no krusteniskā piesārņojuma, ieteicams, lai katram lietotājam būtu sava sprausla.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Nav ūdens izplūdes vai ūdens spiediens ir vājš	Zems akumulatora līmenis	Uzlādējiet ierīci
Nav ūdens izplūdes vai ūdens spiediens ir vājš	Aizsērējis filtrs vai sprausla	Notīriet vai nomainiet filtru/sprauslu
Ieplaisājusi sprausla	Pārmērīgs nodilums vai bojājums	Nomainiet sprauslu
Ierīce neieslēdzas	Zems akumulatora līmenis vai iekšēja kļūme	Pilnībā uzlādējiet ierīci. Ja problēma nepāriet, sazinieties ar klientu atbalstu vai pārdevēju
Citas problēmas	Nezināms cēlonis	Sazinieties ar klientu atbalstu vai vietējo pārdevēju

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.