

NL: EARPUC – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Automatische oorreiniger

PRODUCTSPECIFICATIES

Model: BE011

Productafmetingen: 265 × 90 × 90 mm

Nettogewicht: 330 g

Geluidsniveau: < 65 dB


Nominale spanning: 3,7 V

Capaciteit watertank: 200 ml

Ingangsspanning: 5 V = 1 A

Batterijcapaciteit: 1000 mAh

PRODUCTOVERZICHT

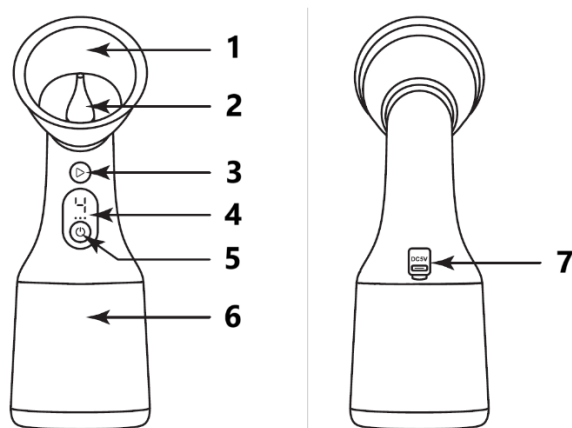

1. Oorcup
 2. Mondstuk
 3. Start/Pauze-knop
 4. Display
 5. Aan/Uit-/Modusknop
 6. Watertank
 7. Oplaadpoort
-


INHOUD VAN DE VERPAKKING



- 1 × Hoofdeenheid
 - 4 × Mondstukken
 - 1 × Oplaadkabel
 - 1 × Gebruikershandleiding
-

FUNCTIEBESCHRIJVING

Display-indicatoren

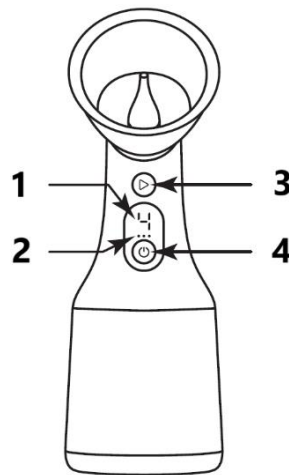

1. Modusindicator
2. Batterij-indicator
3. Start/Pauze-indicator
4. Aan/Uit-/Modusindicator

Bedieningsmodi

- **Niveau 1 – Zachte modus:** Aanbevolen voor nieuwe gebruikers en gevoelige oren.
- **Niveau 2 – Sterke modus:** Zorgt voor hogere waterdruk voor intensievere reiniging.
- **Niveau 3 – Pulsmodus:** Zorgt voor een onderbroken waterstroom voor pulserende reiniging.
- **Niveau 4 – Aangepaste modus:** Hiermee kunt u uw gewenste reinigingsintensiteit opslaan.

Instellen van de aangepaste modus


Houd de Start/Pauze-knop ingedrukt terwijl u zich in de Aangepaste modus bevindt. De niveau-indicator begint te knipperen en de waterdruk neemt geleidelijk toe van laag naar hoog. Laat de knop los wanneer de gewenste druk is bereikt. Het apparaat slaat deze instelling automatisch op en roept deze op telkens wanneer de Aangepaste modus wordt geselecteerd.

Batterij-indicator

- Drie continu brandende balkjes geven een volle batterij aan.
- Knipperende batterijbalkjes geven aan dat de batterij bijna leeg is en dat het apparaat moet worden opgeladen.
- Alle drie de balkjes blijven branden wanneer het opladen is voltooid.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

- Selecteer bij het eerste gebruik de Zachte modus.
- Het wordt aanbevolen om oorsmeer vóór gebruik te verzachten met een door een arts goedgekeurde oorsmeeroplossing.
- Het apparaat schakelt automatisch uit na 10 minuten inactiviteit.

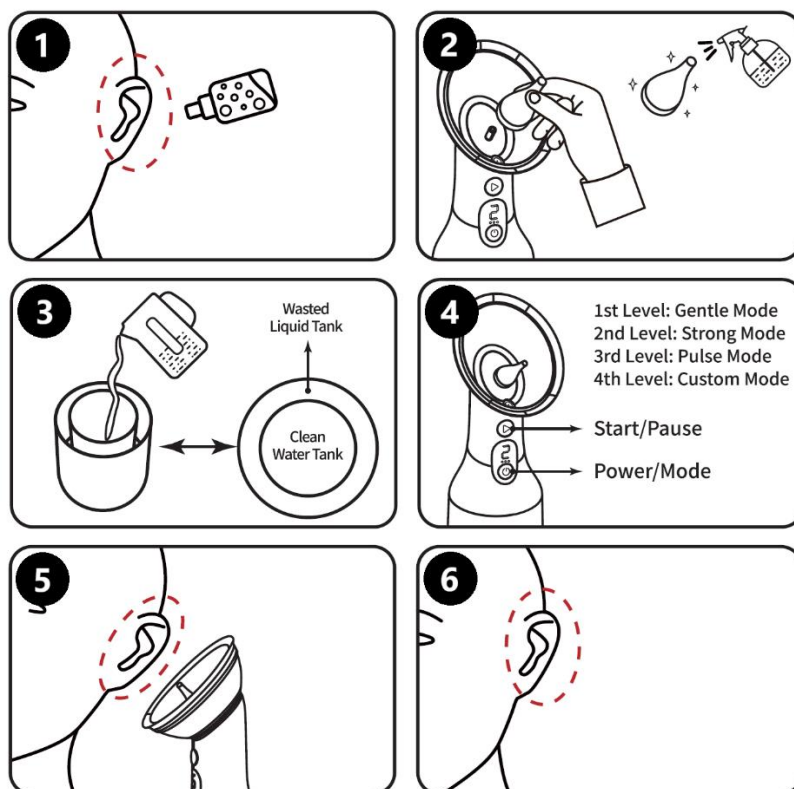

Reinigingsprocedure

1. Verzacht het oorsmeer

Breng een geschikte oplossing voor het verzachten van oorsmeer aan in de gehoorgang volgens de instructies van de fabrikant of de aanbevelingen van uw zorgverlener.

Opmerking: Als het oorsmeer droog of hard is, maak het dan vóór het spoelen voorzichtig los met een geschikt hulpmiddel voor oorreiniging.

2. Plaats het mondstuk

Bevestig een schoon mondstuk op het apparaat.

Opmerking: Het wordt aanbevolen om het mondstuk vóór gebruik te desinfecteren met 75 % alcohol. Als meerdere gebruikers het apparaat delen, moet elke gebruiker een apart mondstuk gebruiken om kruisbesmetting te voorkomen.

3. Vul de watertank

Vul de tank met warm water of een andere oplossing die door uw zorgverlener wordt aanbevolen.

Opmerking: De aanbevolen vloeistoftemperatuur is $37\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ($98\text{ °F} \pm 4\text{ °F}$).

4. Selecteer een modus

Druk op de Aan/Uit-/Modusknop om het apparaat in te schakelen en de gewenste reinigingsmodus te selecteren.

5. Begin met reinigen

Plaats het mondstuk bij de ingang van de gehoorgang en druk op de Start/Pauze-knop om het spoelen te starten. Druk op elk moment opnieuw op de knop om de werking te pauzeren.

6. Droog de gehoorgang

Droog na het reinigen voorzichtig het buitenoor en verwijder eventueel achtergebleven vocht met een wattenstaafje of een geschikt apparaat voor het drogen van oren.

INSCHAKELLEN, PAUZEREN EN OPLADEN

- **Inschakelen:** Druk eenmaal op de Aan/Uit-/Modusknop om het apparaat in te schakelen. Het apparaat gaat naar de stand-bymodus.
- **Pauze:** Druk tijdens het gebruik op de Start/Pauze-knop om het spoelen te pauzeren. Druk opnieuw om door te gaan.
- **Uitschakelen:** Houd de Aan/Uit-/Modusknop ongeveer 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
- **Batterij bijna leeg:** Knipperende batterij-indicatoren geven aan dat de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.
- **Opladen:** Tijdens het opladen knippert het indicatielampje wit.
- **Opladen voltooid:** Wanneer het opladen voltooid is, blijft het indicatielampje continu wit branden.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees alle instructies zorgvuldig door vóór gebruik. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan het product.

1. Gebruik dit product niet als u een oorontsteking, een geperforeerd trommelvlies, buisjes in de oren of een oorletsel heeft.
2. Als u tijdens het gebruik pijn, duizeligheid, ongemak of irritatie ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat.
3. Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar.
4. Kinderen ouder dan 8 jaar mogen dit product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

5. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
6. Het apparaat bevat een ingebouwde oplaadbare batterij. Houd het uit de buurt van vuur, overmatige hitte en vocht.
7. Gebruik geen water of reinigingsoplossingen onder lichaamstemperatuur, omdat dit duizeligheid of ongemak kan veroorzaken.
8. Demonteer, wijzig of probeer het product niet zelf te repareren.
9. Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen.
10. Koppel de oplaadkabel los wanneer het apparaat niet in gebruik is.
11. Voer het product af volgens de lokale voorschriften voor elektronisch afval.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Leeg na elk gebruik de resterende vloeistof uit de watertank en veeg het apparaat droog. Bewaar het op een koele, droge en goed geventileerde plaats.
2. Veeg de hoofdeenheid af met een zachte, vochtige doek. Spoel het apparaat niet af en dompel het niet onder in water.
3. De mondstukken kunnen worden gedesinfecteerd met 75 % alcohol. Steriliseer ze niet met methoden op hoge temperatuur of hoge druk.
4. Om kruisbesmetting te voorkomen, wordt aanbevolen dat elke gebruiker zijn eigen mondstuk heeft.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen waterafgifte of zwakke waterdruk	Batterij bijna leeg	Laad het apparaat op
Geen waterafgifte of zwakke waterdruk	Verstopt filter of mondstuk	Reinig of vervang het filter/mondstuk
Gebarsten mondstuk	Overmatige slijtage of schade	Vervang het mondstuk
Apparaat start niet	Batterij bijna leeg of interne fout	Laad het apparaat volledig op. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de klantenservice of uw dealer
Andere problemen	Onbekende oorzaak	Neem contact op met de klantenservice of uw lokale dealer

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.