

PL: EARPUC – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Automatyczny czyścik do uszu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model: BE011

Wymiary produktu: 265 × 90 × 90 mm

Masa netto: 330 g

Poziom hałasu: < 65 dB


Napięcie znamionowe: 3,7 V

Pojemność zbiornika na wodę: 200 ml

Napięcie wejściowe: 5 V = 1 A

Pojemność baterii: 1000 mAh

PRZEGLĄD PRODUKTU

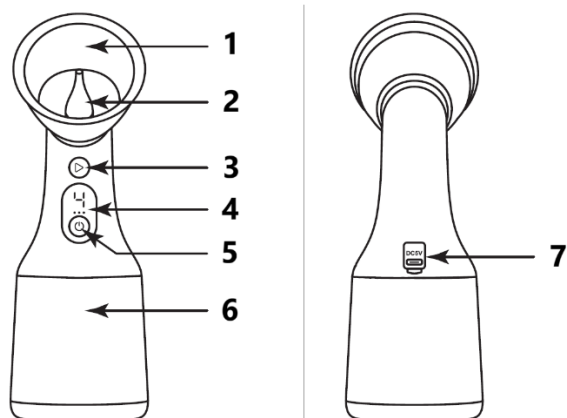

1. Nakładka na ucho
 2. Dysza
 3. Przycisk Start/Pauza
 4. Wyświetlacz
 5. Przycisk Zasilanie/Tryb
 6. Zbiornik na wodę
 7. Port ładowania
-


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



- 1 × Jednostka główna
 - 4 × Dysze
 - 1 × Kabel ładowania
 - 1 × Instrukcja obsługi
-

OPIS FUNKCJI

Wskaźniki wyświetlacza

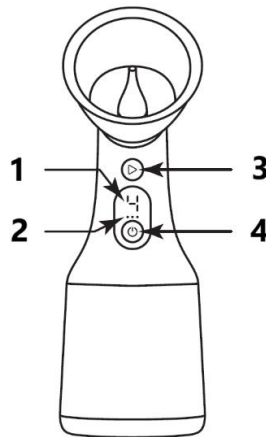

1. Wskaźnik trybu
2. Wskaźnik baterii
3. Wskaźnik Start/Pauza
4. Wskaźnik Zasilanie/Tryb

Tryby pracy

- **Poziom 1 – Tryb delikatny:** Zalecany dla osób korzystających z urządzenia po raz pierwszy oraz dla wrażliwych uszu.
- **Poziom 2 – Tryb mocny:** Zapewnia większe ciśnienie wody dla bardziej intensywnego czyszczenia.
- **Poziom 3 – Tryb pulsacyjny:** Zapewnia przerywany przepływ wody do czyszczenia pulsacyjnego.
- **Poziom 4 – Tryb niestandardowy:** Umożliwia zapisanie preferowanej intensywności czyszczenia.

Konfiguracja trybu niestandardowego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start/Pauza w Trybie niestandardowym. Wskaźnik poziomu zacznie migać, a ciśnienie wody będzie stopniowo zwiększać się od niskiego do wysokiego. Zwolnij przycisk po osiągnięciużądanego ciśnienia. Urządzenie automatycznie zapisze to ustawienie i przywoła je za każdym razem, gdy wybrany zostanie Tryb niestandardowy.


Wskaźnik baterii

- Trzy stale świecące paski oznaczają pełną baterię.

- Migające paski baterii oznaczają niski poziom baterii i konieczność naładowania urządzenia.
- Wszystkie trzy paski pozostają podświetlone po zakończeniu ładowania.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przy pierwszym użyciu wybierz Tryb delikatny.
- Przed użyciem zaleca się zmiękczenie woskowiny usznej roztworem do zmiękczenia woskowiny zatwierdzonym przez lekarza.
- Urządzenie automatycznie wyłączy się po 10 minutach bezczynności.

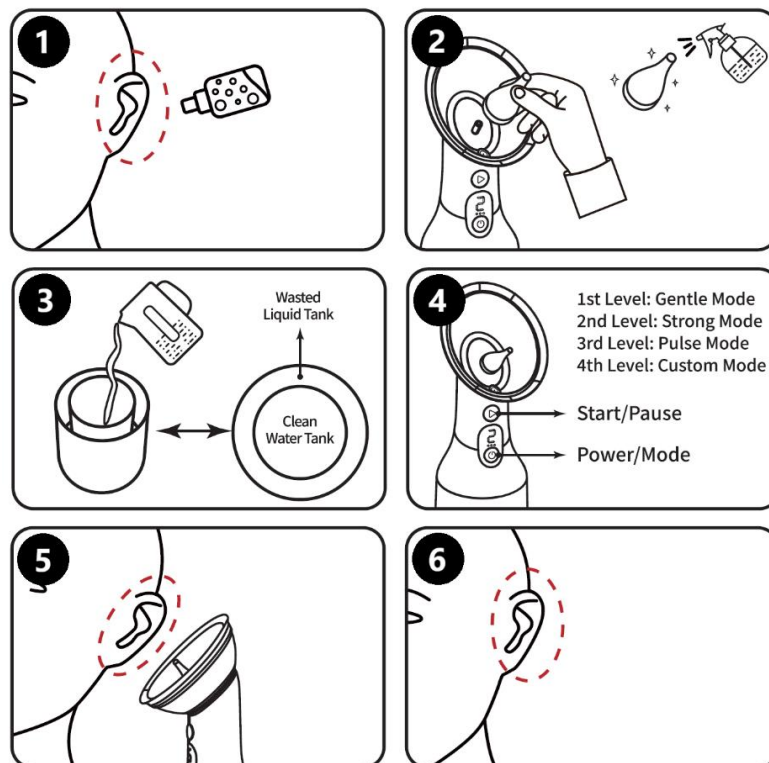

Procedura czyszczenia

1. Zmiękczyć woskowinę uszną

Zastosuj odpowiedni roztwór do zmiękczenia woskowiny usznej w przewodzie słuchowym zgodnie z instrukcjami producenta lub zaleceniami pracownika ochrony zdrowia.

Uwaga: Jeśli woskowina uszna jest sucha lub stwardniała, delikatnie poluzuj ją odpowiednim narzędziem do czyszczenia uszu przed irygacją.

2. Zamontuj dyszę

Przymocuj czystą dyszę do urządzenia.

Uwaga: Zaleca się dezynfekcję dyszy alkoholem 75 % przed użyciem. Jeśli z urządzenia korzysta kilka osób, każdy użytkownik powinien używać osobnej dyszy, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu.

3. Napełnij zbiornik na wodę

Napełnij zbiornik ciepłą wodą lub innym roztworem zalecanym przez pracownika ochrony zdrowia.

Uwaga: Zalecana temperatura płynu wynosi $37\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ($98\text{ °F} \pm 4\text{ °F}$).

4. Wybierz tryb

Naciśnij przycisk Zasilanie/Tryb, aby włączyć urządzenie i wybrać żądany tryb czyszczenia.

5. Rozpocznij czyszczenie

Umieść dyszę przy wejściu do przewodu słuchowego i naciśnij przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć irygację. Naciśnij przycisk ponownie w dowolnym momencie, aby wstrzymać działanie.

6. Osusz przewód słuchowy

Po czyszczeniu delikatnie osusz zewnętrzną część ucha i usuń pozostałą wilgoć za pomocą patyczka bawełnianego lub odpowiedniego urządzenia do osuszania uszu.

ZASILANIE, PAUZA I ŁADOWANIE

- **Włączanie:** Naciśnij raz przycisk Zasilanie/Tryb, aby włączyć urządzenie. Urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
- **Pauza:** Podczas pracy naciśnij przycisk Start/Pauza, aby wstrzymać irygację. Naciśnij go ponownie, aby kontynuować.
- **Wyłączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie/Tryb przez około 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
- **Niski poziom baterii:** Migające wskaźniki baterii oznaczają niski poziom baterii i konieczność jej naładowania.
- **Ładowanie:** Podczas ładowania kontrolka miga na biało.
- **Ładowanie zakończone:** Po zakończeniu ładowania kontrolka świeci ciągłym białym światłem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.

1. Nie używaj tego produktu, jeśli masz infekcję ucha, perforowaną błonę bębenkową, rurki uszne lub jakiegokolwiek uraz ucha.
2. Jeśli podczas używania odczuwasz ból, zawroty głowy, dyskomfort lub podrażnienie, natychmiast przestań używać urządzenia.
3. Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 8 roku życia.
4. Dzieci powyżej 8 roku życia powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
5. Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem dzieci.

6. Urządzenie zawiera wbudowaną baterię wielokrotnego ładowania. Trzymaj je z dala od ognia, nadmiernego ciepła i wilgoci.
7. Nie używaj wody ani roztworów czyszczących o temperaturze niższej niż temperatura ciała, ponieważ może to powodować zawroty głowy lub dyskomfort.
8. Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.
9. Nie używaj urządzenia podczas ładowania.
10. Odłącz kabel ładowania, gdy urządzenie nie jest używane.
11. Zutylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

KONSERWACJA I PIELĘGNACJA

1. Po każdym użyciu opróżnij pozostały płyn ze zbiornika na wodę i wytrzyj urządzenie do sucha. Przechowuj je w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
2. Przetrzyj jednostkę główną miękką, wilgotną ściereczką. Nie płucz ani nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
3. Dysze można dezynfekować alkoholem 75 %. Nie sterylizuj ich metodami wysokiej temperatury lub wysokiego ciśnienia.
4. Aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego, zaleca się, aby każdy użytkownik miał własną dyszę.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak wypływu wody lub słabe ciśnienie wody	Niski poziom baterii	Naładuj urządzenie
Brak wypływu wody lub słabe ciśnienie wody	Zablokowany filtr lub dysza	Wyczyść lub wymień filtr/dyszę
Pęknięta dysza	Nadmierne zużycie lub uszkodzenie	Wymień dyszę
Urządzenie nie uruchamia się	Niski poziom baterii lub usterka wewnętrzna	Całkowicie naładuj urządzenie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z obsługą klienta lub sprzedawcą
Inne problemy	Nieznana przyczyna	Skontaktuj się z obsługą klienta lub lokalnym sprzedawcą

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.