

RO: EARPUC – MANUAL DE UTILIZARE

Curățător automat pentru urechi

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Model: BE011

Dimensiuni produs: 265 × 90 × 90 mm

Greutate netă: 330 g

Nivel de zgomot: < 65 dB


Tensiune nominală: 3,7 V

Capacitatea rezervorului de apă: 200 ml

Tensiune de intrare: 5 V = 1 A

Capacitatea bateriei: 1000 mAh

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

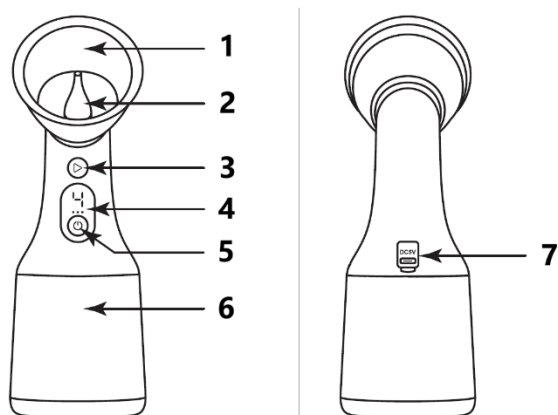

1. Cupă pentru ureche
 2. Duză
 3. Buton Start/Pauză
 4. Ecran
 5. Buton Pornire/Mod
 6. Rezervor de apă
 7. Port de încărcare
-


CONȚINUTUL PACHETULUI



- 1 × Unitate principal
- 4 × Duze
- 1 × Cablu de încărcare
- 1 × Manual de utilizare

DESCRIEREA FUNCȚIILOR

Indicatori de pe ecran

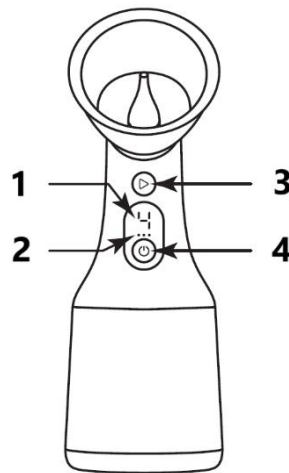

1. Indicator mod
2. Indicator baterie
3. Indicator Start/Pauză
4. Indicator Pornire/Mod

Moduri de funcționare

- **Nivelul 1 – Mod delicat:** Recomandat pentru utilizatorii începători și pentru urechi sensibile.
- **Nivelul 2 – Mod puternic:** Oferă presiune mai mare a apei pentru o curățare mai intensă.
- **Nivelul 3 – Mod pulsatoriu:** Oferă un flux intermitent de apă pentru curățare pulsatorie.
- **Nivelul 4 – Mod personalizat:** Permite salvarea intensității preferate de curățare.

Configurarea modului personalizat


Apăsați și mențineți apăsat butonul Start/Pauză în timp ce sunteți în Mod personalizat. Indicatorul nivelului va începe să clipească, iar presiunea apei va crește treptat de la scăzută la ridicată. Eliberați butonul când se atinge presiunea dorită. Dispozitivul va salva automat această setare și o va reapele de fiecare dată când este selectat Mod personalizat.

Indicator baterie

- Trei bare aprinse continuu indică o baterie complet încărcată.
- Barele bateriei care clipească indică un nivel scăzut al bateriei și faptul că dispozitivul trebuie încărcat.
- Toate cele trei bare rămân aprinse când încărcarea este completă.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- La prima utilizare, selectați Mod delicat.
- Se recomandă înmuierea cerumenului cu o soluție pentru înmuierea cerumenului aprobată de medic înainte de utilizare.
- Dispozitivul se va opri automat după 10 minute de inactivitate.

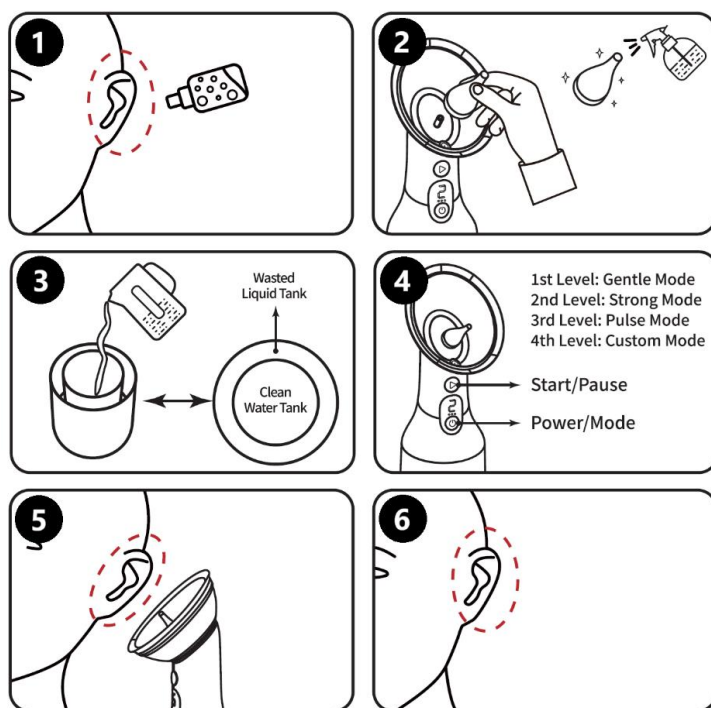

Procedura de curățare

1. Înmuiați cerumenul

Aplicați o soluție adecvată pentru înmuierea cerumenului în canalul auditiv, conform instrucțiunilor producătorului sau recomandărilor personalului medical.

Notă: Dacă cerumenul este uscat sau întărit, desprindeți-l ușor cu un instrument adecvat pentru curățarea urechilor înainte de irigare.

2. Montați duza

Atașați o duză curată la dispozitiv.

Notă: Se recomandă dezinfectarea duzei cu alcool 75 % înainte de utilizare. Dacă mai mulți utilizatori folosesc același dispozitiv, fiecare utilizator trebuie să folosească o duză separată pentru a preveni contaminarea încrucișată.

3. Umpleți rezervorul de apă

Umpleți rezervorul cu apă caldă sau cu o altă soluție recomandată de personalul medical.

Notă: Temperatura recomandată a lichidului este 37 °C ± 2 °C (98 °F ± 4 °F).

4. Selectați un mod

Apăsați butonul Pornire/Mod pentru a porni dispozitivul și selectați modul de curățare dorit.

5. Începeți curățarea

Poziționați duza la intrarea canalului auditiv și apăsați butonul Start/Pauză pentru a începe irigarea. Apăsați din nou butonul în orice moment pentru a întrerupe funcționarea.

6. Uscați canalul auditiv

După curățare, uscați ușor urechea externă și îndepărtați umezeala rămasă folosind un bețișor de bumbac sau un dispozitiv adecvat pentru uscarea urechilor.

PORNIRE, PAUZĂ ȘI ÎNCĂRCARE

- **Pornire:** Apăsați o dată butonul Pornire/Mod pentru a porni dispozitivul. Dispozitivul va intra în modul de așteptare.
- **Pauză:** În timpul funcționării, apăsați butonul Start/Pauză pentru a întrerupe irigarea. Apăsați-l din nou pentru a relua.
- **Oprire:** Apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Mod timp de aproximativ 2 secunde pentru a opri dispozitivul.
- **Baterie descărcată:** Indicatorii bateriei care clipească indică faptul că nivelul bateriei este scăzut și trebuie reîncărcată.
- **Încărcare:** În timpul încărcării, indicatorul luminos clipește alb.
- **Încărcare completă:** Când încărcarea este completă, indicatorul luminos rămâne alb constant.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămare sau deteriorarea produsului.

1. Nu utilizați acest produs dacă aveți o infecție a urechii, timpan perforat, tuburi auriculare sau orice leziune a urechii.
2. Dacă în timpul utilizării simțiți durere, amețelă, disconfort sau iritație, opriți imediat utilizarea dispozitivului.
3. Acest produs nu este potrivit pentru copii sub 8 ani.
4. Copiii peste 8 ani trebuie să utilizeze acest produs numai sub supravegherea unui adult.
5. Acest produs nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6. Dispozitivul conține o baterie reîncărcabilă încorporată. Țineți-l departe de foc, căldură excesivă și umiditate.
7. Nu utilizați apă sau soluții de curățare sub temperatura corpului, deoarece acest lucru poate provoca amețelă sau disconfort.
8. Nu dezamblați, modificați și nu încercați să reparați singur produsul.

9. Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării.
10. Deconectați cablul de încărcare când dispozitivul nu este utilizat.
11. Eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile electronice.

ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

1. După fiecare utilizare, goliți orice lichid rămas din rezervorul de apă și ștergeți dispozitivul până la uscare. Depozitați-l într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat.
2. Ștergeți unitatea principală cu o lavetă moale și umedă. Nu clătiți și nu scufundați dispozitivul în apă.
3. Duzele pot fi dezinfectate cu alcool 75 %. Nu le sterilizați folosind metode cu temperatură ridicată sau presiune înaltă.
4. Pentru a evita contaminarea încrucișată, se recomandă ca fiecare utilizator să aibă propria duză.

DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Nu iese apă sau presiunea apei este slabă	Baterie descărcată	Reîncărcați dispozitivul
Nu iese apă sau presiunea apei este slabă	Filtru sau duză blocată	Curățați sau înlocuiți filtrul/duza
Duză crăpată	Uzură excesivă sau deteriorare	Înlocuiți duza
Dispozitivul nu pornește	Baterie descărcată sau defecțiune internă	Încărcați complet dispozitivul. Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență pentru clienți sau distribuitorul
Alte probleme	Cauză necunoscută	Contactați serviciul de asistență pentru clienți sau distribuitorul local

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.