

SR: EARPUC – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Automatski čistač ušiju

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model: BE011

Dimenzije proizvoda: 265 × 90 × 90 mm

Neto težina: 330 g

Nivo buke: < 65 dB


Nazivni napon: 3,7 V

Kapacitet rezervoara za vodu: 200 ml

Ulazni napon: 5 V = 1 A

Kapacitet baterije: 1000 mAh

PREGLED PROIZVODA

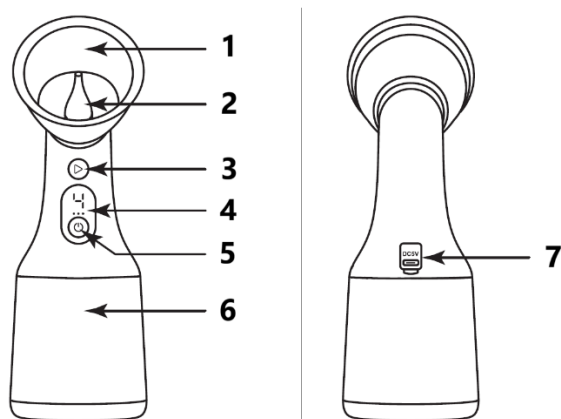

1. Čašica za uho
2. Mlaznica
3. Dugme Start/Pauza
4. Ekran
5. Dugme Uključivanje/Režim rada
6. Rezervoar za vodu
7. Priključak za punjenje


SADRŽAJ PAKOVANJA



- 1 × Glavna jedinica
 - 4 × Mlaznice
 - 1 × Kabl za punjenje
 - 1 × Korisnički priručnik
-

OPIS FUNKCIJA

Indikatori ekrana

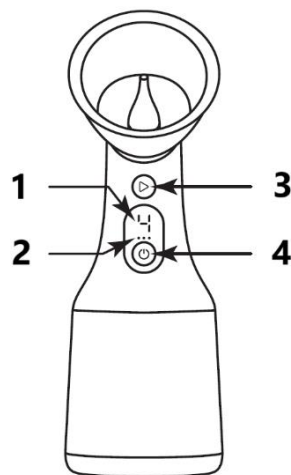

1. Indikator režima rada
2. Indikator baterije
3. Indikator Start/Pauza
4. Indikator Uključivanje/Režim rada

Režimi rada

- **Nivo 1 – Blagi režim:** Preporučuje se za korisnike koji prvi put koriste uređaj i za osjetljive uši.
- **Nivo 2 – Snažni režim:** Obezbeđuje veći pritisak vode za intenzivnije čišćenje.
- **Nivo 3 – Pulsirajući režim:** Omogućava isprekidan protok vode za pulsirajuće čišćenje.
- **Nivo 4 – Prilagođeni režim:** Omogućava čuvanje željenog intenziteta čišćenja.

Podešavanje prilagođenog režima


Pritisnite i držite dugme Start/Pauza dok ste u Prilagođenom režimu. Indikator nivoa će početi da treperi, a pritisak vode će se postepeno povećavati od niskog ka visokom. Otpustite dugme kada dostignete željeni pritisak. Uređaj će automatski sačuvati ovu postavku i koristiti je svaki put kada izaberete Prilagođeni režim.

Indikator baterije

- Tri stalno osvetljene crtice označavaju potpuno napunjenu bateriju.
- Trepereće crtice baterije označavaju nizak nivo baterije i potrebu za punjenjem uređaja.
- Sve tri crtice ostaju osvetljene kada je punjenje završeno.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Pri prvoj upotrebi izaberite Blagi režim.
- Pre upotrebe preporučuje se omekšavanje ušnog voska rastvorom za omekšavanje ušnog voska koji je odobrio lekar.
- Uređaj će se automatski isključiti nakon 10 minuta neaktivnosti.

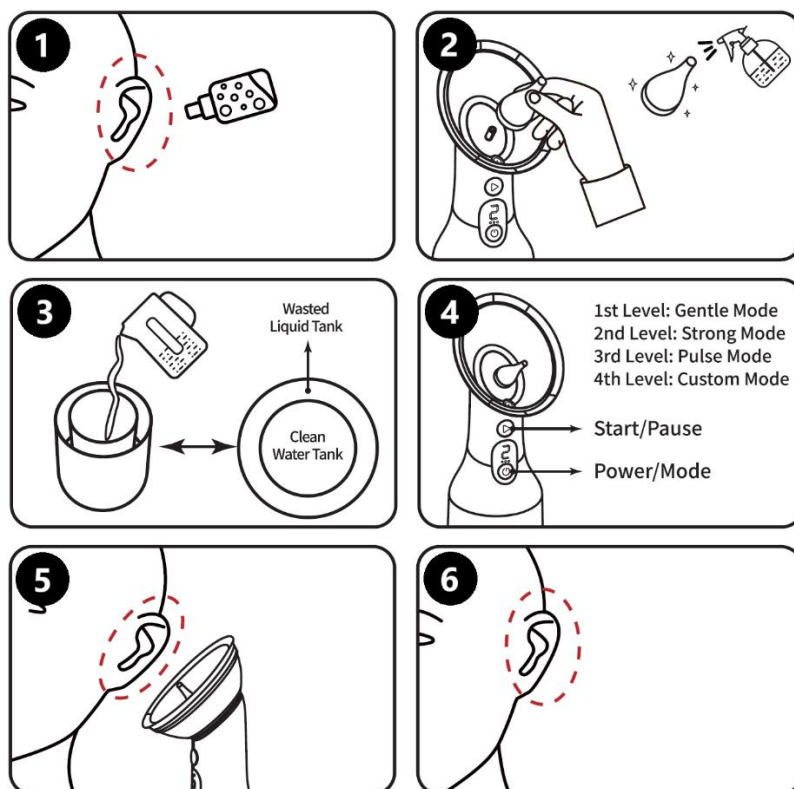

Postupak čišćenja

1. Omekšajte ušni vosak

Nanesite odgovarajući rastvor za omekšavanje ušnog voska u ušni kanal prema uputstvima proizvođača ili preporukama zdravstvenog stručnjaka.

Napomena: Ako je ušni vosak suv ili stvrdnut, nežno ga olabavite odgovarajućim alatom za čišćenje ušiju pre ispiranja.

2. Postavite mlaznicu

Pričvrstite čistu mlaznicu na uređaj.

Napomena: Preporučuje se dezinfekcija mlaznice 75 % alkoholom pre upotrebe. Ako uređaj koristi više osoba, svaki korisnik treba da koristi svoju mlaznicu kako bi se sprečila unakrsna kontaminacija.

3. Napunite rezervoar za vodu

Napunite rezervoar toplom vodom ili drugim rastvorom koji preporuča zdravstveni stručnjak.

Napomena: Preporučena temperatura tečnosti je $37\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ($98\text{ °F} \pm 4\text{ °F}$).

4. Izaberite režim rada

Pritisnite dugme Uključivanje/Režim rada da uključite uređaj i izaberete željeni režim čišćenja.

5. Započnite čišćenje

Postavite mlaznicu na ulaz u ušni kanal i pritisnite dugme Start/Pauza da započnete ispiranje. Ponovo pritisnite dugme u bilo kom trenutku da pauzirate rad.

6. Osušite ušni kanal

Nakon čišćenja nežno osušite spoljašnji deo uha i uklonite preostalu vlagu pomoću pamučnog štapića ili odgovarajućeg uređaja za sušenje ušiju.

UKLJUČIVANJE, PAUZIRANJE I PUNJENJE

- **Uključivanje:** Jednom pritisnite dugme Uključivanje/Režim rada da uključite uređaj. Uređaj će preći u stanje pripravnosti.
- **Pauza:** Tokom rada pritisnite dugme Start/Pauza da zaustavite ispiranje. Ponovo ga pritisnite za nastavak rada.
- **Isključivanje:** Pritisnite i držite dugme Uključivanje/Režim rada približno 2 sekunde da isključite uređaj.
- **Nizak nivo baterije:** Trepereći indikatori baterije označavaju da je baterija pri kraju i da je treba napuniti.
- **Punjenje:** Tokom punjenja indikatorsko svetlo treperi belo.
- **Punjenje završeno:** Kada je punjenje završeno, indikatorsko svetlo svetli neprekidno belo.

BEZBEDNOSNE MERE

Molimo vas da pažljivo pročitate sva uputstva pre upotrebe. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do povrede ili oštećenja proizvoda.

1. Nemojte koristiti ovaj proizvod ako imate infekciju uha, perforiranu bubnu opnu, cevčice u uhu ili bilo kakvu povredu uha.
2. Ako tokom upotrebe osetite bol, vrtoglavicu, nelagodnost ili iritaciju, odmah prestanite da koristite uređaj.
3. Ovaj proizvod nije pogodan za decu mlađu od 8 godina.
4. Deca starija od 8 godina smeju da koriste ovaj proizvod samo pod nadzorom odrasle osobe.
5. Ovaj proizvod nije igračka. Držite ga van domašaja dece.
6. Uređaj sadrži ugrađenu punjivu bateriju. Držite ga dalje od vatre, prekomerne toplote i vlage.
7. Nemojte koristiti vodu ili rastvore za čišćenje koji su hladniji od telesne temperature, jer mogu izazvati vrtoglavicu ili nelagodnost.
8. Nemojte rastavljati, menjati niti pokušavati sami da popravljate proizvod.

9. Nemojte koristiti uređaj dok se puni.
10. Isključite kabl za punjenje kada uređaj nije u upotrebi.
11. Odložite proizvod u skladu sa lokalnim propisima za elektronski otpad.

ODRŽAVANJE I NEGA

1. Nakon svake upotrebe ispraznite preostalu tečnost iz rezervoara za vodu i obrišite uređaj do suva. Čuvajte ga na hladnom, suvom i dobro provetrenom mestu.
2. Glavnu jedinicu obrišite mekom, vlažnom krpom. Nemojte ispirati niti potapati uređaj u vodu.
3. Mlaznice se mogu dezinfikovati 75 % alkoholom. Nemojte ih sterilisati metodama visoke temperature ili visokog pritiska.
4. Da bi se izbegla unakrsna kontaminacija, preporučuje se da svaki korisnik ima svoju mlaznicu.

REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Nema protoka vode ili je pritisak vode slab	Nizak nivo baterije	Napunite uređaj
Nema protoka vode ili je pritisak vode slab	Začepljen filter ili mlaznica	Očistite ili zamenite filter/mlaznicu
Napukla mlaznica	Prekomerno trošenje ili oštećenje	Zamenite mlaznicu
Uređaj se ne pokreće	Nizak nivo baterije ili unutrašnji kvar	Potpuno napunite uređaj. Ako problem i dalje postoji, obratite se korisničkoj podršci ili prodavcu
Ostali problemi	Nepoznat uzrok	Obratite se korisničkoj podršci ili lokalnom prodavcu

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: EARPUS – КОРИСНИЧКИ ПРИРУЧНИК

Аутоматски чистач ушију

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Модел: BE011

Димензије производа: 265 × 90 × 90 mm

Нето тежина: 330 g

Ниво буке: < 65 dB


Називни напон: 3,7 V

Капацитет резервоара за воду: 200 ml

Улазни напон: 5 V = 1 A


Капацитет батерије: 1000 mAh

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

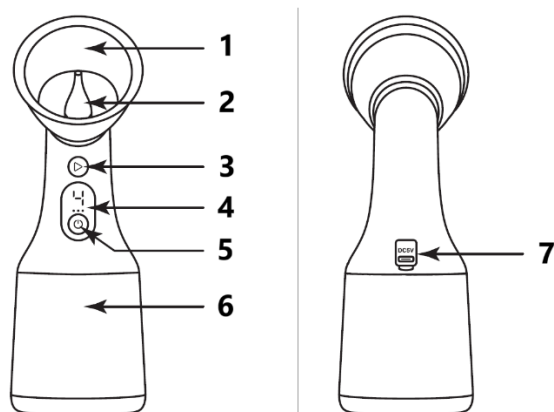

1. Чашица за ухо
2. Млазница
3. Дугме Старт/Пауза
4. Екран
5. Дугме Укључивање/Режим рада
6. Резервоар за воду
7. Прикључак за пуњење


САДРЖАЈ ПАКОВАЊА

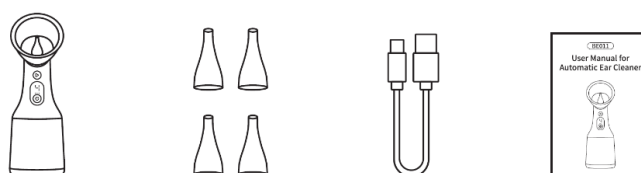

- 1 × Главна јединица
- 4 × Млазнице
- 1 × Кабл за пуњење
- 1 × Кориснички приручник

ОПИС ФУНКЦИЈА

Индикатори екрана

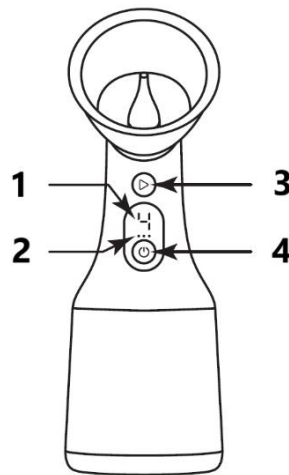

1. Индикатор режима рада
2. Индикатор батерије
3. Индикатор Старт/Пауза
4. Индикатор Укључивање/Режим рада

Режими рада

- **Ниво 1 – Благ режим:** Препоручује се за кориснике који први пут користе уређај и за осетљиве уши.
- **Ниво 2 – Снажни режим:** Обезбеђује већи притисак воде за интензивније чишћење.
- **Ниво 3 – Пулсирајући режим:** Омогућава испрекидан проток воде за пулсирајуће чишћење.
- **Ниво 4 – Прилагођени режим:** Омогућава чување жељеног интензитета чишћења.

Подешавање прилагођеног режима

Притисните и држите дугме Старт/Пауза док сте у Прилагођеном режиму. Индикатор нивоа ће почети да трепери, а притисак воде ће се постепено повећавати од ниског ка високом. Отпустите дугме када достигнете жељени притисак. Уређај ће аутоматски сачувати ову поставку и користити је сваки пут када изаберете Прилагођени режим.


Индикатор батерије

- Три стално осветљене цртице означавају потпуно напуњену батерију.

- Трепереће цртице батерије означавају низак ниво батерије и потребу за пуњењем уређаја.
- Све три цртице остају осветљене када је пуњење завршено.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

- При првој употреби изаберите Благи режим.
- Пре употребе препоручује се омекшавање ушног воска раствором за омекшавање ушног воска који је одобрио лекар.
- Уређај ће се аутоматски искључити након 10 минута неактивности.

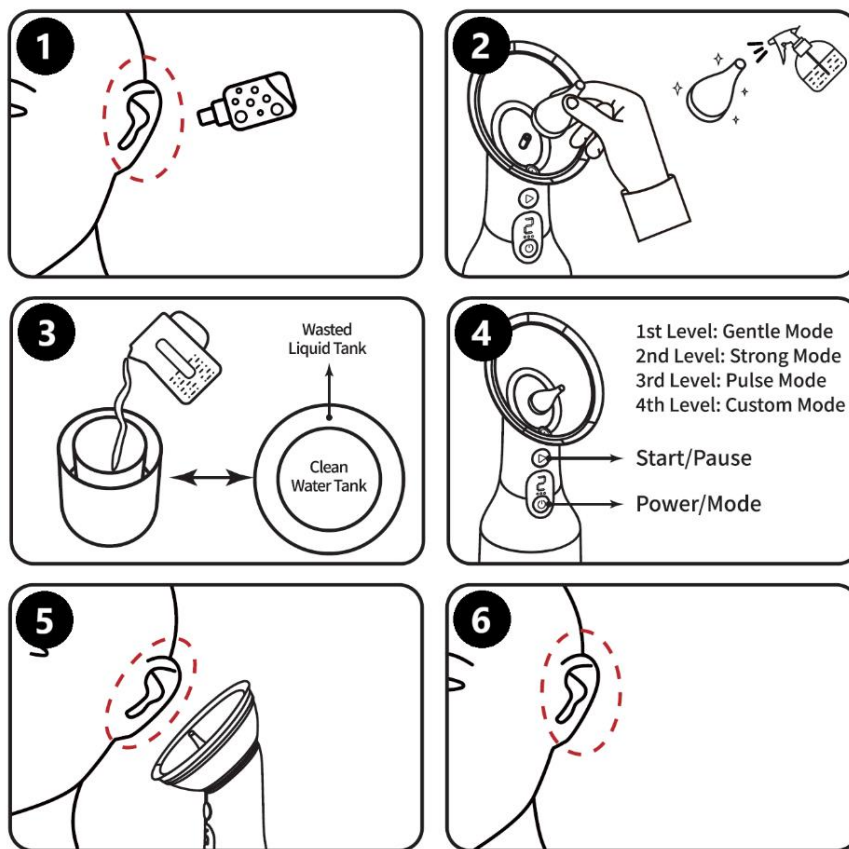

Поступак чишћења

1. Омекшајте ушни восак

Нанесите одговарајући раствор за омекшавање ушног воска у ушни канал према упутствима произвођача или препорукама здравственог стручњака.

Напомена: Ако је ушни восак сув или стврднут, нежно га олабавите одговарајућим алатом за чишћење ушију пре испирања.

2. Поставите млазницу

Причврстите чисту млазницу на уређај.

Напомена: Препоручује се дезинфекција млазнице 75 % алкохолом пре употребе. Ако уређај користи више особа, сваки корисник треба да користи своју млазницу како би се спречила унакрсна контаминација.

3. Напуните резервоар за воду

Напуните резервоар топлом водом или другим раствором који препоручи здравствени стручњак.

Напомена: Препоручена температура течности је $37\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($98\text{ }^{\circ}\text{F} \pm 4\text{ }^{\circ}\text{F}$).

4. Изаберите режим рада

Притисните дугме Укључивање/Режим рада да укључите уређај и изаберете жељени режим чишћења.

5. Започните чишћење

Поставите млазницу на улаз у ушни канал и притисните дугме Старт/Пауза да започнете испирање. Поново притисните дугме у било ком тренутку да паузирате рад.

6. Осушите ушни канал

Након чишћења нежно осушите спољашњи део уха и уклоните преосталу влагу помоћу памучног штапића или одговарајућег уређаја за сушење ушију.

УКЉУЧИВАЊЕ, ПАУЗИРАЊЕ И ПУЊЕЊЕ

- **Укључивање:** Једном притисните дугме Укључивање/Режим рада да укључите уређај. Уређај ће прећи у стање приправности.
- **Пауза:** Током рада притисните дугме Старт/Пауза да зауставите испирање. Поново га притисните за наставак рада.
- **Искључивање:** Притисните и држите дугме Укључивање/Режим рада приближно 2 секунде да искључите уређај.
- **Низак ниво батерије:** Треперећи индикатори батерије означавају да је батерија при крају и да је треба напунити.
- **Пуњење:** Током пуњења индикаторско светло трепери бело.
- **Пуњење завршено:** Када је пуњење завршено, индикаторско светло светли непрекидно бело.

БЕЗБЕДНОСНЕ МЕРЕ

Молимо вас да пажљиво прочитате сва упутства пре употребе. Непоштовање ових упутстава може довести до повреде или оштећења производа.

1. Немојте користити овај производ ако имате инфекцију уха, перфорирану бубну опну, цевчице у уху или било какву повреду уха.

2. Ако током употребе осетите бол, вртоглавицу, нелагодност или иритацију, одмах престаните да користите уређај.
3. Овај производ није погодан за децу млађу од 8 година.
4. Деца старија од 8 година смеју да користе овај производ само под надзором одрасле особе.
5. Овај производ није играчка. Држите га ван домашаја деце.
6. Уређај садржи уграђену пуњиву батерију. Држите га даље од ватре, прекомерне топлоте и влаге.
7. Немојте користити воду или растворе за чишћење који су хладнији од телесне температуре, јер могу изазвати вртоглавицу или нелагодност.
8. Немојте растављати, мењати нити покушавати сами да поправљате производ.
9. Немојте користити уређај док се пуни.
10. Искључите кабл за пуњење када уређај није у употреби.
11. Одложите производ у складу са локалним прописима за електронски отпад.

ОДРЖАВАЊЕ И НЕГА

1. Након сваке употребе испразните преосталу течност из резервоара за воду и обришите уређај до сува. Чувајте га на хладном, сувом и добро проветреном месту.
2. Главну јединицу обришите меком, влажном крпом. Немојте испирати нити потапати уређај у воду.
3. Млазнице се могу дезинфиковати 75 % алкохолом. Немојте их стерилисати методама високе температуре или високог притиска.
4. Да би се избегла унакрсна контаминација, препоручује се да сваки корисник има своју млазницу.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Проблем	Могући узрок	Решење
Нема протока воде или је притисак воде слаб	Низак ниво батерије	Напуните уређај
Нема протока воде или је притисак воде слаб	Зачепљен филтер или млазница	Очистите или замените филтер/млазницу
Напукла млазница	Прекомерно трошење или оштећење	Замените млазницу
Уређај се не покреће	Низак ниво батерије или унутрашњи квар	Потпуно напуните уређај. Ако проблем и даље постоји, обратите се корисничкој подршци или продавцу
Остали проблеми	Непознат узрок	Обратите се корисничкој подршци или локалном продавцу

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније