

# SL: EARPUC – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

## Avtomatski čistilec ušes

### SPECIFIKACIJE IZDELKA

**Model:** BE011

**Dimenzije izdelka:** 265 × 90 × 90 mm

**Neto teža:** 330 g

**Raven hrupa:** < 65 dB


**Nazivna napetost:** 3,7 V

**Kapaciteta rezervoarja za vodo:** 200 ml

**Vhodna napetost:** 5 V = 1 A

**Kapaciteta baterije:** 1000 mAh

### PREGLED IZDELKA

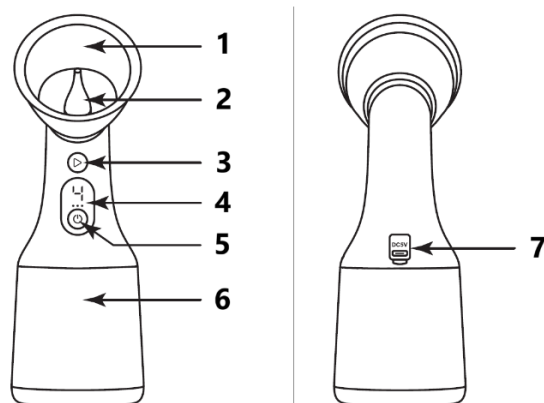

1. Nastavek za uho
2. Šoba
3. Gumb Začetek/Premor
4. Zaslon
5. Gumb Vklop/Način
6. Rezervoar za vodo
7. Polnilni priključek

### VSEBINA PAKETA




- 1 × Glavna enota
- 4 × Šobe
- 1 × Polnilni kabel
- 1 × Uporabniški priročnik

---

## OPIS FUNKCIJ

### Prikazovalni indikatorji

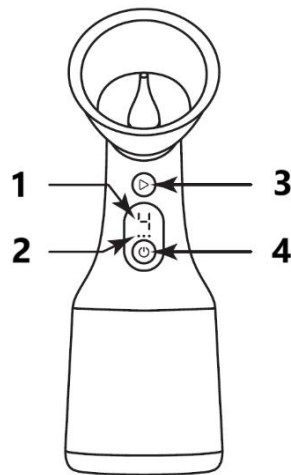

1. Indikator načina delovanja
2. Indikator baterije
3. Indikator Začetek/Premor
4. Indikator Vkllop/Način

### Načini delovanja

- **Stopnja 1 – Nežni način:** Priporočeno za prve uporabnike in občutljiva ušesa.
- **Stopnja 2 – Močni način:** Zagotavlja večji pritisk vode za intenzivnejše čiščenje.
- **Stopnja 3 – Pulzni način:** Omogoča prekinjen pretok vode za pulzirajoče čiščenje.
- **Stopnja 4 – Prilagojeni način:** Omogoča shranjevanje želene intenzivnosti čiščenja.

### Nastavitev prilagojenega načina


Pritisnite in držite gumb Začetek/Premor, medtem ko ste v Prilagojenem načinu. Indikator stopnje bo začel utripati, pritisk vode pa se bo postopoma povečeval od nizkega do visokega. Spustite gumb, ko dosežete želeni pritisk. Naprava bo nastavitev samodejno shranila in jo uporabila vsakič, ko izberete Prilagojeni način.

### Indikator baterije

- Tri neprekinjeno osvetljene črtice pomenijo polno baterijo.
- Utripajoče črtice baterije pomenijo nizko raven baterije in potrebo po polnjenju.
- Vse tri črtice ostanejo osvetljene, ko je polnjenje zaključeno.

## NAVODILA ZA UPORABO

- Ob prvi uporabi izberite Nežni način.
- Pred uporabo je priporočljivo zmeščati ušesno maslo z raztopino, ki jo odobri zdravnik.
- Naprava se bo po 10 minutah nedejavnosti samodejno izklopila.

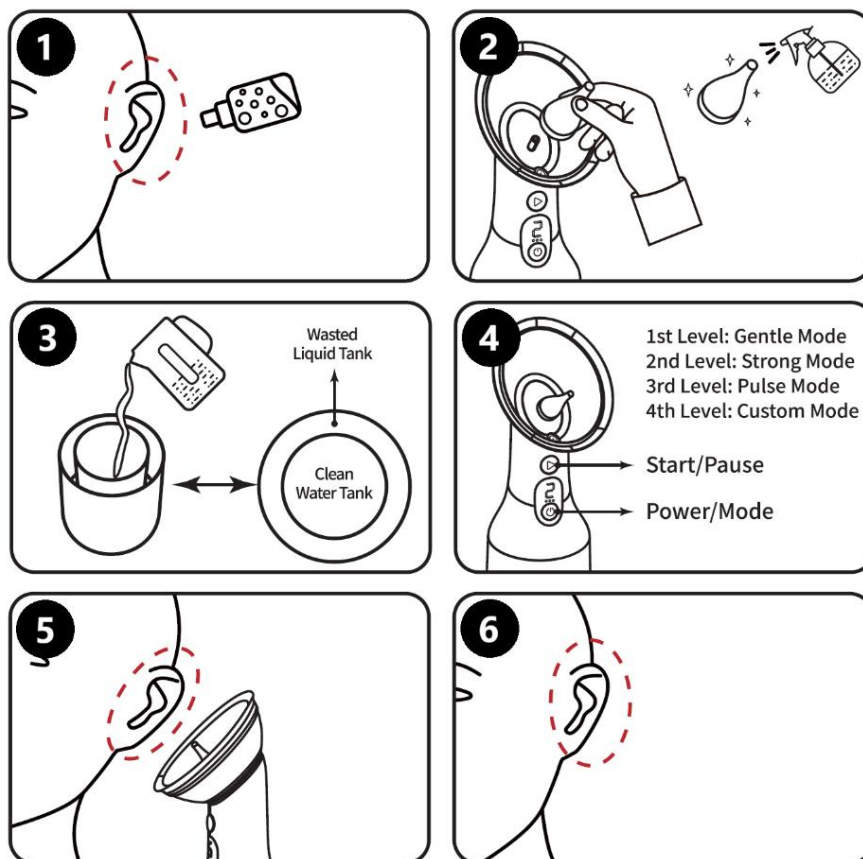

### Postopek čiščenja

#### 1. Zmeščajte ušesno maslo

Nanesite ustrezno raztopino za mehčanje ušesnega masla v sluhovod v skladu z navodili proizvajalca ali priporočili zdravstvenega strokovnjaka.

**Opomba:** Če je ušesno maslo suho ali otrdelo, ga pred izpiranjem nežno zrahljajte z ustreznim pripomočkom za čiščenje ušes.

#### 2. Namestite šobo

Na napravo pritrdite čisto šobo.

**Opomba:** Pred uporabo je priporočljivo šobo razkužiti s 75 % alkoholom. Če napravo uporablja več oseb, naj vsak uporabnik uporablja svojo šobo, da se prepreči navzkrižna kontaminacija.

### 3. Napolnite rezervoar za vodo

Rezervoar napolnite s toplo vodo ali drugo raztopino, ki jo priporoča zdravstveni strokovnjak.

**Opomba:** Priporočena temperatura tekočine je  $37\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$  ( $98\text{ °F} \pm 4\text{ °F}$ ).

### 4. Izberite način delovanja

Pritisnite gumb Vklop/Način za vklop naprave in izberite želeni način čiščenja.

### 5. Začnite s čiščenjem

Šobo namestite na vhod v sluhovod in pritisnite gumb Začetek/Premor za začetek izpiranja. Za prekinitev delovanja kadar koli ponovno pritisnite gumb.

### 6. Posušite sluhovod

Po čiščenju nežno osušite zunanje uho in odstranite preostalo vlago z vatirano palčko ali primerno napravo za sušenje ušes.

---

## VKLOP, PREMOR IN POLNENJE

- **Vklop:** Enkrat pritisnite gumb Vklop/Način za vklop naprave. Naprava preide v stanje pripravljenosti.
- **Premor:** Med delovanjem pritisnite gumb Začetek/Premor za zaustavitev izpiranja. Ponovni pritisk nadaljuje delovanje.
- **Izklop:** Pritisnite in držite gumb Vklop/Način približno 2 sekundi za izklop naprave.
- **Nizka raven baterije:** Utripajoči indikatorji baterije pomenijo, da je baterija skoraj prazna in jo je treba napolniti.
- **Polnjenje:** Med polnjenjem indikatorska lučka utripa belo.
- **Polnjenje zaključeno:** Ko je polnjenje končano, indikatorska lučka sveti neprekinjeno belo.

---

## VARNOSTNI UKREPI

Pred uporabo natančno preberite vsa navodila. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe ali škodo na izdelku.

1. Izdelka ne uporabljajte, če imate vnetje ušesa, predrt bobnič, vstavljene cevke v ušesu ali kakršno koli poškodbo ušesa.
2. Če med uporabo občutite bolečino, omotico, nelagodje ali draženje, takoj prenehajte z uporabo naprave.
3. Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 8 let.
4. Otroci, starejši od 8 let, lahko izdelek uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe.
5. Izdelek ni igrača. Hranite ga izven dosega otrok.
6. Naprava vsebuje vgrajeno polnilno baterijo. Hranite jo stran od ognja, prekomerne toplote in vlage.

7. Ne uporabljajte vode ali čistilnih raztopin s temperaturo pod telesno temperaturo, saj lahko povzročijo omotico ali nelagodje.
8. Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali poskušajte popravljati sami.
9. Naprave ne uporabljajte med polnjenjem.
10. Ko naprave ne uporabljate, izključite polnilni kabel.
11. Izdelek odstranite v skladu z lokalnimi predpisi za elektronske odpadke.

## VZDRŽEVANJE IN NEGA

1. Po vsaki uporabi izpraznite preostalo tekočino iz rezervoarja za vodo in napravo obrišite do suhega. Shranjujte jo na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu.
2. Glavno enoto očistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Naprave ne izpirajte in je ne potaplajte v vodo.
3. Šobe lahko razkužite s 75 % alkoholom. Ne sterilizirajte jih z visokimi temperaturami ali visokim tlakom.
4. Za preprečevanje navzkrižne kontaminacije je priporočljivo, da ima vsak uporabnik svojo šobo.

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

| Težava                                    | Možen vzrok                              | Rešitev                                                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ni pretoka vode ali je pritisk vode šibek | Nizka raven baterije                     | Napolnite napravo                                                                               |
| Ni pretoka vode ali je pritisk vode šibek | Zamašen filter ali šoba                  | Očistite ali zamenjajte filter/šobo                                                             |
| Poškodovana šoba                          | Prekomerna obraba ali poškodba           | Zamenjajte šobo                                                                                 |
| Naprava se ne zažene                      | Nizka raven baterije ali notranja napaka | Napravo popolnoma napolnite. Če težava ostane, se obrnite na podporo uporabnikom ali prodajalca |
| Druge težave                              | Neznan vzrok                             | Obrnite se na podporo uporabnikom ali lokalnega prodajalca                                      |

## NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.