

SK: EARPUC – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Automatický čistič uší

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Model: BE011

Rozmery produktu: 265 × 90 × 90 mm

Čistá hmotnosť: 330 g

Hladina hluku: < 65 dB


Menovité napätie: 3,7 V

Kapacita nádržky na vodu: 200 ml

Vstupné napätie: 5 V = 1 A

Kapacita batérie: 1000 mAh

PREHĽAD PRODUKTU

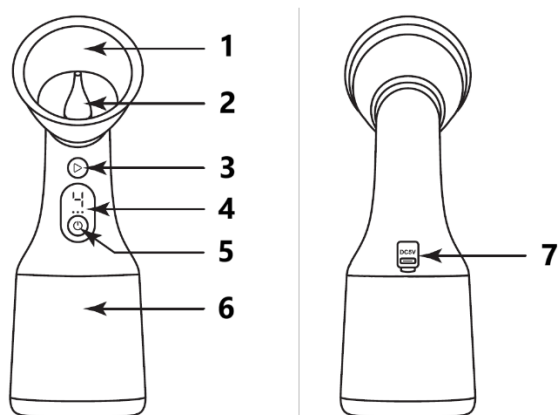

1. Ušný kalíšok
2. Dýza
3. Tlačidlo Štart/Pauza
4. Displej
5. Tlačidlo Zapnutie/Režim
6. Nádržka na vodu
7. Nabíjací port


OBSAH BALENIA



- 1 × Hlavná jednotka
- 4 × Dýzy
- 1 × Nabíjací kábel
- 1 × Používateľská príručka

POPIS FUNKCIÍ

Indikátory displeja

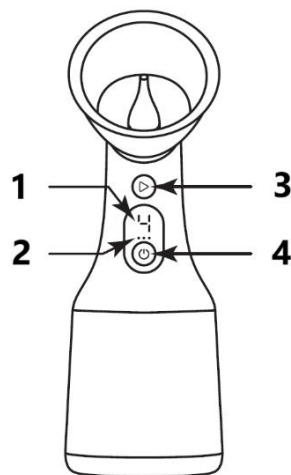

1. Indikátor režimu
2. Indikátor batérie
3. Indikátor Štart/Pauza
4. Indikátor Zapnutie/Režim

Prevádzkové režimy

- **Úroveň 1 – Jemný režim:** Odporúča sa pre prvé použitie a citlivé uši.
- **Úroveň 2 – Silný režim:** Poskytuje vyšší tlak vody na intenzívnejšie čistenie.
- **Úroveň 3 – Pulzný režim:** Poskytuje prerušovaný prúd vody na pulzujúce čistenie.
- **Úroveň 4 – Vlastný režim:** Umožňuje uložiť preferovanú intenzitu čistenia.

Nastavenie vlastného režimu


Stlačte a podržte tlačidlo Štart/Pauza vo Vlastnom režime. Indikátor úrovne začne blikať a tlak vody sa bude postupne zvyšovať od nízkeho po vysoký. Keď dosiahnete požadovaný tlak, tlačidlo uvoľnite. Zariadenie toto nastavenie automaticky uloží a vyvolá ho vždy, keď zvolíte Vlastný režim.

Indikátor batérie

- Tri nepretržite svietiace čiarky označujú plne nabitú batériu.
 - Blikajúce čiarky batérie označujú nízku úroveň nabitia a zariadenie je potrebné nabiť.
 - Všetky tri čiarky zostanú svietiť, keď je nabíjanie dokončené.
-

NÁVOD NA POUŽITIE

- Pri prvom použití zvolte Jemný režim.
- Pred použitím sa odporúča zmäknúť ušný maz roztokom na zmäkčenie ušného mazu schváleným lekárom.
- Zariadenie sa automaticky vypne po 10 minútach nečinnosti.

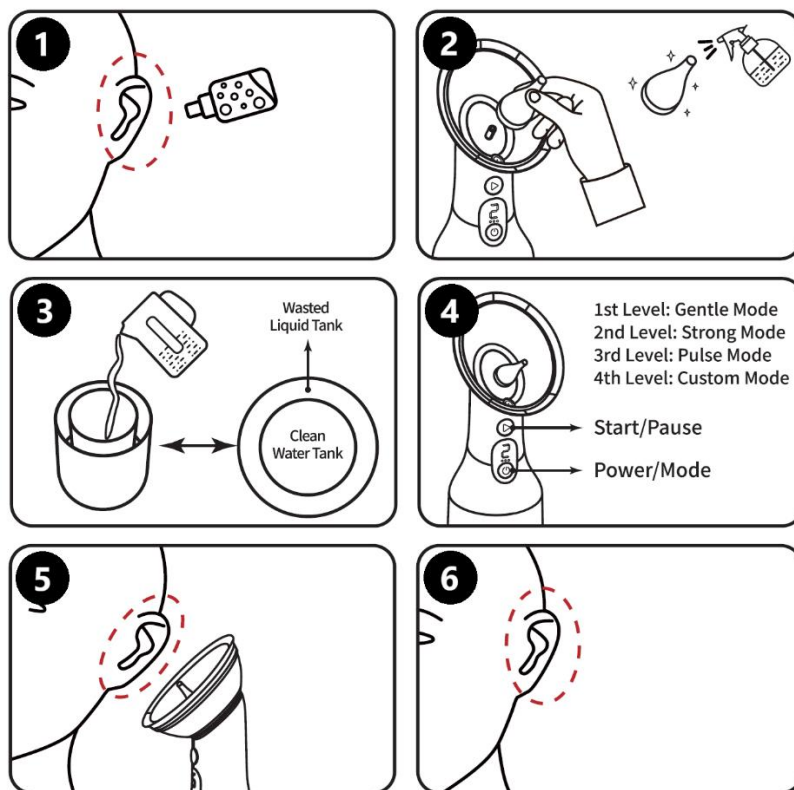

Postup čistenia

1. Zmäkčíte ušný maz

Aplikujte vhodný roztok na zmäkčenie ušného mazu do zvukovodu podľa pokynov výrobcu alebo odporúčaní zdravotníckeho pracovníka.

Poznámka: Ak je ušný maz suchý alebo stvrdnutý, pred výplachom ho jemne uvoľnite vhodným nástrojom na čistenie uší.

2. Nasadíte dýzu

Pripevnite k zariadeniu čistú dýzu.

Poznámka: Pred použitím sa odporúča dezinfikovať dýzu 75 % alkoholom. Ak zariadenie používa viac osôb, každý používateľ by mal používať samostatnú dýzu, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii.

3. Naplňte nádržku na vodu

Naplňte nádržku teplou vodou alebo iným roztokom odporúčaným zdravotníckym pracovníkom.

Poznámka: Odporúčaná teplota kvapaliny je 37 °C ± 2 °C (98 °F ± 4 °F).

4. Vyberte režim

Stlačte tlačidlo Zapnutie/Režim na zapnutie zariadenia a vyberte požadovaný režim čistenia.

5. Začnite čistenie

Umiestnite dýzu ku vstupu do zvukovodu a stlačte tlačidlo Štart/Pauza na začatie výplachu. Opätovným stlačením tlačidla môžete činnosť kedykoľvek pozastaviť.

6. Osušte zvukovod

Po čistení jemne osušte vonkajšie ucho a odstráňte zvyšnú vlhkosť pomocou vatovej tyčinky alebo vhodného zariadenia na sušenie uší.

ZAPNUTIE, PAUZA A NABÍJANIE

- **Zapnutie:** Jedným stlačením tlačidla Zapnutie/Režim zapnete zariadenie. Zariadenie prejde do pohotovostného režimu.
- **Pauza:** Počas prevádzky stlačte tlačidlo Štart/Pauza na pozastavenie výplachu. Opätovným stlačením pokračujte.
- **Vypnutie:** Stlačte a podržte tlačidlo Zapnutie/Režim približne 2 sekundy na vypnutie zariadenia.
- **Nízky stav batérie:** Blikajúce indikátory batérie znamenajú, že úroveň nabitia je nízka a batériu je potrebné nabiť.
- **Nabíjanie:** Počas nabíjania kontrolka bliká nabieleo.
- **Nabíjanie dokončené:** Po dokončení nabíjania kontrolka svieti nepretržite nabieleo.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poraneniu alebo poškodeniu produktu.

1. Nepoužívajte tento produkt, ak máte infekciu ucha, perforovaný bubienok, ušné ventilačné trubičky alebo akékoľvek poranenie ucha.
2. Ak počas používania pocítite bolesť, závraty, nepohodlie alebo podráždenie, okamžite prestaňte zariadenie používať.
3. Tento produkt nie je vhodný pre deti mladšie ako 8 rokov.
4. Deti staršie ako 8 rokov môžu tento produkt používať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
5. Tento produkt nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
6. Zariadenie obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu. Uchovávajte ho mimo dosahu ohňa, nadmerného tepla a vlhkosti.
7. Nepoužívajte vodu ani čistiace roztoky s teplotou nižšou ako telesná teplota, pretože to môže spôsobiť závraty alebo nepohodlie.
8. Produkt nerozoberajte, neupravujte ani sa ho nepokúšajte sami opravovať.
9. Nepoužívajte zariadenie počas nabíjania.

10. Keď zariadenie nepoužívate, odpojte nabíjací kábel.
11. Produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre elektronický odpad.

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

1. Po každom použití vyprázdnite zvyšnú kvapalinu z nádržky na vodu a zariadenie utrite dosucha. Uchovávajte ho na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.
2. Hlavnú jednotku utrite mäkkou vlhkou handričkou. Zariadenie neoplachujte ani ho neponárajte do vody.
3. Dýzy možno dezinfikovať 75 % alkoholom. Nesterilizujte ich metódami vysokej teploty alebo vysokého tlaku.
4. Aby sa zabránilo krížovej kontaminácii, odporúča sa, aby mal každý používateľ vlastnú dýzu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Nevychádza voda alebo je tlak vody slabý	Nízky stav batérie	Nabite zariadenie
Nevychádza voda alebo je tlak vody slabý	Upchatý filter alebo dýza	Vyčistite alebo vymeňte filter/dýzu
Prasknutá dýza	Nadmerné opotrebovanie alebo poškodenie	Vymeňte dýzu
Zariadenie sa nespustí	Nízky stav batérie alebo vnútorná porucha	Zariadenie úplne nabite. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákazníčku podporu alebo predajcu
Iné problémy	Neznáma príčina	Kontaktujte zákazníčku podporu alebo miestneho predajcu

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.