

AL: MANUALI I PËRDORIMIT

PARAMETRAT E PRODUKTIT

Funksioni i produktit: Pastrues veshi vizual pa tel

Standardi i rrjetit: IEEE 802.11b/g/n

Antena: Antenë e integruar

Frekuenca e punës: 2.4 GHz

Fuqia maksimale e daljes RF: ≤ 20 dBm

Shpejtësia e transmetimit: 30 fps

Sensori i imazhit: CMOS

Temperatura e punës: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

Kapaciteti i baterisë: 130 mAh

Koha e punës: 35 minuta

Koha e karikimit: ~ 60 min

Rryma hyrëse: DC 5 V / 150 mA

Diametri i brendshëm i lentes: 3.6 mm

Gjatësia fokale: 15 mm $\sim$ 20 mm

Cilësia e figurës: HD

Sensori i gravitetit: 3-aksial

Përmbajtja e produktit: Kuti shitjeje, njësia kryesore, manuali i produktit, majat për vesh (5×), kutia majave për vesh, kabllo karikimi USB Type-C



MËNYRA E SHKARKIMIT TË APLIKACIONIT

Kërkoni **HND** në App Store ose Google Play për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin. Mund të përdorni gjithashtu shfletuesin e telefonit tuaj për të skanuar kodin QR për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin.


- **iOS:** Pas skanimit të kodit QR, hapni iOS App Store për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin. Mund të kërkoni gjithashtu drejtpërdrejt **HND** në App Store.
- **Android:** Pas skanimit të kodit QR, hapni Google Play për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin.



Vëmendje: Nëse gjatë instalimit shfaqet një paralajmërim sigurie, zgjidhni **Continue Installation** për të vazhduar.

LIDHJA ME SISTEMIN iOS


1. Shtypni dhe mbani butonin e ndezjes për 2 sekonda derisa drita blu treguese të fillojë të pulsojë. Kjo tregon se pajisja është gati për t'u lidhur me aplikacionin.
2. Prekni ikonën e aplikacionit për ta hapur.
3. Zgjidhni opsionin **WLAN** dhe aktivizojeni.
4. Lidhuni me rrjetin Wi-Fi: **HNDEC_55-XXXXXX**.
5. Kthehuni në aplikacion për të filluar përdorimin e pajisjes. Drita blu do të kalojë nga pulsuese në të qëndrueshme, duke treguar një lidhje të suksesshme.

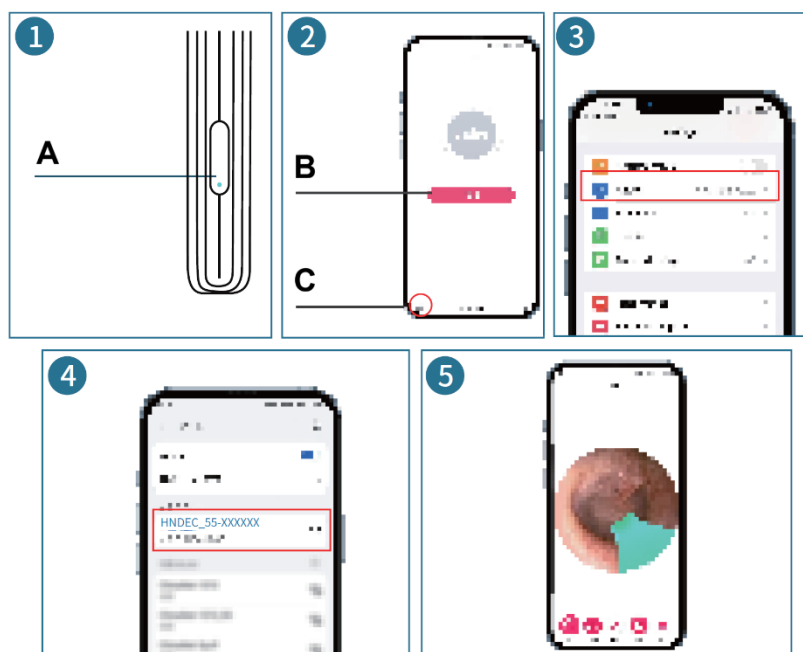

- A. Butoni i ndezjes / drita treguese
- B. Klikoni për të vazhduar
- C. Klikoni këtu për të ndryshuar gjuhën

LIDHJA ME SISTEMIN ANDROID

1. Shtypni dhe mbani butonin e ndezjes për 2 sekonda derisa drita blu treguese të fillojë të pulsojë. Kjo tregon se pajisja është gati për t'u lidhur me aplikacionin.
2. Prekni ikonën e aplikacionit për ta hapur.
3. Lidhuni me rrjetin Wi-Fi: **HNDEC_55-XXXXXX**.
4. Kthehuni në aplikacion për të filluar përdorimin e pajisjes. Drita blu do të kalojë nga pulsuese në të qëndrueshme, duke treguar një lidhje të suksesshme.

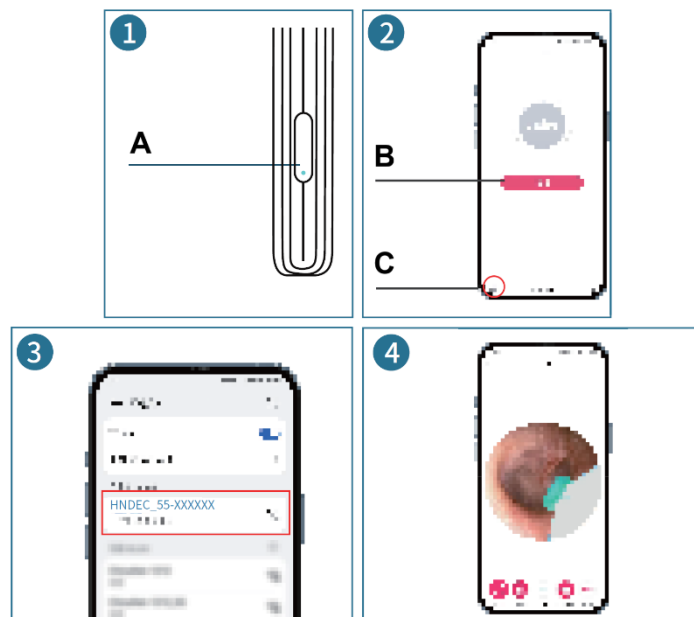

- A. Butoni i ndezjes / drita treguese
- B. Kliko
- C. Klikoni këtu për të ndryshuar gjuhën

PAMJA E NDËRFAQES SË APLIKACIONIT



1. Rrotullo imazhin
2. Imazh pasqyrë
3. Zmadhim
4. Bëj foto
5. Regjistro video

SI TË PËRDORET

Vendosni një majë silikon të pastër për vesh në majën e pajisjes dhe ndizni pajisjen. Pasi pamja e kamerës në kohë reale të shfaqet në telefonin tuaj, futeni ngadalë dhe me kujdes majën në kanal të veshit duke ndjekur ekranin për orientim. Lëvizni me kujdes pajisjen për të gjetur dyllin e dukshëm të veshit dhe hiqeni atë me lëvizje të ngadalta dhe të kontrolluara. Shmangni futjen e pajisjes shumë thellë ose prekjen e daulles së veshit. Pas pastrimit, nxirreni pajisjen nga veshi, fiken, hiqni majën e veshit dhe pastrojeni para se ta ruani pajisjen në një vend të thatë.

SHËNIME PËR SIGURINË E PRODUKTIT DHE PËRDORUESIT

1. Nëse imazhi bëhet i paqartë, pastroni me kujdes lentën me një shtupë pambuku.
2. Gjithmonë kontrolloni mjedisin përpara përdorimit. Mos e përdorni pajisjen nëse dikush pranë jush është duke lëvizur, pasi mund të shkaktojë lëndim aksidental.
3. Ky produkt nuk është i përshtatshëm për fëmijë nën 5 vjeç.
4. Fëmijët nuk duhet ta përdorin këtë produkt vetëm. Duhet të përdoret vetëm nën mbikëqyrjen e një të rrituri.
5. Mbajeni produktin larg nga fëmijët.
6. Mos e zhytni endoskopin në lëng, pasi mund të dëmtojë pajisjen.
7. Ngrohja e lehtë e lentes gjatë përdorimit është normale.
8. Ky produkt është i destinuar vetëm për kujdes personal dhe nuk duhet të përdoret si pajisje mjekësore.
9. Ruajeni produktin në një vend të freskët dhe të thatë, larg zjarrit dhe substancave korrozive.

UDHËZIME PËR KARIKIM

1. Shtypni dhe mbani butonin e ndezjes për t'u siguruar që pajisja është e fikur përpara karikimit.
2. Gjatë karikimit, drita e kuqe treguese do të qëndrojë e ndezur.
3. Kur bateria të jetë plotësisht e karikuar, drita e kuqe treguese do të fiket.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Ekrani është i ngrirë

1. Distanca e transmetimit të të dhënave mund të jetë shumë e madhe. Përdorni produktin më afër telefonit celular.
2. Fuqia e baterisë mund të jetë e ulët. Ju lutemi karikoni pajisjen.

Sinjali Wi-Fi nuk transmetohet ose është i ndërprerë

1. Bateria e ulët mund të dobësojë sinjalin Wi-Fi. Karikoni plotësisht pajisjen para përdorimit.
2. Distanca e transmetimit të sinjalit Wi-Fi mund të jetë tejkaluar. Përdorni produktin më afër telefonit celular.
3. Mund të ketë shumë sinjale Wi-Fi pranë. Përdorni produktin në një zonë me më pak sinjale pa tel.

Nuk shfaqet imazh

1. Konfirmoni që telefoni është i lidhur me emrin e saktë të rrjetit Wi-Fi të produktit.
2. Nëse drita blu treguese është e ndezur por nuk shfaqet imazh, fikni aplikacionin dhe pajisjen, pastaj ndizini përsëri dhe rilidhuni.
3. Fikni **Intelligent Network Switching**
 - **iOS:** Shkoni te Settings → WLAN → prekni ikonën e rrjetit → fikni Auto-Join.
 - **Android:** Shkoni te Settings → WLAN → Network Acceleration → fikni Switch Between Networks.
 - **Huawei HarmonyOS:** Shkoni te Settings → WLAN → More Settings → WLAN+ → fikni WLAN+.
 - **Telefona të tjerë:** Kërkoni një option të ngjashëm me Smart Network Switching në cilësimet WLAN dhe fikeni.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Address: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District,
Shenzhen, China
Phone:8613122811873
Email:632814589@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: EARSCAN (NE3 wireless visible earpick)
Model no.: NE3

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Place and date of issue: Shenzhen Guangdong 28Jan2026

Name, function: Hua Zhang, Manager

Signature:

Stamp: 张华

深圳市华杰伟科技有限公司
Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

张华

DEKLARATA E KONFORMITETIT E BE-së
Sipas Direktivës së KE – CE

Prodhuesi: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

Adresa: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District, Shenzhen, China

Telefoni: 8613122811873

Email: 632814589@qq.com

Kjo deklaratë konformiteti lëshohet nën përgjegjësinë e vetme të prodhuesit.

Emri i produktit: EARSCAN (NE3 pastrues veshi pa tel me kamerë)

Modeli nr.: NE3

Objekti i deklaratës i përshkruar më sipër është në përputhje me legjislacionin përkatës të harmonizimit të Bashkimit Evropian:

Direktiva EMC 2014/30/EU

Direktiva për Pajisjet Radio 2014/53/EU

Direktiva RoHS 2011/65/EU Aneksi II që ndryshon Aneksin (EU) 2015/863

Referencat për standardet e harmonizuara përkatëse të përdorura ose referencat për specifikime të tjera teknike në lidhje me të cilat deklarohet konformiteti:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

EN IEC 62311:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020

IEC 62321-4:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Importuar nga: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Nënshkruar për dhe në emër të (emri i kompanisë): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Vendi dhe data e lëshimit: Shenzhen Guangdong, 28 Jan 2026

Emri, funksioni: Hua Zhang, Manager

Nënshkrimi:

Vula: