

# AT: EARSCAN – BENUTZERHANDBUCH

## PRODUKTPARAMETER

**Produktfunktion:** Kabelloser visueller Ohrreiniger

**Netzwerkstandard:** IEEE 802.11b/g/n

**Antenne:** Eingebaute Antenne

**Arbeitsfrequenz:** 2.4 GHz

**Maximale RF-Ausgangsleistung:** ≤20 dBm

**Übertragungsgeschwindigkeit:** 30 fps

**Bildsensor:** CMOS

**Betriebstemperatur:** -10 °C ~ 50 °C

**Batteriekapazität:** 130 mAh

**Betriebszeit:** 35 Minuten

**Ladezeit:** ~60 min

**Eingangsstrom:** DC 5 V / 150 mA

**Innendurchmesser der Linse:** 3.6 mm

**Brennweite:** 15 mm ~ 20 mm

**Bildqualität:** HD

**Schwerkraftsensor:** 3-Achsen

**Produktinhalt:** Verkaufsverpackung, Hauptgerät, Produkthandbuch, Ohrlöffel (5×), Ohrlöffelbehälter, USB Type-C Ladekabel



---

## APP-DOWNLOADMETHODE

Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach **HND**, um die Anwendung herunterzuladen und zu installieren. Sie können auch den Browser Ihres Mobiltelefons verwenden, um den QR-Code zu scannen und die App herunterzuladen und zu installieren.


- **iOS:** Nach dem Scannen des QR-Codes öffnen Sie den iOS App Store, um die Anwendung herunterzuladen und zu installieren. Sie können auch direkt nach **HND** im App Store suchen.
- **Android:** Nach dem Scannen des QR-Codes öffnen Sie Google Play, um die Anwendung herunterzuladen und zu installieren.



**Achtung:** Wenn während der Installation eine Sicherheitsmeldung erscheint, wählen Sie **Continue Installation**, um fortzufahren.

## VERBINDUNG MIT DEM iOS-SYSTEM

1. Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue Kontrollleuchte zu blinken beginnt. Dies zeigt an, dass das Gerät bereit ist, sich mit der App zu verbinden.
2. Tippen Sie auf das APP-Symbol, um die Anwendung zu öffnen.
3. Wählen Sie die Option **WLAN** und aktivieren Sie sie.
4. Verbinden Sie sich mit dem Wi-Fi-Netzwerk: **HNDEC\_55-XXXXXX**.
5. Kehren Sie zur App zurück, um das Gerät zu verwenden. Die blaue Leuchte wechselt von blinkend zu dauerhaft leuchtend und zeigt damit eine erfolgreiche Verbindung an.

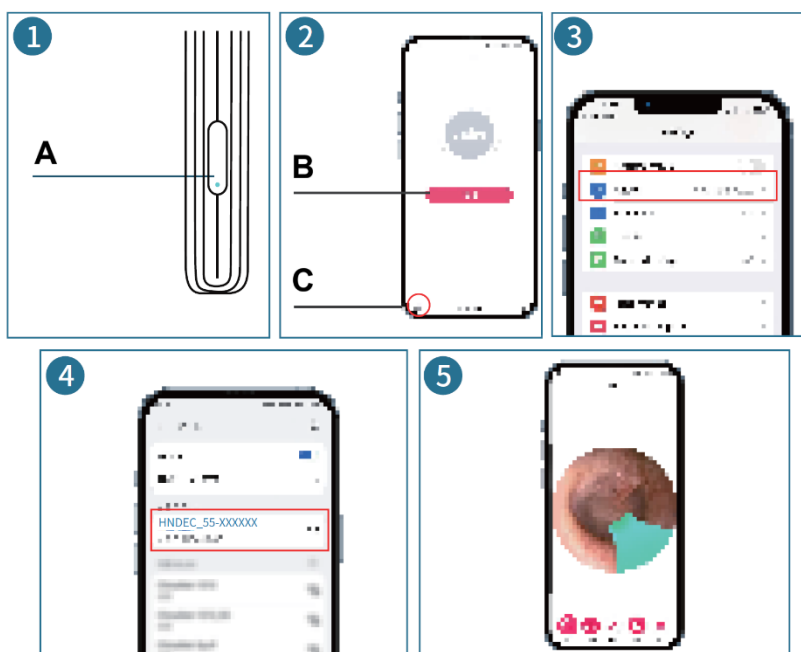


- A. Ein-/Aus-Taste / Kontrollleuchte
- B. Klicken Sie, um fortzufahren
- C. Klicken Sie hier, um die Sprache zu ändern

---

## VERBINDUNG MIT DEM ANDROID-SYSTEM

1. Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue Kontrollleuchte zu blinken beginnt. Dies zeigt an, dass das Gerät bereit ist, sich mit der App zu verbinden.
2. Tippen Sie auf das APP-Symbol, um die Anwendung zu öffnen.
3. Verbinden Sie sich mit dem Wi-Fi-Netzwerk: **HNDEC\_55-XXXXXX**.
4. Kehren Sie zur App zurück, um das Gerät zu verwenden. Die blaue Leuchte wechselt von blinkend zu dauerhaft leuchtend und zeigt damit eine erfolgreiche Verbindung an.

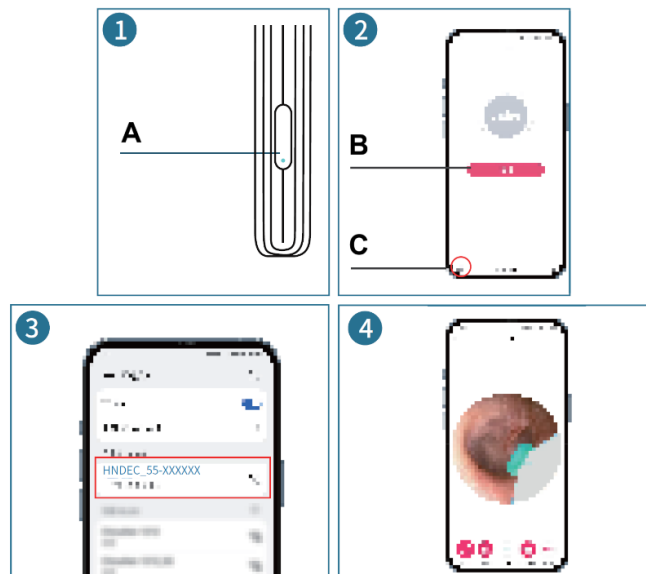

- A. Ein-/Aus-Taste / Kontrollleuchte
- B. Klicken
- C. Klicken Sie hier, um die Sprache zu ändern

---

## ÜBERSICHT DER APP-OBERFLÄCHE



1. Bild drehen
2. Spiegelbild
3. Zoom
4. Foto aufnehmen
5. Video aufnehmen

---

## **ANWENDUNG**

Befestigen Sie einen sauberen Silikon-Ohröffel sicher an der Spitze des Geräts und schalten Sie das Gerät ein. Sobald die Live-Kameraansicht auf Ihrem Telefon erscheint, führen Sie die Spitze langsam und vorsichtig in den Gehörgang ein und orientieren Sie sich dabei am Bildschirm. Bewegen Sie den Ohrreiniger vorsichtig, um sichtbares Ohrenschmalz zu finden und es mit langsamen, kontrollierten Bewegungen zu entfernen. Vermeiden Sie es, das Gerät zu tief einzuführen oder das Trommelfell zu berühren. Nach der Reinigung entfernen Sie das Gerät aus dem Ohr, schalten es aus, nehmen den Ohröffel ab und reinigen ihn, bevor Sie das Gerät an einem trockenen Ort aufbewahren.

---

## **SICHERHEITSHINWEISE FÜR PRODUKT UND BENUTZER**

1. Wenn das Bild unscharf wird, reinigen Sie die Linse vorsichtig mit einem Wattestäbchen.
2. Überprüfen Sie vor der Verwendung immer Ihre Umgebung. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich jemand in Ihrer Nähe bewegt, da dies zu Verletzungen führen kann.
3. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet.
4. Kinder dürfen dieses Produkt nicht alleine verwenden. Die Nutzung darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.
5. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
6. Tauchen Sie das Endoskop nicht in Flüssigkeit, da dies das Gerät beschädigen kann.
7. Eine leichte Erwärmung der Linse während der Verwendung ist normal.
8. Dieses Produkt ist nur für die persönliche Pflege bestimmt und darf nicht als medizinisches Gerät verwendet werden.
9. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort, fern von Feuer und korrosiven Stoffen.

---

## **LADLEANLEITUNG**

1. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um sicherzustellen, dass das Gerät vor dem Laden ausgeschaltet ist.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Kontrollleuchte dauerhaft.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die rote Kontrollleuchte.

---

## **FEHLERBEHEBUNG**

### **Der Bildschirm ist eingefroren**

1. Die Datenübertragungsdistanz ist möglicherweise zu groß. Verwenden Sie das Produkt näher am Mobiltelefon.
2. Die Batterieleistung könnte niedrig sein. Bitte laden Sie das Gerät auf.

### Das Wi-Fi-Signal kann nicht übertragen werden oder ist instabil

1. Eine niedrige Batterieleistung kann das Wi-Fi-Signal schwächen. Laden Sie das Gerät vor der Verwendung vollständig auf.
2. Die Wi-Fi-Signalübertragungsdistanz könnte überschritten sein. Verwenden Sie das Produkt näher am Mobiltelefon.
3. Es könnten sich zu viele Wi-Fi-Signale in der Nähe befinden. Verwenden Sie das Produkt in einem Bereich mit weniger drahtlosen Signalen.

### Kein Bild angezeigt

1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit dem richtigen Wi-Fi-Netzwerknamen des Produkts verbunden ist.
2. Wenn die blaue Kontrollleuchte leuchtet, aber kein Bild angezeigt wird, schließen Sie sowohl die App als auch das Gerät, starten Sie sie erneut und verbinden Sie sich wieder.
3. Deaktivieren Sie **Intelligent Network Switching**
  - **iOS:** Gehen Sie zu Settings → WLAN → tippen Sie auf das Netzwerksymbol → deaktivieren Sie Auto-Join.
  - **Android:** Gehen Sie zu Settings → WLAN → Network Acceleration → deaktivieren Sie Switch Between Networks.
  - **Huawei HarmonyOS:** Gehen Sie zu Settings → WLAN → More Settings → WLAN+ → deaktivieren Sie WLAN+.
  - **Andere Mobiltelefone:** Suchen Sie in den WLAN-Einstellungen nach einer Option ähnlich wie Smart Network Switching und deaktivieren Sie diese.

---

### ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.

**EU DECLARATION OF CONFORMITY**  
**According to EC Directive - CE**

Manufacturer: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD  
Address: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District,  
Shenzhen, China  
Phone:8613122811873  
Email:632814589@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

**Product name:** EARSCAN (NE3 wireless visible earpick)  
**Model no.:** NE3

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

**EMC Directive 2014/30/EU**

**Radio Equipment Directive 2014/53/EU**

**RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863**

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 55014-1:2021  
EN IEC 55014-2:2021  
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021  
EN 61000-3-3:2013+A2:2021  
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)  
EN IEC 62311:2020  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)  
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020  
IEC 62321-4:2017  
IEC 62321-5:2013  
IEC 62321-6:2015  
IEC 62321-7-2:2017  
IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Place and date of issue: Shenzhen Guangdong 28Jan2026

Name, function: Hua Zhang, Manager

Signature:

Stamp: 张华

深圳市华杰伟科技有限公司  
Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

张华

**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**  
**Gemäß EG-Richtlinie – CE**

**Hersteller:** Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

**Adresse:** 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District, Shenzhen, China

**Telefon:** 8613122811873

**E-Mail:** 632814589@qq.com

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

**Produktname:** EARSCAN (NE3 kabelloser visueller Ohrreiniger)

**Modell-Nr.:** NE3

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht der einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschrift der Europäischen Union:

**EMV-Richtlinie 2014/30/EU**

**Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU**

**RoHS-Richtlinie 2011/65/EU Anhang II zur Änderung von Anhang (EU) 2015/863**

**Verweise auf die relevanten harmonisierten Normen oder andere technische Spezifikationen, in Bezug auf die die Konformität erklärt wird:**

**EN IEC 55014-1:2021**

**EN IEC 55014-2:2021**

**EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021**

**EN 61000-3-3:2013+A2:2021**

**ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)**

**EN IEC 62311:2020**

**ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)**

**ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)**

**EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020**

**IEC 62321-4:2017**

**IEC 62321-5:2013**

**IEC 62321-6:2015**

**IEC 62321-7-2:2017**

**IEC 62321-8:2017**

Importiert von: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Unterzeichnet für und im Namen von (Firmenname): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Ort und Datum der Ausstellung: Shenzhen Guangdong, 28 Jan 2026

Name, Funktion: Hua Zhang, Manager

Unterschrift:

Stempel: