

BG: EARSCAN – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Функция на продукта: Безжична визуална ушна клечка

Мрежов стандарт: IEEE 802.11b/g/n

Антенa: Вградена антенa

Работна честота: 2,4 GHz

Максимална RF изходна мощност: ≤20 dBm

Скорост на предаване: 30 fps

Изображение сензор: CMOS

Работна температура: -10 °C ~ 50 °C

Капацитет на батерията: 130 mAh

Работно време: 35 минути

Време за зареждане: ~60 мин

Входен ток: DC 5 V / 150 mA

Вътрешен диаметър на обектива: 3,6 mm

Фокусно разстояние: 15 mm ~ 20 mm

Качество на картината: HD

Гравитационен сензор: 3-осен

Съдържание на продукта: Кутия за продажба на дребно, основно устройство, ръководство за продукта, ушни клечки (5x), контейнер за ушни клечки, USB Type-C кабел за зареждане



НАЧИН ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

Потърсете **HND** в App Store или Google Play, за да изтеглите и инсталирате приложението. Можете също да използвате браузъра на мобилния си телефон, за да сканирате QR кода и да изтеглите и инсталирате приложението.


- **iOS:** След сканиране на QR кода отворете iOS App Store, за да изтеглите и инсталирате приложението. Можете също да потърсите **HND** директно в App Store.
- **Android:** След сканиране на QR кода отворете **Google Play**, за да изтеглите и инсталирате приложението.



Внимание: Ако по време на инсталирането се появи напомняне за сигурност, изберете „Продължи инсталирането“, за да продължите.

СВЪРЗВАНЕ С iOS СИСТЕМА


1. Натиснете и задръжте бутона за включване за 2 секунди, докато синият индикатор не започне да мига. Това показва, че ухото е готово за свързване с приложението.
2. Докоснете **иконата на приложението**, за да го отворите.
3. Изберете опцията **WLAN** и я активирайте.
4. Свържете се с Wi-Fi мрежата: **HNDEC_55-XXXXXX**.
5. Върнете се в приложението, за да започнете да използвате устройството. Синята светлина ще премине от мигаща в постоянна, което показва, че връзката е успешна.

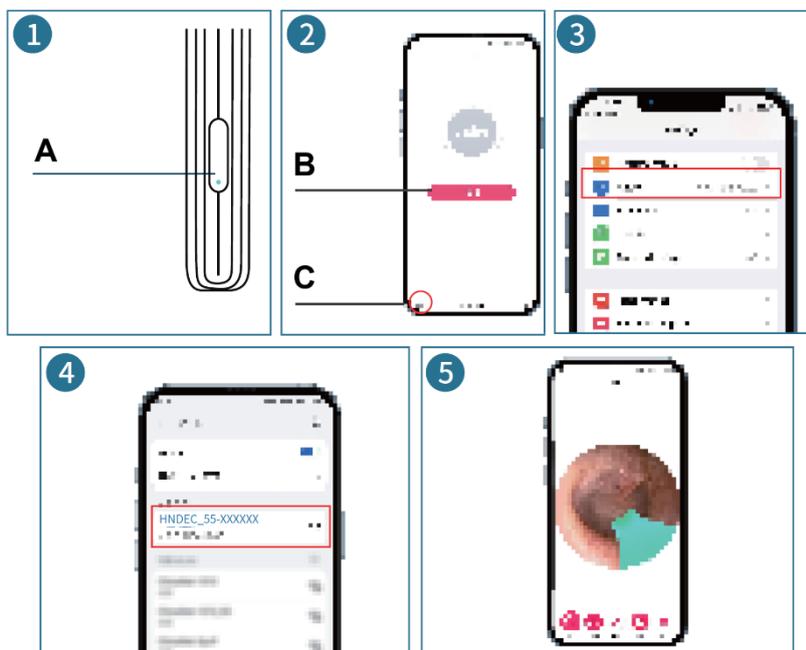

- A. Бутон за включване/индикаторна светлина
 - B. Кликнете, за да продължите
 - C. Кликнете тук, за да промените езика
-

СВЪРЗВАНЕ С ANDROID СИСТЕМА

1. Натиснете и задръжте бутона за включване за 2 секунди, докато синята индикаторна светлина започне да мига. Това показва, че ушната клечка е готова за свързване с приложението.
2. Докоснете **иконата на приложението**, за да го отворите.
3. Свържете се с Wi-Fi мрежата: **HNDEC_55-XXXXXX**.
4. Върнете се в приложението, за да започнете да използвате устройството. Синята светлина ще премине от мигаща в постоянна, което показва, че връзката е успешна.

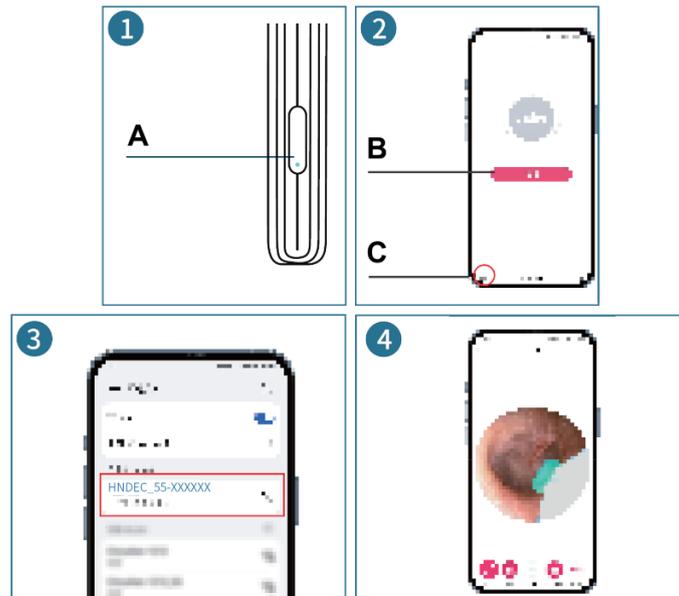

- A. Бутон за включване/индикаторна светлина
- B. Клик
- C. Кликнете тук, за да промените езика

ПРЕГЛЕД НА ИНТЕРФЕЙСА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО



1. Завъртане на изображение
2. Отразяване на изображението
3. Увеличаване
4. Заснемане на снимка
5. Заснемане на видео

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА

Закрепете чиста силиконова лъжичка за уши към върха на устройството и включете ушната лъжичка. Щом на екрана на телефона ви се появи изображението от камерата, бавно и внимателно вкарайте върха в ушния канал, като следите екрана за указания. Внимателно движете ушната лъжичка, за да намерите видимата ушна кал, и я отстранете с бавни, контролирани движения. Избягвайте да вкарвате устройството прекалено дълбоко или да докосвате тъпанчето. След почистването извадете устройството от ухото, изключете го, откачете ушната лъжичка и я почистете, преди да съхраните устройството на сухо място.

БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРОДУКТА И ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Ако изображението стане неясна, внимателно почистете обектива с памучен тампон.
2. Винаги проверявайте околната среда преди употреба. Не използвайте устройството, докато някой в близост се движи, тъй като това може да доведе до случайно нараняване.
3. Този продукт не е подходящ за деца под 5-годишна възраст.
4. Децата не трябва да използват този продукт сами. Той трябва да се използва само под наблюдението на възрастен.
5. Дръжте продукта извън обсега на деца.
6. Не потапяйте ендоскопа в течност, тъй като това може да повреди устройството.
7. Лекото загряване на лещата по време на употреба е нормално.
8. Този продукт е предназначен само за лична хигиена и не трябва да се използва като медицинско оборудване.
9. Съхранявайте продукта на хладно и сухо място, далеч от огън и корозивни вещества.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

1. Натиснете и задръжте бутона за включване, за да се уверите, че устройството е изключено преди зареждане.
2. По време на зареждането червеният индикатор ще остане включен.
3. Когато батерията е напълно заредена, червената индикаторна лампа ще угасне.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Екранът е замръзнал

1. Разстоянието за предаване на данни може да е прекалено голямо. Използвайте продукта по-близо до мобилния телефон.
2. Възможно е батерията да е слаба. Моля, презаредете устройството.

Wi-Fi сигналът не може да се предава или е прекъсван

1. Ниското ниво на заряд на батерията може да отслаби Wi-Fi сигнала. Заредете устройството напълно преди употреба.
2. Разстоянието за предаване на Wi-Fi сигнала може да е превишено. Използвайте продукта по-близо до мобилния телефон.
3. В близост може да има прекалено много Wi-Fi сигнали. Използвайте продукта в зона с по-малко безжични сигнали.

Не се показва изображение

1. Уверете се, че телефонът е свързан с правилното име на Wi-Fi мрежата на продукта.
2. Ако синият индикатор свети, но няма изображение, изключете приложението и устройството, след което ги рестартирайте и се свържете отново.
3. Изключете **интелигентното превключване на мрежата**:
 - **iOS**: Отидете в **Настройки** → **WLAN** → докоснете иконата на мрежата → изключете **Автоматично свързване**.
 - **Android**: Отидете в **Настройки** → **WLAN** → **Ускорение на мрежата** → изключете **Превключване между мрежи**.
 - **Huawei HarmonyOS**: Отидете в **Настройки** → **WLAN** → **Още настройки** → **WLAN+** → изключете **WLAN+**.
 - **Други мобилни телефони**: Потърсете опция, подобна на „**Интелигентно превключване на мрежата**“ в настройките на WLAN, и я изключете.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Address: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District,
Shenzhen, China
Phone:8613122811873
Email:632814589@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: EARSCAN (NE3 wireless visible earpick)
Model no.: NE3

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Place and date of issue: Shenzhen Guangdong 28Jan2026

Name, function: Hua Zhang, Manager

Signature:

Stamp: 张华

深圳市华杰伟科技有限公司
Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

张华

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС
Съгласно Директивата на ЕО - СЕ

Производител: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Адрес: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District, Shenzhen, China
Телефон: 8613122811873
Имейл: 632814589@qq.com

Настоящата декларация за съответствие се издава под изключителната отговорност на производителя.

Наименование на продукта: EARSCAN (NE3 безжична видима ушна клечка)
Модел №: NE3

Обектът на декларацията, описан по-горе, е в съответствие със съответното законодателство на Съюза за хармонизация:

Директива 2014/30/ЕС за електромагнитна съвместимост

Директива за радиооборудване 2014/53/ЕС

Директива за RoHS 2011/65/ЕС Приложение II, изменящо Приложение (ЕС) 2015/863

Позовавания на съответните хармонизирани стандарти, които са използвани, или позовавания на други технически спецификации, по отношение на които е декларирано съответствие:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

EN IEC 62311:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020

IEC 62321-4:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Внос: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Словения, ЕС

Подписано от името и за сметка на (наименование на дружеството): Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

Място и дата на издаване: Шенжен Гуандун, 28 януари 2026 г.

Име, длъжност: Хуа Жанг, мениджър

Подпис:

Печат: