

CZ: EARSCAN – NÁVOD K POUŽITÍ

PARAMETRY PRODUKTU

Funkce produktu: Bezdrátová vizuální špachtle do uší

Síťový standard: IEEE 802.11b/g/n

Anténa: Vestavěná anténa

Pracovní frekvence: 2,4 GHz

Maximální výstupní výkon RF: ≤20 dBm

Přenosová rychlost: 30 fps

Obrazový snímač: CMOS

Pracovní teplota: -10 °C ~ 50 °C

Kapacita baterie: 130 mAh

Provozní doba: 35 minut

Doba nabíjení: ~60 min

Vstupní proud: DC 5 V / 150 mA

Vnitřní průměr objektivu: 3,6 mm

Ohnisková vzdálenost: 15 mm ~ 20 mm

Kvalita obrazu: HD

Gravitační senzor: 3osý

Obsah balení: Prodejní krabička, hlavní jednotka, návod k použití, špunty do uší (5×), pouzdro na špunty do uší, nabíjecí kabel USB typu C



POSTUP STAŽENÍ APLIKACE

Vyhledejte **HND** v App Store nebo Google Play a stáhněte a nainstalujte aplikaci. Můžete také použít prohlížeč v mobilním telefonu a naskenovat QR kód, abyste aplikaci stáhli a nainstalovali.


- **iOS:** Po naskenování QR kódu otevřete iOS App Store a stáhněte a nainstalujte aplikaci. Můžete také vyhledat **HND** přímo v App Store.
- **Android:** Po naskenování QR kódu otevřete **Google Play** a stáhněte a nainstalujte aplikaci.



Upozornění: Pokud se během instalace zobrazí bezpečnostní upozornění, vyberte možnost **Pokračovat v instalaci** a pokračujte.

PŘIPOJENÍ K SYSTÉMU iOS


1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, dokud nezačne blikat modrá kontrolka. To znamená, že sluchátko je připraveno k připojení k aplikaci.
2. Klepnutím na **ikonu APP** otevřete aplikaci.
3. Vyberte možnost **WLAN** a povolte ji.
4. Připojte se k síti Wi-Fi: **HNDEC_55-XXXXXX**.
5. Vraťte se do aplikace a začněte zařízení používat. Modrá kontrolka přestane blikat a svítí nepřetržitě, což znamená, že připojení bylo úspěšné.

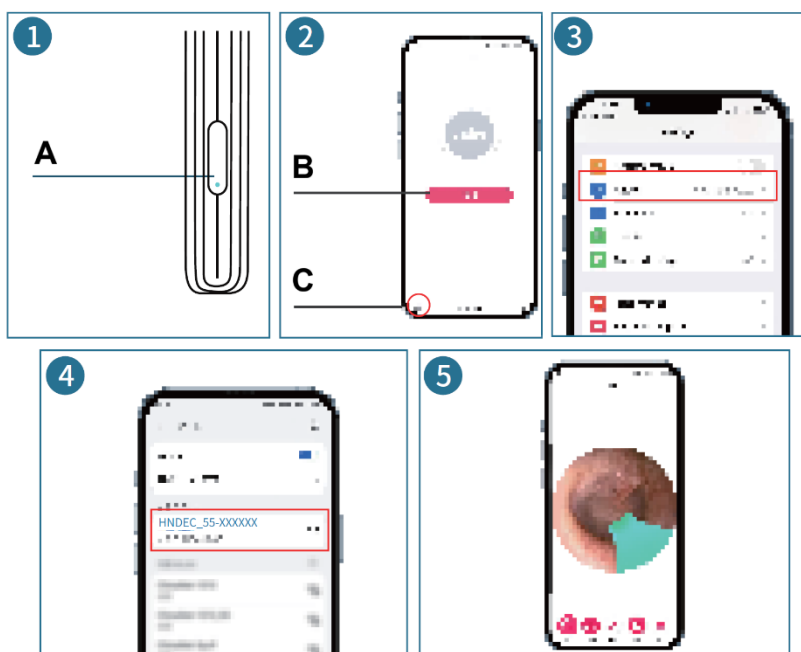

- A. Tlačítko napájení / kontrolka
 - B. Klikněte pro pokračování
 - C. Klikněte zde pro změnu jazyka
-

PŘIPOJENÍ SYSTÉMU ANDROID

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, dokud modrá kontrolka nezačne blikat. To znamená, že sluchátko je připraveno k připojení k aplikaci.
2. Klepnutím na **ikonu APP** otevřete aplikaci.
3. Připojte se k síti Wi-Fi: **HNDEC_55-XXXXXX**.
4. Vraťte se do aplikace a začněte zařízení používat. Modrá kontrolka přestane blikat a svítí nepřetržitě, což znamená, že připojení bylo úspěšné.

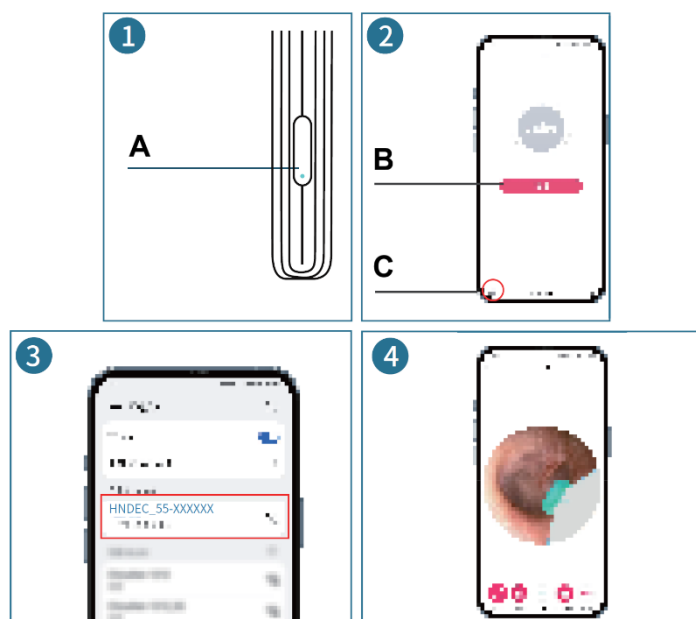

- A. Tlačítko napájení / kontrolka
- B. Klikněte
- C. Klikněte zde pro změnu jazyka

PŘEHLED ROZHRAŇÍ APLIKACE



1. Otočit obrázek
2. Zrcadlit obrázek
3. Přiblížit
4. Pořídit fotografii
5. Pořídit video

JAK POUŽÍVAT

Připevněte čistou silikonovou lžičku na špičku zařízení a zapněte ušní tyčinku. Jakmile se na telefonu zobrazí živý obraz z kamery, pomalu a opatrně vsuňte špičku do zvukovodu a sledujte obrazovku, která vám poskytne vodítko. Opatrně pohybujte špachtlí, abyste našli viditelný ušní maz, a pomalými, kontrolovanými pohyby jej odstraňte. Nevkládejte zařízení příliš hluboko a nedotýkejte se ušního bubínku. Po vyčištění vyjměte zařízení z ucha, vypněte jej, odpojte ušní lžičku a vyčistěte ji, než zařízení uložíte na suché místo.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO VÝROBEK A UŽIVATELE

1. Pokud je obraz nejasný, opatrně vyčistěte objektiv pomocí vatové tyčinky.
2. Před použitím vždy zkontrolujte okolí. Nepoužívejte zařízení, pokud se někdo v blízkosti pohybuje, protože by mohlo dojít k náhodnému zranění.
3. Tento výrobek není vhodný pro děti mladší 5 let.
4. Děti nesmějí tento výrobek používat samy. Měl by být používán pouze pod dohledem dospělé osoby.
5. Produkt uchovávejte mimo dosah dětí.
6. Endoskop neponořujte do tekutiny, protože by mohlo dojít k poškození zařízení.
7. Mírné zahřátí čočky během používání je normální.
8. Tento výrobek je určen pouze pro osobní péči a nesmí být používán jako zdravotnický prostředek.
9. Produkt skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah ohně a korozivních látek.

POKYNY K NABÍJENÍ

1. Před nabíjením stiskněte a podržte tlačítko napájení, abyste se ujistili, že je zařízení vypnuté.
2. Během nabíjení bude svítit červená kontrolka.
3. Po úplném nabití baterie se červená kontrolka vypne.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zaseknutá obrazovka

1. Vzdálenost pro přenos dat může být příliš velká. Používejte produkt blíže k mobilnímu telefonu.
2. Možná je baterie slabá. Zařízení dobijte.

Signál Wi-Fi nelze přenášet nebo je přerušovaný

1. Nízký stav baterie může oslabit signál Wi-Fi. Před použitím zařízení plně nabijte.
2. Vzdálenost pro přenos signálu Wi-Fi může být překročena. Používejte produkt blíže k mobilnímu telefonu.

3. V okolí může být příliš mnoho signálů Wi-Fi. Používejte produkt v oblasti s menším počtem bezdrátových signálů.

Nezobrazuje se žádný obraz

1. Zkontrolujte, zda je telefon připojen k správnému názvu sítě Wi-Fi produktu.
2. Pokud svítí modrá kontrolka, ale nezobrazuje se žádný obraz, vypněte aplikaci i zařízení, restartujte je a znovu se připojte.
3. Vypněte funkci **inteligentního přepínání sítě**:
 - **iOS:** Přejděte do **Nastavení** → **WLAN** → klepněte na ikonu sítě → **vypněte Automatické připojení**.
 - **Android:** Přejděte do **Nastavení** → **WLAN** → **Zrychlení sítě** → **vypněte Přepínání mezi sítěmi**.
 - **Huawei HarmonyOS:** Přejděte do **Nastavení** → **WLAN** → **Další nastavení** → **WLAN+** → **vypněte WLAN+**.
 - **Ostatní mobilní telefony:** V nastavení WLAN vyhledejte možnost podobnou **Inteligentnímu přepínání sítě** a vypněte ji.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Address: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District,
Shenzhen, China
Phone:8613122811873
Email:632814589@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: EARSCAN (NE3 wireless visible earpick)
Model no.: NE3

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Place and date of issue: Shenzhen Guangdong 28Jan2026

Name, function: Hua Zhang, Manager

Signature:

Stamp: 张华

深圳市华杰伟科技有限公司
Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

张华

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU
Podle směrnice ES – CE

Výrobce: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Adresa: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District, Shenzhen, Čína
Telefon: 8613122811873
E-mail: 632814589@qq.com

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Název produktu: EARSCAN (NE3 bezdrátová viditelná špunty do uší)
Číslo modelu: NE3

Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Směrnice EMC 2014/30/EU

Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU

Směrnice RoHS 2011/65/EU Příloha II, kterou se mění příloha (EU) 2015/863

Odkazy na příslušné harmonizované normy použité nebo odkazy na jiné technické specifikace, ve vztahu k nimž je deklarována shoda:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Dovozce: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovinsko, EU

Podepsáno za a jménem (název společnosti): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD
Místo a datum vydání: Shenzhen Guangdong, 28. ledna 2026
Jméno, funkce: Hua Zhang, manažer
Podpis:
Razítko: