

DK: EARSCAN – BRUGERMANUAL

PRODUKTPARAMETRE

Produktfunktion: Trådløs visuel ørepind

Netværksstandard: IEEE 802.11b/g/n

Antenne: Indbygget antenne

Arbejdsfrekvens: 2,4 GHz

Maksimal RF-udgangseffekt: ≤20 dBm

Transmissionshastighed: 30 fps

Billedføler: CMOS

Arbejdstemperatur: -10 °C ~ 50 °C

Batterikapacitet: 130 mAh

Driftstid: 35 minutter

Opladningstid: ~60 min

Indgangsstrøm: DC 5 V / 150 mA


Linsens indvendige diameter: 3,6 mm

Brændvidde: 15 mm ~ 20 mm

Billedkvalitet: HD

Tyngdekraftsensor: 3-akset

Produktindhold: Detailæske, hovedenhed, produktmanual, ørepropper (5×), ørepropsbeholder, USB Type-C-opladerkabel

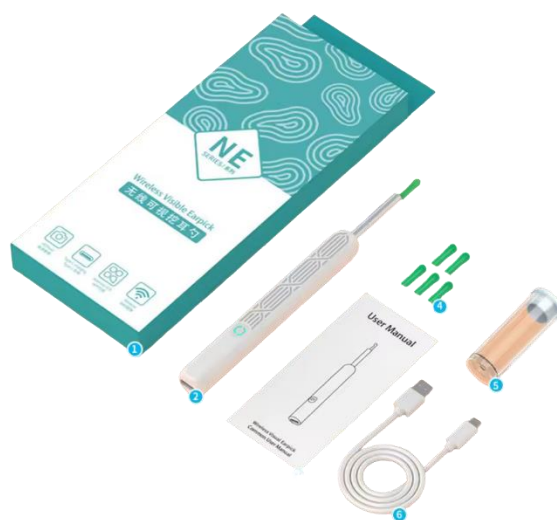

METODE TIL DOWNLOAD AF APP

Søg efter **HND** i App Store eller Google Play for at downloade og installere applikationen. Du kan også bruge din mobiltelefons browser til at scanne QR-koden for at downloade og installere appen.


- **iOS:** Når du har scannet QR-koden, skal du åbne iOS App Store for at downloade og installere applikationen. Du kan også søge efter **HND** direkte i App Store.
- **Android:** Når du har scannet QR-koden, skal du åbne **Google Play** for at downloade og installere applikationen.



OBS: Hvis der vises en sikkerhedspåmindelse under installationen, skal du vælge **Fortsæt installation** for at fortsætte.

iOS-SYSTEMTILSLUTNING


1. Hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder, indtil den blå indikatorlampe begynder at blinke. Dette indikerer, at ørepinden er klar til at oprette forbindelse til appen.
2. Tryk på **APP-ikonet** for at åbne applikationen.
3. Vælg WLAN-indstillingen, og aktiver den.
4. Opret forbindelse til Wi-Fi-netværket: **HNDEC_55-XXXXXX**.
5. Gå tilbage til appen for at begynde at bruge enheden. Den blå lampe skifter fra at blinke til at lyse konstant, hvilket angiver, at forbindelsen er oprettet.

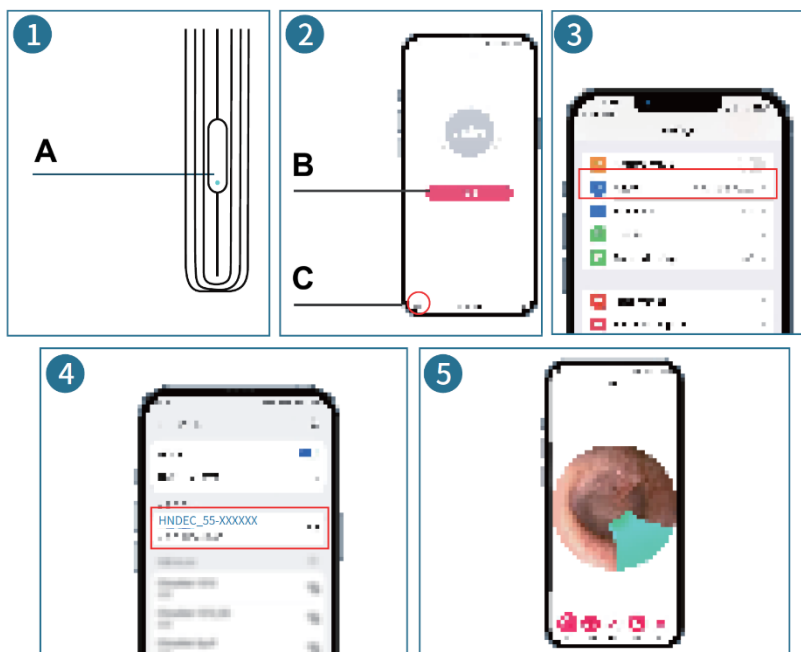

- A. Tænd/sluk-knap / indikatorlampe
 - B. Klik for at fortsætte
 - C. Klik her for at ændre sproget
-

ANDROID-SYSTEMTILSLUTNING

1. Hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder, indtil den blå indikatorlampe begynder at blinke. Dette angiver, at øreproppen er klar til at oprette forbindelse til appen.
2. Tryk på **APP-ikonet** for at åbne applikationen.
3. Opret forbindelse til Wi-Fi-netværket: **HNDEC_55-XXXXXX**.
4. Gå tilbage til appen for at begynde at bruge enheden. Den blå lampe skifter fra at blinke til at lyse konstant, hvilket angiver, at forbindelsen er oprettet.

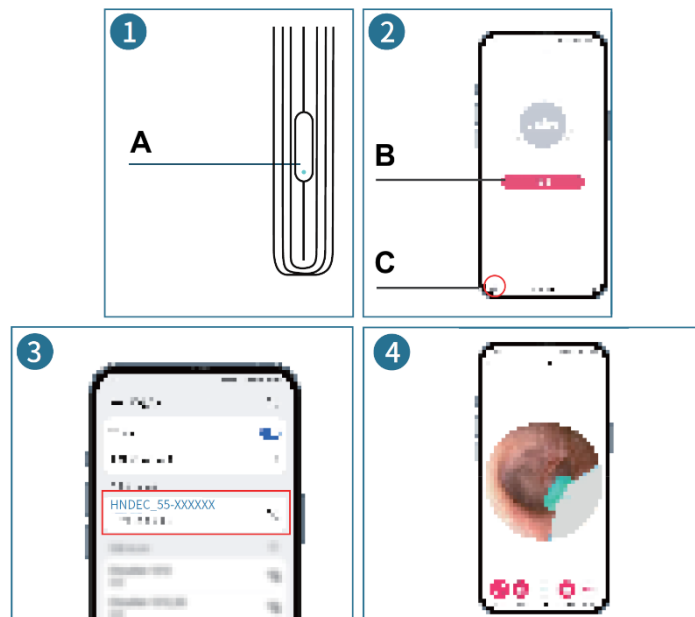

- A. Tænd/sluk-knap / indikatorlampe
- B. Klik
- C. Klik her for at ændre sproget

OVERSIGHT OVER APP-GRÆNSEFLADEN



1. Rotér billede
2. Spejl billede
3. Zoom
4. Tag foto
5. Optag video

SÅDAN BRUGES

Fastgør en ren silikone-ørepropp sikkert til enden af enheden, og tænd for ørepinden. Når live-kameraet vises på din telefon, skal du langsomt og forsigtigt indføre spidsen i øregangen, mens du følger vejledningen på skærmen. Bevæg ørepinden forsigtigt for at finde synligt ørevoks, og fjern det med langsomme, kontrollerede bevægelser. Undgå at indsætte enheden for dybt eller berøre trommehinden. Efter rengøring skal du fjerne enheden fra øret, slukke den, fjerne øreskovlen og rengøre den, inden du opbevarer enheden på et tørt sted.

PRODUKT- OG BRUGERSIKKERHEDSINFORMATION

1. Hvis billedet bliver uklart, skal du forsigtigt rengøre linsen med en vatpind.
2. Kontroller altid omgivelserne før brug. Brug ikke enheden, mens der er nogen i nærheden, der bevæger sig, da dette kan forårsage utilsigtede skader.
3. Dette produkt er ikke egnet til børn under 5 år.
4. Børn må ikke bruge dette produkt alene. Det må kun bruges under opsyn af en voksen.
5. Opbevar produktet utilgængeligt for børn.
6. Endoskopet må ikke nedsænkes i væske, da dette kan beskadige enheden.
7. Let opvarmning af linsen under brug er normalt.
8. Dette produkt er kun beregnet til personlig pleje og må ikke bruges som medicinsk udstyr.
9. Opbevar produktet på et køligt, tørt sted væk fra ild og ætsende stoffer.

OPLADNINGSSINSTRUKTIONER

1. Hold tænd/sluk-knappen nede for at sikre, at enheden er slukket, inden den oplades.
2. Under opladning forbliver den røde indikatorlampe tændt.
3. Når batteriet er fuldt opladet, slukkes den røde indikatorlampe.

FEJLFINDING

Skærmen er frosset

1. Dataoverførselsafstanden er muligvis for stor. Brug produktet tættere på mobiltelefonen.
2. Batteriet er muligvis lavt. Oplad enheden.

Wi-Fi-signalet kan ikke transmitteres eller er ustabil

1. Lavt batteriniveau kan svække Wi-Fi-signalet. Oplad enheden fuldt ud inden brug.
2. Wi-Fi-signalets transmissionsafstand er muligvis overskredet. Brug produktet tættere på mobiltelefonen.
3. Der kan være for mange Wi-Fi-signaler i nærheden. Brug produktet i et område med færre trådløse signaler.

Der vises ikke noget billede

1. Kontroller, at telefonen er forbundet til det korrekte produkts Wi-Fi-netværksnavn.

2. Hvis den blå indikatorlampe lyser, men der ikke vises noget billede, skal du slukke både appen og enheden, genstarte dem og oprette forbindelse igen.
3. Sluk for **Intelligent Network Switching**:
 - **iOS:** Gå til **Indstillinger** → **WLAN** → tryk på netværksikonet → sluk for Auto-Join.
 - **Android:** Gå til **Indstillinger** → **WLAN** → **Netværksacceleration** → sluk for **Skift mellem netværk**.
 - **Huawei HarmonyOS:** Gå til **Indstillinger** → **WLAN** → **Flere indstillinger** → **WLAN+** → sluk for **WLAN+**.
 - **Andre mobiltelefoner:** Find en indstilling, der ligner **Smart Network Switching** i WLAN-indstillingerne, og sluk den.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Address: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District,
Shenzhen, China
Phone:8613122811873
Email:632814589@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: EARSCAN (NE3 wireless visible earpick)
Model no.: NE3

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Place and date of issue: Shenzhen Guangdong 28Jan2026

Name, function: Hua Zhang, Manager

Signature:

Stamp: 张华

深圳市华杰伟科技有限公司
Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

张华

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
I henhold til EF-direktivet - CE

Producent: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

Adresse: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District, Shenzhen, Kina

Telefon: 8613122811873

E-mail: 632814589@qq.com

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på producentens eget ansvar.

Produktnavn: EARSCAN (NE3 trådløs synlig ørepropp)

Model nr.: NE3

Ovennævnte erklæring er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:

EMC-direktiv 2014/30/EU

Direktiv 2014/53/EU om radioudstyr

RoHS-direktiv 2011/65/EU Bilag II, der ændrer bilag (EU) 2015/863

Henvisninger til de relevante harmoniserede standarder, der er anvendt, eller henvisninger til andre tekniske specifikationer, i forhold til hvilke overensstemmelse erklæres:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

EN IEC 62311:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020

IEC 62321-4:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Importeret af: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenien, EU

Underskrevet for og på vegne af (firmanavn): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Udstedelsessted og -dato: Shenzhen Guangdong, 28. januar 2026

Navn, funktion: Hua Zhang, direktør

Underskrift:

Stempel: