

FR : EARSCAN – MANUEL D'UTILISATION

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Fonction du produit : cure-oreille visuel sans fil

Norme réseau : IEEE 802.11b/g/n

Antenne : Antenne intégrée

Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz

Puissance de sortie RF maximale : ≤20 dBm

Vitesse de transmission : 30 images par seconde

Capteur d'image : CMOS

Température de fonctionnement : -10 °C ~ 50 °C

Capacité de la batterie : 130 mAh

Autonomie : 35 minutes

Temps de charge : ~60 min

Courant d'entrée : CC 5 V / 150 mA

Diamètre intérieur de l'objectif : 3,6 mm

Distance focale : 15 mm ~ 20 mm

Qualité d'image : HD

Capteur de gravité : 3 axes

Contenu du produit : Boîte de vente au détail, unité principale, manuel du produit, embouts auriculaires (5×), étui pour embouts auriculaires, câble de recharge USB Type-C



MÉTHODE DE TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

Recherchez **HND** dans l'App Store ou Google Play pour télécharger et installer l'application. Vous pouvez également utiliser le navigateur de votre téléphone portable pour scanner le code QR afin de télécharger et d'installer l'application.


- **iOS :** après avoir scanné le code QR, ouvrez l'App Store iOS pour télécharger et installer l'application. Vous pouvez également rechercher **HND** directement dans l'App Store.
- **Android :** après avoir scanné le code QR, ouvrez **Google Play** pour télécharger et installer l'application.



Attention : si un rappel de sécurité apparaît pendant l'installation, sélectionnez **Continuer** l'installation pour poursuivre.

CONNEXION AU SYSTÈME iOS


1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu commence à clignoter. Cela indique que l'écouteur est prêt à se connecter à l'application.
2. Appuyez sur l'**icône APP** pour ouvrir l'application.
3. Sélectionnez l'option **WLAN** et activez-la.
4. Connectez-vous au réseau Wi-Fi : **HNDEC_55-XXXXXX**.
5. Revenez à l'application pour commencer à utiliser l'appareil. Le voyant bleu passe du clignotement à une lumière fixe, indiquant que la connexion a été établie.

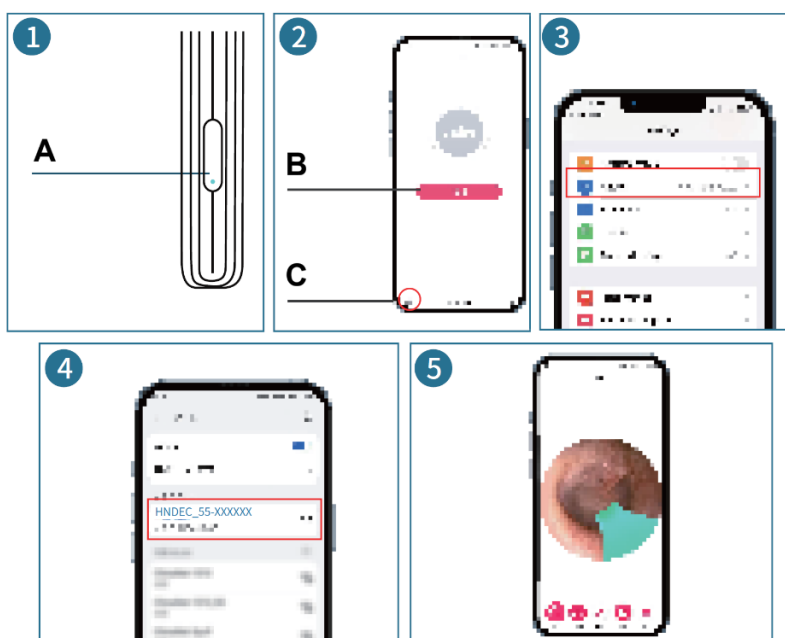

- A. Bouton d'alimentation / voyant lumineux
 - B. Cliquez pour continuer
 - C. Cliquez ici pour changer la langue
-


CONNEXION AU SYSTÈME ANDROID

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu commence à clignoter. Cela indique que l'écouteur est prêt à se connecter à l'application.
2. Appuyez sur l'**icône APP** pour ouvrir l'application.
3. Connectez-vous au réseau Wi-Fi : **HNDEC_55-XXXXXX**.
4. Revenez à l'application pour commencer à utiliser l'appareil. Le voyant bleu passe du clignotement à une lumière fixe, indiquant que la connexion a été établie.

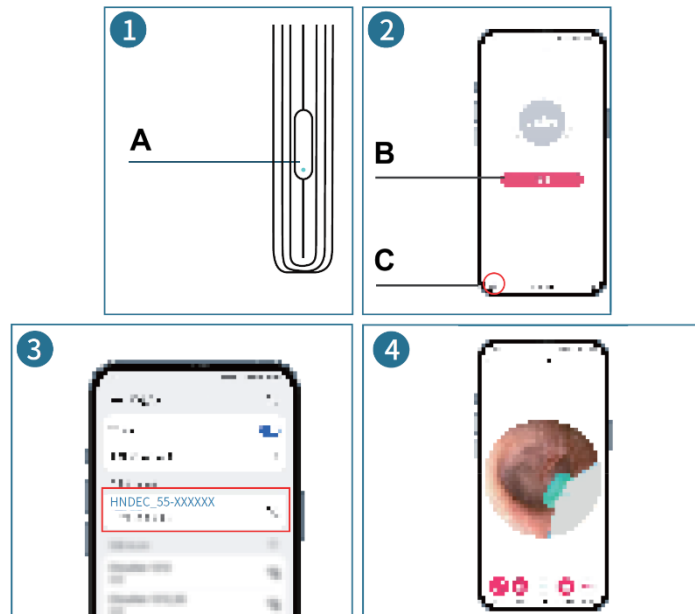

- A. Bouton d'alimentation / voyant lumineux
- B. Cliquez
- C. Cliquez ici pour changer la langue

PRÉSENTATION DE L'INTERFACE DE L'APPLICATION

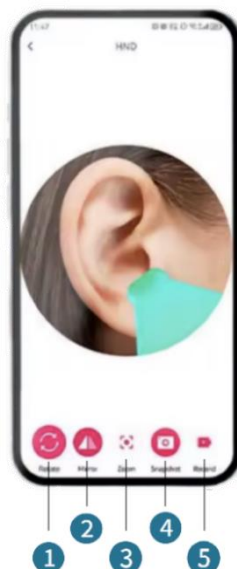

1. Faire pivoter l'image
2. Image miroir
3. Zoom
4. Prendre une photo
5. Capturer une vidéo

MODE D'EMPLOI

Fixez solidement une cuillère auriculaire en silicone propre à l'extrémité de l'appareil et allumez le cure-oreille. Une fois que l'image en direct de la caméra apparaît sur votre téléphone, insérez lentement et délicatement l'embout dans le conduit auditif tout en regardant l'écran pour vous guider. Déplacez délicatement le cure-oreille pour localiser le cérumen visible et retirez-le en effectuant des mouvements lents et contrôlés. Évitez d'insérer l'appareil trop profondément ou de toucher le tympan. Après le nettoyage, retirez l'appareil de l'oreille, éteignez-le, détachez la cuillère auriculaire et nettoyez-la avant de ranger l'appareil dans un endroit sec.

REMARQUES RELATIVES À LA SÉCURITÉ DU PRODUIT ET DE L'UTILISATEUR

1. Si l'image devient floue, nettoyez délicatement la lentille à l'aide d'un coton-tige.
2. Vérifiez toujours votre environnement avant utilisation. N'utilisez pas l'appareil lorsque quelqu'un se déplace à proximité, car cela pourrait causer des blessures accidentelles.
3. Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans.
4. Les enfants ne doivent pas utiliser ce produit seuls. Il ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte.
5. Gardez le produit hors de portée des enfants.
6. Ne plongez pas l'endoscope dans un liquide, car cela pourrait endommager l'appareil.
7. Un léger échauffement de la lentille pendant l'utilisation est normal.
8. Ce produit est destiné à un usage personnel uniquement et ne doit pas être utilisé comme équipement médical.
9. Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'écart du feu et des substances corrosives.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour vous assurer que l'appareil est éteint avant de le charger.
2. Pendant le chargement, le voyant rouge reste allumé.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant rouge s'éteint.

DÉPANNAGE

L'écran est figé

1. La distance de transmission des données est peut-être trop grande. Utilisez le produit plus près du téléphone portable.
2. La batterie est peut-être faible. Veuillez recharger l'appareil.

Le signal Wi-Fi ne peut pas être transmis ou est intermittent

1. Une batterie faible peut affaiblir le signal Wi-Fi. Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser.
2. La distance de transmission du signal Wi-Fi est peut-être dépassée. Utilisez le produit plus près du téléphone mobile.
3. Il y a peut-être trop de signaux Wi-Fi à proximité. Utilisez le produit dans une zone où il y a moins de signaux sans fil.

Aucune image n'est affichée

1. Vérifiez que le téléphone est connecté au nom de réseau Wi-Fi correct du produit.
2. Si le voyant bleu est allumé mais qu'aucune image ne s'affiche, éteignez l'application et l'appareil, puis redémarrez-les et reconnectez-vous.
3. Désactivez la **commutation intelligente du réseau** :
 - **iOS** : allez dans **Réglages** → **WLAN** → appuyez sur l'icône du réseau → désactivez la **connexion automatique**.
 - **Android** : allez dans **Paramètres** → **WLAN** → **Accélération réseau** → désactivez **Basculer entre les réseaux**.
 - **Huawei HarmonyOS** : allez dans **Paramètres** → **WLAN** → **Plus de paramètres** → **WLAN+** → désactivez **WLAN+**.
 - **Autres téléphones mobiles** : recherchez une option similaire à « **Commutation réseau intelligente** » dans les paramètres WLAN et désactivez-la.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Address: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District,
Shenzhen, China
Phone:8613122811873
Email:632814589@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: EARSCAN (NE3 wireless visible earpick)
Model no.: NE3

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Place and date of issue:Shenzhen Guangdong 28Jan2026

Name, function:Hua Zhang,Manager

Signature:

Stamp: 张华

深圳市华杰伟科技有限公司
Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

张华

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE
Conformément à la directive CE - CE

Fabricant : Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Adresse : 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District, Shenzhen, Chine
Téléphone : 8613122811873
E-mail : 632814589@qq.com

La présente déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant.

Nom du produit : EARSCAN (cure-oreille sans fil visible NE3)

Numéro de modèle : NE3

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union européenne applicable :

Directive CEM 2014/30/UE

Directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques

Directive RoHS 2011/65/UE Annexe II modifiant l'annexe (UE) 2015/863

Références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou références aux autres spécifications techniques en rapport avec lesquelles la conformité est déclarée :

EN CEI 55014-1:2021

EN CEI 55014-2:2021

EN CEI 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

EN CEI 62311:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN CEI 62368-1:2020+ A11:2020

IEC 62321-4:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Importé par : HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovénie, UE

Signé pour et au nom de (nom de la société) : Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Lieu et date de délivrance : Shenzhen Guangdong, 28 janvier 2026

Nom, fonction : Hua Zhang, directeur

Signature :

Cachet :