

GR: EARSCAN – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Λειτουργία προϊόντος: Ασύρματο οπτικό ακουστικό

Πρότυπο δικτύου: IEEE 802.11b/g/n

Κεραία: Ενσωματωμένη κεραία

Συχνότητα λειτουργίας: 2,4 GHz

Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: ≤20 dBm

Ταχύτητα μετάδοσης: 30 fps

Αισθητήρας εικόνας: CMOS

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C

Χωρητικότητα μπαταρίας: 130 mAh

Χρόνος λειτουργίας: 35 λεπτά

Χρόνος φόρτισης: ~60 λεπτά

Ρεύμα εισόδου: DC 5 V / 150 mA

Εσωτερική διάμετρος φακού: 3,6 mm

Εστιακό μήκος: 15 mm ~ 20 mm

Ποιότητα εικόνας: HD

Αισθητήρας βαρύτητας: 3 αξόνων

Περιεχόμενα προϊόντος: Κουτί λιανικής πώλησης, κύρια μονάδα, εγχειρίδιο προϊόντος, ακουστικά (5×), θήκη ακουστικών, καλώδιο φόρτισης USB Type-C



ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναζητήστε **HND** στο App Store ή στο Google Play για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης του κινητού σας τηλεφώνου για να σαρώσετε τον κωδικό QR και να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.


- **iOS:** Αφού σαρώσετε τον κωδικό QR, ανοίξτε το iOS App Store για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε **to HND** απευθείας στο App Store.
- **Android:** Αφού σαρώσετε τον κωδικό QR, ανοίξτε **to Google Play** για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.



Προσοχή: Εάν εμφανιστεί μια υπενθύμιση ασφαλείας κατά την εγκατάσταση, επιλέξτε **Συνέχεια εγκατάστασης** για να συνεχίσετε.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ iOS


1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η μπλε ενδεικτική λυχνία. Αυτό υποδεικνύει ότι το ακουστικό είναι έτοιμο για σύνδεση με την εφαρμογή.
2. Πατήστε το **εικονίδιο APP** για να ανοίξετε την εφαρμογή.
3. Επιλέξτε την επιλογή **WLAN** και ενεργοποιήστε την.
4. Συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi: **HNDEC_55-XXXXXX**.
5. Επιστρέψτε στην εφαρμογή για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Η μπλε ενδεικτική λυχνία θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει σταθερή, υποδεικνύοντας την επιτυχή σύνδεση.

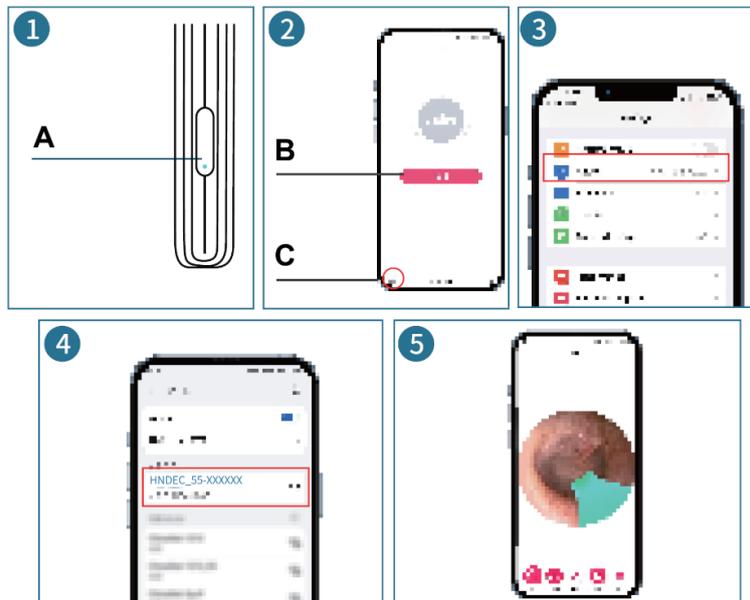

- A. Κουμπί λειτουργίας / ενδεικτική λυχνία
- B. Κάντε κλικ για να συνεχίσετε
- C. Κάντε κλικ εδώ για να αλλάξετε τη γλώσσα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ANDROID

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα μέχρι η μπλε ενδεικτική λυχνία να αρχίσει να αναβοσβήνει. Αυτό υποδηλώνει ότι το ακουστικό είναι έτοιμο για σύνδεση με την εφαρμογή.
2. Πατήστε το **εικονίδιο APP** για να ανοίξετε την εφαρμογή.
3. Συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi: **HNDEC_55-XXXXXX**.
4. Επιστρέψτε στην εφαρμογή για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Η μπλε ενδεικτική λυχνία θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει σταθερή, υποδεικνύοντας την επιτυχή σύνδεση.

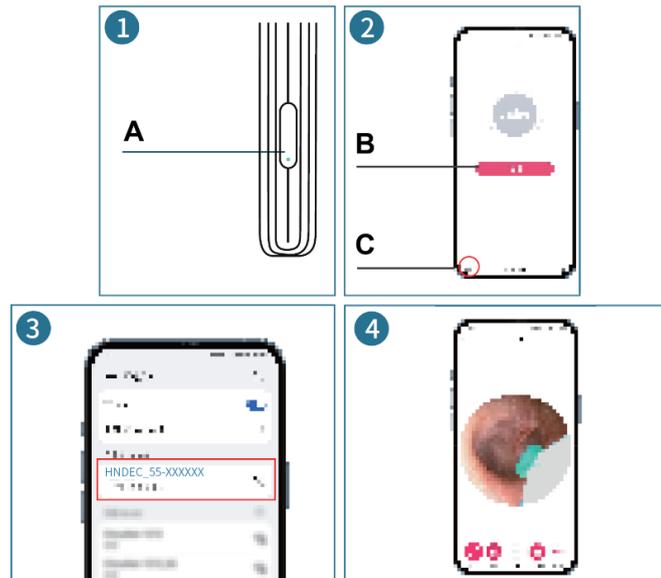

- A. Κουμπί λειτουργίας / ενδεικτική λυχνία
B. Κάντε κλικ
C. Κάντε κλικ εδώ για να αλλάξετε τη γλώσσα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



1. Περιστροφή εικόνας
2. Καθρέφτισμα εικόνας
3. Μεγέθυνση
4. Λήψη φωτογραφίας
5. Λήψη βίντεο

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Συνδέστε ένα καθαρό σιλικονούχο ακουστικό στο άκρο της συσκευής και ενεργοποιήστε το ακουστικό. Μόλις εμφανιστεί η ζωντανή εικόνα της κάμερας στο τηλέφωνό σας, εισάγετε αργά και απαλά το άκρο στο αυτί, παρακολουθώντας την οθόνη για οδηγίες. Μετακινήστε προσεκτικά το ακουστικό για να εντοπίσετε το ορατό κέρι και αφαιρέστε το με αργές, ελεγχόμενες κινήσεις. Αποφύγετε να εισάγετε τη συσκευή πολύ βαθιά ή να αγγίξετε το τύμπανο. Μετά τον καθαρισμό, αφαιρέστε τη συσκευή από το αυτί, απενεργοποιήστε την, αποσυνδέστε το ακουστικό και καθαρίστε το πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή σε ξηρό μέρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ

1. Εάν η εικόνα γίνει ασαφής, καθαρίστε προσεκτικά το φακό χρησιμοποιώντας ένα βαμβακερό στυλεό.
2. Πάντα ελέγχετε το περιβάλλον σας πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν κάποιος κινείται κοντά σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.
3. Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 5 ετών.
4. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν μόνο τους. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
5. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
6. Μην βυθίζετε το ενδοσκόπιο σε υγρό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
7. Η ελαφρά θέρμανση του φακού κατά τη χρήση είναι φυσιολογική.
8. Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική φροντίδα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως ιατρικός εξοπλισμός.
9. Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από φωτιά και διαβρωτικές ουσίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν από τη φόρτιση.
2. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η οθόνη έχει «παγώσει»

1. Η απόσταση μετάδοσης δεδομένων ενδέχεται να είναι πολύ μεγάλη. Χρησιμοποιήστε το προϊόν πιο κοντά στο κινητό τηλέφωνο.
2. Η μπαταρία μπορεί να είναι χαμηλή. Φορτίστε ξανά τη συσκευή.

Το σήμα Wi-Fi δεν μπορεί να μεταδοθεί ή είναι διακοπτόμενο

1. Η χαμηλή ισχύς της μπαταρίας μπορεί να εξασθενήσει το σήμα Wi-Fi. Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από τη χρήση.
2. Η απόσταση μετάδοσης του σήματος Wi-Fi ενδέχεται να έχει ξεπεραστεί. Χρησιμοποιήστε το προϊόν πιο κοντά στο κινητό τηλέφωνο.
3. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά σήματα Wi-Fi στην περιοχή. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε περιοχή με λιγότερα ασύρματα σήματα.

Δεν εμφανίζεται εικόνα

1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο σωστό όνομα δικτύου Wi-Fi του προϊόντος.
2. Εάν η μπλε ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη αλλά δεν εμφανίζεται εικόνα, απενεργοποιήστε τόσο την εφαρμογή όσο και τη συσκευή, στη συνέχεια επανεκκινήστε τις και επανασυνδέστε τις.
3. Απενεργοποιήστε **την έξυπνη εναλλαγή δικτύου**:
 - **iOS:** Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** → **WLAN** → πατήστε το εικονίδιο δικτύου → **απενεργοποιήστε την αυτόματη σύνδεση**.
 - **Android:** Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** → **WLAN** → **Επιτάχυνση δικτύου** → **απενεργοποιήστε την επιλογή Εναλλαγή μεταξύ δικτύων**.
 - **Huawei HarmonyOS:** Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** → **WLAN** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **WLAN+** → **απενεργοποιήστε το WLAN+**.
 - **Άλλα κινητά τηλέφωνα:** Αναζητήστε μια επιλογή παρόμοια με **την Έξυπνη εναλλαγή δικτύου** στις ρυθμίσεις WLAN και απενεργοποιήστε την.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Address: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District,
Shenzhen, China
Phone:8613122811873
Email:632814589@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: EARSCAN (NE3 wireless visible earpick)
Model no.: NE3

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Place and date of issue: Shenzhen Guangdong 28Jan2026

Name, function: Hua Zhang, Manager

Signature:

Stamp: 张华

深圳市华杰伟科技有限公司
Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

张华

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ
Σύμφωνα με την οδηγία ΕΚ - CE

Κατασκευαστής: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Διεύθυνση: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District, Shenzhen, Κίνα
Τηλέφωνο: 8613122811873
Email: 632814589@qq.com

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Όνομα προϊόντος: EARSCAN (NE3 ασύρματο ορατό ακουστικό)

Αριθμός μοντέλου: NE3

Το αντικείμενο της παραπάνω δήλωσης είναι σύμφωνο με τη σχετική νομοθεσία εναρμόνισης της Ένωσης:

Οδηγία 2014/30/ΕΕ για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

Οδηγία 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό

Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ Παράρτημα II που τροποποιεί το Παράρτημα (ΕΕ) 2015/863

Αναφορές στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ή αναφορές σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

EN IEC 62311:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020

IEC 62321-4:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Εισαγωγέας: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Σλοβενία, ΕΕ

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος (επωνυμία εταιρείας): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Shenzhen Guangdong, 28 Ιανουαρίου 2026

Όνομα, θέση: Hua Zhang, Διευθυντής

Υπογραφή:

Σφραγίδα: