

HR: EARSCAN – KORISNIČKI PRIRUČNIK

PARAMETRI PROIZVODA

Funkcija proizvoda: Bežični vizualni čistač uha

Mrežni standard: IEEE 802.11b/g/n

Antena: Ugrađena antena

Radna frekvencija: 2.4 GHz

Maksimalna RF izlazna snaga: ≤20 dBm

Brzina prijenosa: 30 fps

Senzor slike: CMOS

Radna temperatura: -10 °C ~ 50 °C

Kapacitet baterije: 130 mAh

Vrijeme rada: 35 minuta

Vrijeme punjenja: ~60 min

Ulazna struja: DC 5 V / 150 mA

Unutarnji promjer leće: 3.6 mm

Fokalna duljina: 15 mm ~ 20 mm

Kvaliteta slike: HD

Senzor gravitacije: 3-osni

Sadržaj pakiranja: Maloprodajna kutija, glavni uređaj, korisnički priručnik, nastavci za uši (5×), spremnik za nastavke, USB Type-C kabel za punjenje



NAČIN PREUZIMANJA APLIKACIJE

Search Potražite **HND** u App Storeu ili Google Play trgovini kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju. Također možete koristiti preglednik na mobilnom telefonu za skeniranje QR koda kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju.

- **iOS:** Nakon skeniranja QR koda otvorite iOS App Store kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju. Aplikaciju također možete pronaći pretraživanjem naziva **HND** u App Storeu.

- **Android:** Nakon skeniranja QR koda otvorite Google Play kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju.




Napomena: Ako se tijekom instalacije pojavi sigurnosno upozorenje, odaberite **Nastavi instalaciju**.

POVEZIVANJE S iOS SUSTAVOM

Pritisnite i držite gumb za uključivanje 2 sekunde dok plava indikatorska lampica ne počne treptati. To znači da je uređaj spreman za povezivanje s aplikacijom. Tap the **APP icon** to open the application.


1. Dodirnite ikonu aplikacije kako biste je otvorili.
2. Odaberite opciju WLAN i omogućite je.
3. Povežite se na Wi-Fi mrežu: **HNDEC_55-XXXXXX**
4. Vratite se u aplikaciju kako biste počeli koristiti uređaj. Plava lampica promijenit će se iz treptajuće u stalno svjetlo, što označava uspješno povezivanje.

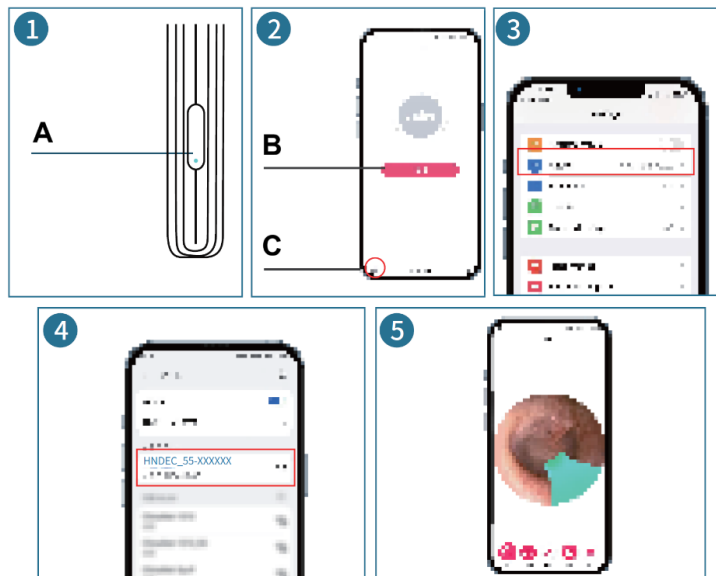

- A. Gumb za uključivanje / indikatorska lampica
 - B. Kliknite za nastavak
 - C. Kliknite ovdje za promjenu jezika
-

POVEZIVANJE S ANDROID SUSTAVOM

1. Pritisnite i držite gumb za uključivanje 2 sekunde dok plava indikatorska lampica ne počne treptati. To znači da je uređaj spreman za povezivanje s aplikacijom.
2. Dodirnite ikonu aplikacije kako biste je otvorili.
3. Povežite se na Wi-Fi mrežu: **HNDEC_55-XXXXXX**
4. Vratite se u aplikaciju kako biste počeli koristiti uređaj. Plava lampica promijenit će se iz treptajuće u stalno svjetlo, što označava uspješno povezivanje.

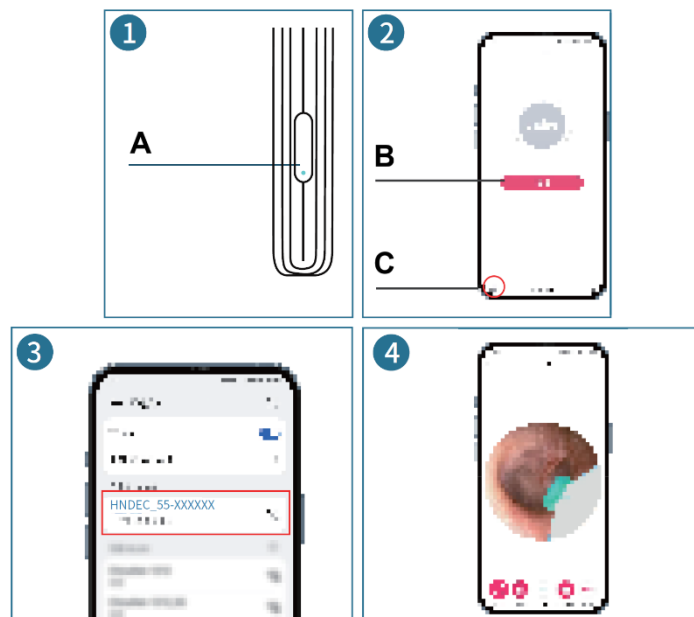

- A. Gumb za uključivanje / indikatorska lampica
B. Kliknite
C. Kliknite ovdje za promjenu jezika

PREGLED SUČELJA APLIKACIJE



1. Rotiranje slike
2. Zrcaljenje slike
3. Povećanje
4. Snimanje fotografije
5. Snimanje videa

KAKO KORISTITI

Pričvrstite čisti silikonski nastavak za uho na vrh uređaja i uključite uređaj. Kada se na telefonu pojavi prikaz kamere uživo, polako i nježno umetnite vrh u ušni kanal dok promatrate zaslon radi lakšeg navođenja. Pažljivo pomičite uređaj kako biste pronašli vidljivi ušni vosak i uklonili ga sporim i kontroliranim pokretima. Izbjegavajte umetanje uređaja preduboko ili dodirivanje bubnjića. Nakon čišćenja izvadite uređaj iz uha, isključite ga, uklonite nastavak i očistite ga prije spremanja uređaja na suho mjesto.

NAPOMENE O SIGURNOSTI PROIZVODA I KORISNIKA

1. Ako slika postane nejasna, pažljivo očistite leću pamučnim štapićem.
2. Prije korištenja uvijek provjerite okolinu. Nemojte koristiti uređaj ako se netko u blizini kreće jer može doći do slučajne ozljede.
3. Ovaj proizvod nije prikladan za djecu mlađu od 5 godina.
4. Djeca ne smiju koristiti proizvod sama. Proizvod se smije koristiti samo uz nadzor odrasle osobe.
5. Držite proizvod izvan dohvata djece.
6. Nemojte uranjati endoskop u tekućinu jer to može oštetiti uređaj.
7. Lagano zagrijavanje leće tijekom uporabe je normalno.
8. Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za osobnu njegu i ne smije se koristiti kao medicinska oprema.
9. Čuvajte proizvod na hladnom i suhom mjestu, daleko od vatre i korozivnih tvari.

UPUTE ZA PUNJENJE

1. Pritisnite i držite gumb za uključivanje kako biste provjerili da je uređaj isključen prije punjenja.
2. Tijekom punjenja crvena indikatorska lampica ostat će uključena.
3. Kada je baterija potpuno napunjena, crvena indikatorska lampica će se ugasi.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Zaslon je zamrznut

1. Udaljenost prijenosa podataka može biti prevelika. Koristite uređaj bliže mobilnom telefonu.
2. Razina baterije može biti niska. Molimo ponovno napunite uređaj.

Wi-Fi signal se ne može prenijeti ili je nestabilan

1. Niska razina baterije može oslabiti Wi-Fi signal. Potpuno napunite uređaj prije uporabe.
2. Udaljenost prijenosa Wi-Fi signala može biti prekoračena. Koristite uređaj bliže mobilnom telefonu.
3. U blizini može biti previše Wi-Fi signala. Koristite uređaj u području s manje bežičnih signala.

Nema prikazane slike

1. Provjerite je li telefon povezan na ispravan naziv Wi-Fi mreže proizvođača.
2. Ako je plavo indikatorsko svjetlo uključeno, ali nema prikaza slike, isključite aplikaciju i uređaj, zatim ih ponovno pokrenite i ponovno povežite.
3. Isključite **Inteligentno prebacivanje mreže**:
 - **iOS**: Idite na **Postavke** → **WLAN** → dodirnite ikonu mreže → isključite **Auto-Join**.
 - **Android**: Idite na **Postavke** → **WLAN** → **Network Acceleration** → isključite **Switch Between Networks**.
 - **Huawei HarmonyOS**: Idite na **Postavke** → **WLAN** → **More Settings** → **WLAN+** → isključite **WLAN+**.
 - **Ostali mobilni telefoni**: Potražite opciju sličnu **Smart Network Switching** u WLAN postavkama i isključite je.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Address: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District,
Shenzhen, China
Phone:8613122811873
Email:632814589@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: EARSCAN (NE3 wireless visible earpick)
Model no.: NE3

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Place and date of issue: Shenzhen Guangdong 28Jan2026

Name, function: Hua Zhang, Manager

Signature:

Stamp: 张华

深圳市华杰伟科技有限公司
Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

张华

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI
Prema EC Direktivi – CE

Proizvođač: Shenzhen HualieWei Technology Co., LTD
Adresa: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District, Shenzhen, Kina
Telefon: 8613122811873
Email: 632814589@qq.com

Ova izjava o sukladnosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača.

Naziv proizvoda: EARSCAN (NE3 bežični vizualni čistač uha)
Model br.: NE3

Predmet gore opisane izjave u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Europske unije:

EMC Direktiva 2014/30/EU

Direktiva o radijskoj opremi 2014/53/EU

RoHS Direktiva 2011/65/EU Prilog II kojim se mijenja Prilog (EU) 2015/863

Reference na relevantne harmonizirane standarde ili druge tehničke specifikacije na temelju kojih se izjavljuje sukladnost:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Uvoznik: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenija, EU

Potpisano za i u ime (naziv tvrtke): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD
Mjesto i datum izdavanja: Shenzhen Guangdong, 28. siječnja 2026
Ime, funkcija: Hua Zhang, Menadžer
Potpis:
Pečat: