

IT: EARSCAN – MANUALE D'USO

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Funzione del prodotto: Pulitore auricolare visivo wireless

Standard di rete: IEEE 802.11b/g/n

Antenna: Antenna integrata

Frequenza di lavoro: 2.4 GHz

Potenza massima di uscita RF: ≤20 dBm

Velocità di trasmissione: 30 fps

Sensore immagine: CMOS

Temperatura di lavoro: -10 °C ~ 50 °C

Capacità della batteria: 130 mAh

Tempo di funzionamento: 35 minuti

Tempo di ricarica: ~60 min

Corrente di ingresso: DC 5 V / 150 mA

Diametro interno della lente: 3.6 mm

Lunghezza focale: 15 mm ~ 20 mm

Qualità dell'immagine: HD

Sensore di gravità: 3 assi

Contenuto del prodotto: Confezione di vendita, unità principale, manuale del prodotto, punte auricolari (5x), contenitore per punte auricolari, cavo di ricarica USB Type-C



METODO DI DOWNLOAD DELL'APP

Cerca **HND** su App Store o Google Play per scaricare e installare l'applicazione. Puoi anche utilizzare il browser del tuo telefono per scansionare il codice QR per scaricare e installare l'app.

- **iOS:** Dopo aver scansionato il codice QR, apri l'App Store iOS per scaricare e installare l'applicazione. Puoi anche cercare direttamente **HND** nell'App Store.
- **Android:** Dopo aver scansionato il codice QR, apri Google Play per scaricare e installare l'applicazione.




Attenzione: Se durante l'installazione appare un avviso di sicurezza, seleziona **Continue Installation** per procedere.

CONNESSIONE AL SISTEMA i

Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi finché la spia blu non inizia a lampeggiare. Questo indica che il dispositivo è pronto per connettersi all'app.


1. Tocca l'icona dell'app per aprirla.
2. Seleziona l'opzione **WLAN** e attivala.
3. Connettiti alla rete Wi-Fi: **HNDEC_55-XXXXXX**.
4. Torna all'app per iniziare a usare il dispositivo. La luce blu passerà da lampeggiante a fissa, indicando una connessione riuscita.

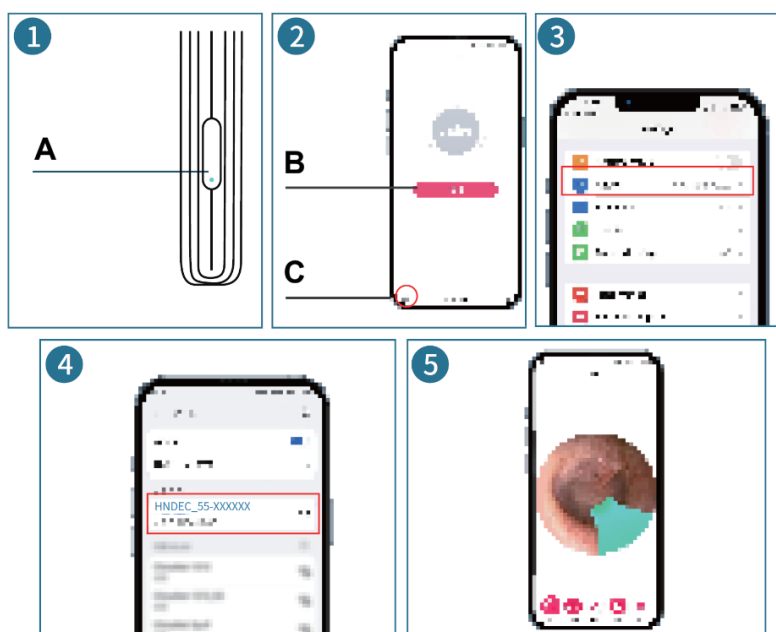

- A. Pulsante di accensione / indicatore luminoso
- B. Clicca per continuare
- C. Clicca qui per cambiare lingua

CONNESSIONE AL SISTEMA ANDROID

1. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi finché la spia blu non inizia a lampeggiare. Questo indica che il dispositivo è pronto per connettersi all'app.
2. Tocca l'icona dell'app per aprirla.
3. Connettiti alla rete Wi-Fi: **HNDEC_55-XXXXXX**.
4. Torna all'app per iniziare a usare il dispositivo. La luce blu passerà da lampeggiante a fissa, indicando una connessione riuscita.

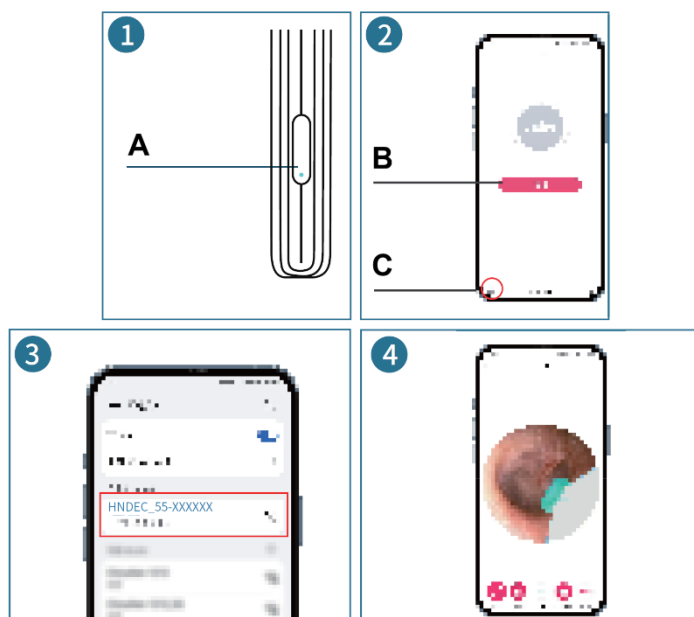

- A. Pulsante di accensione / indicatore luminoso
- B. Clicca
- C. Clicca qui per cambiare lingua

PANORAMICA DELL'INTERFACCIA DELL'APP



1. Ruota immagine
2. Immagine speculare
3. Zoom
4. Scatta foto
5. Registra video

COME UTILIZZARE

Fissa una punta auricolare in silicone pulita alla punta del dispositivo e accendi il dispositivo. Quando la visualizzazione in tempo reale della fotocamera appare sul telefono, inserisci lentamente e con delicatezza la punta nel canale uditivo seguendo lo schermo per orientarti. Muovi con attenzione il dispositivo per individuare il cerume visibile e rimuoverlo con movimenti lenti e controllati. Evita di inserire il dispositivo troppo in profondità o di toccare il timpano. Dopo la pulizia, rimuovi il dispositivo dall'orecchio, spegnilo, stacca la punta auricolare e puliscila prima di riporre il dispositivo in un luogo asciutto.

NOTE DI SICUREZZA PER IL PRODOTTO E L'UTENTE

1. Se l'immagine diventa poco chiara, pulisci delicatamente la lente con un cotton fioc.
2. Controlla sempre l'ambiente circostante prima dell'uso. Non usare il dispositivo se qualcuno vicino a te si sta muovendo, poiché potrebbe causare lesioni accidentali.
3. Questo prodotto non è adatto ai bambini sotto i 5 anni.
4. I bambini non devono usare questo prodotto da soli. Deve essere utilizzato solo sotto la supervisione di un adulto.
5. Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
6. Non immergere l'endoscopio in liquidi, poiché ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
7. Un leggero riscaldamento della lente durante l'uso è normale.
8. Questo prodotto è destinato solo alla cura personale e non deve essere utilizzato come dispositivo medico.
9. Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fuoco e sostanze corrosive.

ISTRUZIONI DI RICARICA

1. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per assicurarti che il dispositivo sia spento prima della ricarica.
2. Durante la ricarica, la spia rossa rimarrà accesa.
3. Quando la batteria è completamente carica, la spia rossa si spegnerà.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Lo schermo è bloccato

1. La distanza di trasmissione dei dati potrebbe essere troppo grande. Usa il prodotto più vicino al telefono.
2. Il livello della batteria potrebbe essere basso. Ricarica il dispositivo.

Il segnale Wi-Fi non può essere trasmesso o è intermittente

1. Una batteria scarica può indebolire il segnale Wi-Fi. Carica completamente il dispositivo prima dell'uso.
2. La distanza di trasmissione del segnale Wi-Fi potrebbe essere stata superata. Usa il prodotto più vicino al telefono.
3. Potrebbero esserci troppi segnali Wi-Fi nelle vicinanze. Usa il prodotto in un'area con meno segnali wireless.

Nessuna immagine visualizzata

1. Conferma che il telefono sia connesso al nome corretto della rete Wi-Fi del prodotto.
2. Se la spia blu è accesa ma non viene visualizzata alcuna immagine, spegni sia l'app che il dispositivo, poi riavviali e riconnettiti.
3. Disattiva **Intelligent Network Switching**
 - **iOS:** Vai su Settings → WLAN → tocca l'icona della rete → disattiva Auto-Join.
 - **Android:** Vai su Settings → WLAN → Network Acceleration → disattiva Switch Between Networks.
 - **Huawei HarmonyOS:** Vai su Settings → WLAN → More Settings → WLAN+ → disattiva WLAN+.
 - **Altri telefoni:** Cerca un'opzione simile a Smart Network Switching nelle impostazioni WLAN e disattivala.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Address: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District,
Shenzhen, China
Phone:8613122811873
Email:632814589@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: EARSCAN (NE3 wireless visible earpick)
Model no.: NE3

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Place and date of issue: Shenzhen Guangdong 28Jan2026

Name, function: Hua Zhang, Manager

Signature:

Stamp: 张华

深圳市华杰伟科技有限公司
Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

张华

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
Secondo la Direttiva CE – CE

Produttore: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

Indirizzo: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District, Shenzhen, China

Telefono: 8613122811873

Email: 632814589@qq.com

Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

Nome del prodotto: EARSCAN (NE3 pulitore auricolare visivo wireless)

Modello n.: NE3

L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alla normativa di armonizzazione pertinente dell'Unione Europea:

Direttiva EMC 2014/30/EU

Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/EU

Direttiva RoHS 2011/65/EU Allegato II che modifica l'Allegato (EU) 2015/863

Riferimenti agli standard armonizzati pertinenti utilizzati o ad altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

EN IEC 62311:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020

IEC 62321-4:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Importato da: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Firmato per e a nome di (nome della società): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Luogo e data di rilascio: Shenzhen Guangdong, 28 Jan 2026

Nome, funzione: Hua Zhang, Manager

Firma:

Timbro: