

LT: EARSCAN – NAUDOJIMO VADOVAS

PRODUKTO PARAMETRAI

Produkto funkcija: belaidis vizualus ausų valiklis

Tinklo standartas: IEEE 802.11b/g/n

Antena: įmontuota antena

Darbinis dažnis: 2,4 GHz

Maksimali RF išėjimo galia: ≤20 dBm

Perdavimo greitis: 30 kadrų per sekundę

Vaizdo jutiklis: CMOS

Darbinė temperatūra: -10 °C ~ 50 °C

Baterijos talpa: 130 mAh

Darbo laikas: 35 minutės

Įkrovimo laikas: ~60 min

Įėjimo srovė: DC 5 V / 150 mA

Objektyvo vidinis skersmuo: 3,6 mm

Fokuso nuotolis: 15 mm ~ 20 mm

Vaizdo kokybė: HD

Gravitacijos jutiklis: 3 ašis

Produkto turinys: mažmeninė dėžutė, pagrindinis įrenginys, produkto instrukcija, ausų krapštukai (5 vnt.), ausų krapštukų dėžutė, USB Type-C įkrovimo kabelis



APLIKACIJOS ATSISIŪSTYMO BŪDAS

Ieškokite **HND** „App Store“ arba „Google Play“ parduotuvėse, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programą. Taip pat galite naudoti savo mobiliojo telefono naršyklę, kad nuskaitytumėte QR kodą ir atsisiųstumėte bei įdiegtumėte programą.


- **iOS:** nuskenavę QR kodą, atidarykite „iOS App Store“, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programą. Taip pat galite ieškoti „**HND**“ tiesiogiai „App Store“.
- **„Android“:** nuskenavę QR kodą, atidarykite „**Google Play**“, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programą.



Dėmesio: jei diegimo metu pasirodo saugumo priminimas, pasirinkite „Tęsti diegimą“, kad galėtumėte tęsti.

„iOS“ SISTEMOS PRIJUNGIMAS


1. Paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką 2 sekundes, kol pradės mirgėti mėlyna indikatorinė lemputė. Tai reiškia, kad ausų krapštukas yra pasirengęs prisijungti prie programos.
2. Bakstelėkite **programos piktogramą**, kad atidarytumėte programą.
3. Pasirinkite „**WLAN**“ parinktį ir ją įjunkite.
4. Prisijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo: **HNDEC_55-XXXXXX**.
5. Grįžkite į programėlę, kad pradėtumėte naudoti įrenginį. Mėlyna lemputė nustos mirgėti ir švies nuolat, rodydama, kad ryšys užmegztas sėkmingai.

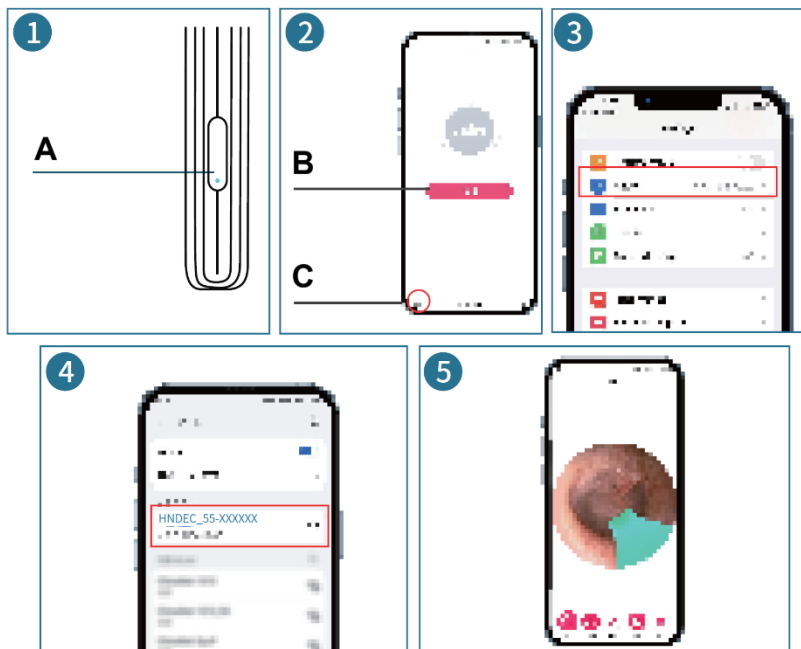

- A. Įjungimo mygtukas / indikatorius
- B. Spustelėkite, kad tęstumėte
- C. Spustelėkite čia, kad pakeistumėte kalbą

„ANDROID“ SISTEMOS PRISIJUNGIMAS

1. Paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką 2 sekundes, kol mėlyna indikatorinė lemputė pradės mirgėti. Tai reiškia, kad ausų krapštukas yra pasirengęs prisijungti prie programėlės.
2. Bakstelėkite **programėlės piktogramą**, kad atidarytumėte programėlę.
3. Prisijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo: **HNDEC_55-XXXXXX**.
4. Grįžkite į programėlę, kad pradėtumėte naudoti įrenginį. Mėlyna lemputė nustos mirgėti ir švies nuolat, rodydama, kad ryšys užmegztas sėkmingai.

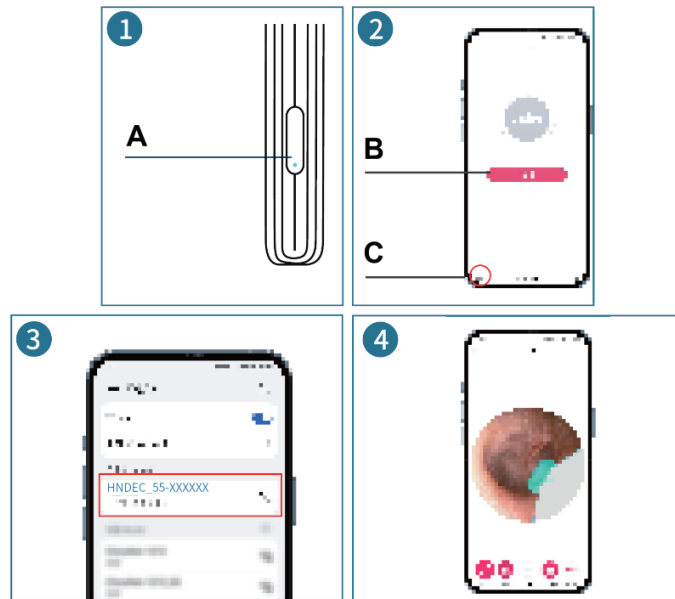

- A. Įjungimo mygtukas / indikatorius
B. Spustelėkite
C. Spustelėkite čia, kad pakeistumėte kalbą

APLIKACIJOS SĄSAJOS APŽVALGA



1. Pasukti vaizdą
2. Veidrodinis vaizdas
3. Padidinti
4. Fotografuoti
5. Įrašyti vaizdo įrašą

KAIP NAUDOTI

Pritvirtinkite švarų silikoninį ausies kaušėlį prie prietaiso galo ir įjunkite ausų valymo prietaisą. Kai telefone pasirodys tiesioginis kameros vaizdas, lėtai ir atsargiai įkiškite galą į ausies kanalą, stebėdami ekraną, kad gautumėte nurodymus. Atsargiai judinkite ausų valymo įrankį, kad surastumėte matomą ausų sierą, ir pašalinkite ją lėtais, kontroliuojamais judesiais. Neverskite prietaiso per giliai ir nelieskite ausies būgnelio. Po valymo išimkite prietaisą iš ausies, išjunkite jį, nuimkite ausų kaušėlį ir išvalykite jį prieš laikydami prietaisą sausoje vietoje.

PRODUKTO IR NAUDOTOJO SAUGOS PASTABOS

1. Jei vaizdas tampa neryškus, atsargiai nuvalykite objektyvą vatos tamponu.
2. Prieš naudodami visada patikrinkite aplinką. Nenaudokite prietaiso, kai šalia yra judantys žmonės, nes tai gali sukelti netyčinius sužalojimus.
3. Šis produktas netinka vaikams iki 5 metų.
4. Vaikai neturi naudoti šio produkto vieni. Jis turi būti naudojamas tik prižiūrint suaugusiems.
5. Laikykite produktą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
6. Negalima panardinti endoskopo į skystį, nes tai gali sugadinti prietaisą.
7. Lęšio šiek tiek įkaistimas naudojimo metu yra normalu.
8. Šis produktas skirtas tik asmeninei priežiūrai ir neturi būti naudojamas kaip medicininė įranga.
9. Laikykite produktą vėsioje, sausoje vietoje, toliau nuo ugnies ir šildančių medžiagų.

ĮKROVIMO INSTRUKCIJOS

1. Prieš įkraunant įrenginį, paspauskite ir laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką, kad įsitikintumėte, jog įrenginys yra išjungtas.
2. Įkrovimo metu raudona indikatorinė lemputė bus įjungta.
3. Kai baterija bus visiškai įkrauta, raudona indikatorinė lemputė išsijungs.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Ekranas užstrigo

1. Duomenų perdavimo atstumas gali būti per didelis. Naudokite produktą arčiau mobiliojo telefono.
2. Baterijos įkrova gali būti per maža. Įkraukite įrenginį.

Wi-Fi signalas neperduodamas arba yra pertraukiamas

1. Mažas akumuliatoriaus įkrovos lygis gali susilpninti „Wi-Fi“ signalą. Prieš naudodami įrenginį, jį visiškai įkraukite.
2. Wi-Fi signalo perdavimo atstumas gali būti viršytas. Naudokite produktą arčiau mobiliojo telefono.

3. Gali būti per daug „Wi-Fi“ signalų netoliese. Naudokite produktą vietoje, kurioje yra mažiau belaidžių signalų.

Nerodomas vaizdas

1. Patikrinkite, ar telefonas yra prijungtas prie teisingo produkto Wi-Fi tinklo pavadinimo.
2. Jei mėlina indikatorinė lemputė dega, bet vaizdas nerodomas, išjunkite programėlę ir įrenginį, tada paleiskite juos iš naujo ir vėl prisijunkite.
3. Išjunkite **pažangų tinklo perjungimą**:
 - **iOS**: Eikite į **Nustatymai** → **WLAN** → bakstelėkite tinklo piktogramą → išjunkite **Automatinis prisijungimas**.
 - **„Android“**: Eikite į **„Nustatymai“** → **„WLAN“** → **„Tinklo pagreitinimas“** → išjunkite **„Perjungti tarp tinklų“**.
 - **„Huawei HarmonyOS“**: Eikite į **„Nustatymai“** → **„WLAN“** → **„Daugiau nustatymų“** → **„WLAN+“** → išjunkite **„WLAN+“**.
 - **Kiti mobilieji telefonai**: WLAN nustatymuose ieškokite parinktį, panašią į **„Smart Network Switching“ (Pažangus tinklo perjungimas)**, ir ją išjunkite.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Address: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District,
Shenzhen, China
Phone:8613122811873
Email:632814589@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: EARSCAN (NE3 wireless visible earpick)
Model no.: NE3

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Place and date of issue: Shenzhen Guangdong 28Jan2026

Name, function: Hua Zhang, Manager

Signature:

Stamp: 张华

深圳市华杰伟科技有限公司
Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

张华

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Pagal EB direktyvą – CE

Gamintojas: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

Adresas: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District, Shenzhen, Kinija

Telefonas: 8613122811873

El. paštas: 632814589@qq.com

Ši atitikties deklaracija išduodama gamintojo atsakomybe.

Produkto pavadinimas: EARSCAN (NE3 belaidis matomas ausų krapštukas)

Modelio numeris: NE3

Aukščiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka atitinkamus Sąjungos suderinimo teisės aktus:

EMC direktyva 2014/30/ES

Radijo ryšio įrangos direktyva 2014/53/ES

RoHS direktyva 2011/65/ES II priedas, iš dalies keičiantis priedą (ES) 2015/863

Nuorodos į atitinkamus naudotus suderintus standartus arba nuorodos į kitas technines specifikacijas, kurių atitiktis yra deklaruojama:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

EN IEC 62311:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020

IEC 62321-4:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Importuotojas: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovėnija, ES

Pasirašė ir vardu (įmonės pavadinimas): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Išdavimo vieta ir data: Shenzhen Guangdong, 2026 m. sausio 28 d.

Vardas, pavardė, pareigos: Hua Zhang, vadybininkas

Parašas:

Antspaudas: