

LV: EARSCAN – LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

PRODUKTA PARAMETRI

Produkta funkcija: bezvadu vizuālais ausu tīrītājs

Tīkla standarts: IEEE 802.11b/g/n

Antena: iebūvēta antena

Darba frekvence: 2,4 GHz

Maksimālā RF izejas jauda: ≤20 dBm

Pārraidē ātrums: 30 fps

Attēla sensors: CMOS

Darba temperatūra: -10 °C ~ 50 °C

Akumulatora jauda: 130 mAh

Darba laiks: 35 minūtes

Uzlādes laiks: ~60 min

Ieejas strāva: DC 5 V / 150 mA

Objektīva iekšējais diametrs: 3,6 mm

Fokusa attālums: 15 mm ~ 20 mm

Attēla kvalitāte: HD

Gravitācijas sensors: 3 ass

Produkta saturs: mazumtirdzniecības iepakojums, galvenā vienība, produkta rokasgrāmata, ausu tīrītāji (5x), ausu tīrītāju konteiners, USB Type-C uzlādes kabelis



APP LEJUPIELĀDES METODE

Meklējiet **HND** App Store vai Google Play, lai lejupielādētu un instalētu lietotni. Jūs varat arī izmantot savu mobilo tālruna pārlūku, lai ieskenētu QR kodu un lejupielādētu un instalētu lietotni.


- **iOS:** Pēc QR koda skenēšanas atveriet iOS App Store, lai lejupielādētu un instalētu lietotni. Jūs varat arī meklēt **HND** tieši App Store.
- **Android:** Pēc QR koda skenēšanas atveriet **Google Play**, lai lejupielādētu un instalētu lietotni.



Uzmanību: ja instalācijas laikā parādās drošības atgādinājums, izvēlieties **Continue Installation (Turpināt instalāciju)**, lai turpinātu.

iOS SISTĒMAS SAVIENOJUMS


1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 2 sekundes, līdz sāk mirgot zils indikatorgaismas signāls. Tas norāda, ka ausu pīkstulis ir gatavs savienoties ar lietotni.
2. Pieskarieties **APP ikonai**, lai atvērtu lietotni.
3. Izvēlieties **WLAN** opciju un aktivizējiet to.
4. Savienojieties ar Wi-Fi tīklu: **HNDEC_55-XXXXXX**.
5. Atgriezieties lietotnē, lai sāktu izmantot ierīci. Zilā gaisma mainīsies no mirgojošas uz nemirgojošu, norādot, ka savienojums ir izveidots veiksmīgi.

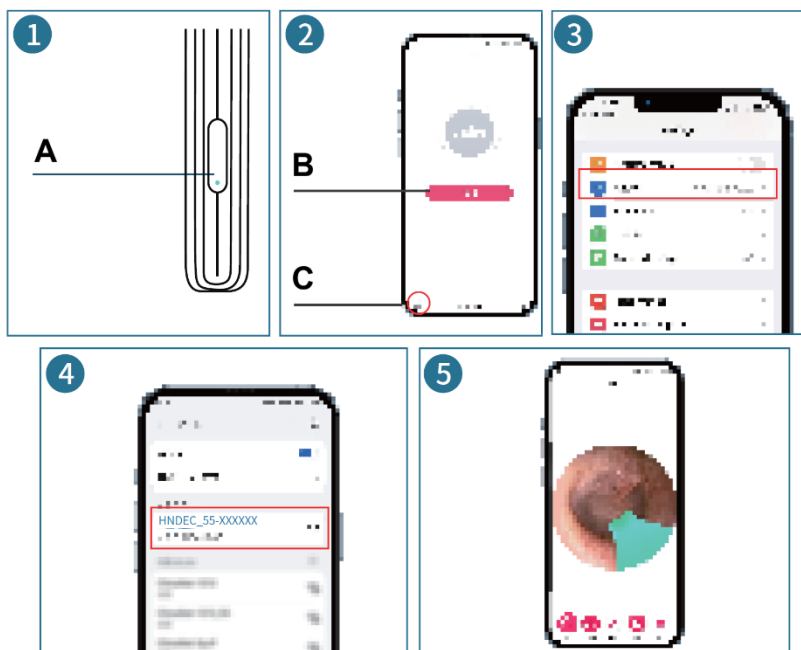

- A. Ieslēgšanas pogas / indikatorgaismas
 - B. Noklikšķiniet, lai turpinātu
 - C. Noklikšķiniet šeit, lai mainītu valodu
-

ANDROID SISTĒMAS SAVIENOJUMS

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 2 sekundes, līdz zils indikatorgaismas signāls sāk mirgot. Tas norāda, ka ausu tīrītājs ir gatavs savienoties ar lietotni.
2. Pieskarieties **lietotnes ikonai**, lai atvērtu lietotni.
3. Savienojieties ar Wi-Fi tīklu: **HNDEC_55-XXXXXX**.
4. Atgriezieties lietotnē, lai sāktu izmantot ierīci. Zilā gaisma mainīsies no mirgojošas uz nemirgojošu, norādot, ka savienojums ir izveidots veiksmīgi.

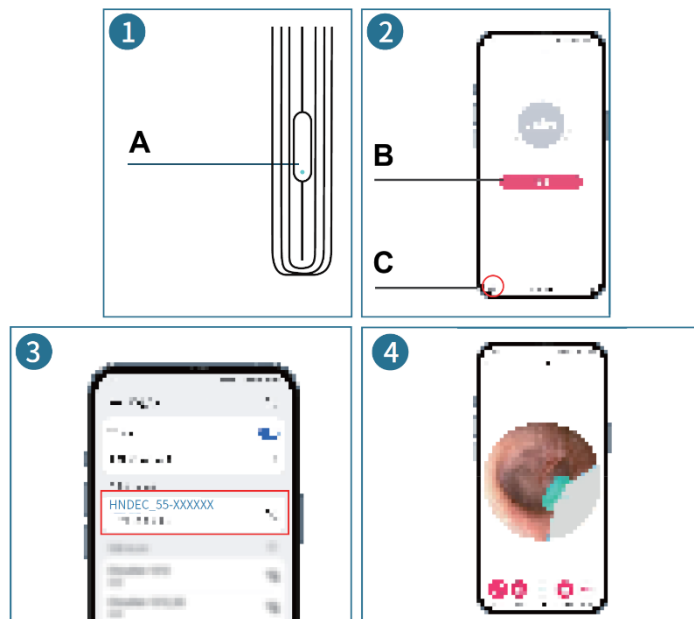

- A. Ieslēgšanas pogas / indikatorgaismas
- B. Noklikšķiniet
- C. Noklikšķiniet šeit, lai mainītu valodu

LIETOJUMPROGRAMMAS INTERFEISA PĀRSKATS



1. Pagriezt attēlu
2. Spoguļattēls
3. Tuvināt
4. Uzņemt fotoattēlu
5. Video uzņemšana

KĀ LIETOT

Pievienojiet tīru silikona ausu kausu ierīces galam un ieslēdziet ausu tīrītāju. Kad jūsu tālrunī parādās kameras attēls, lēnām un uzmanīgi ievietojiet galviņu ausu kanālā, sekojot norādēm ekrānā. Uzmanīgi pārvietojiet ausu tīrītāju, lai atrastu redzamo ausu vasku, un noņemiet to ar lēniem, kontrolētiem kustībām. Izvairieties no ierīces pārāk dziļas ievietošanas vai bungādiņas pieskāriena. Pēc tīrīšanas izņemiet ierīci no auss, izslēdziet to, noņemiet ausu tīrītāju un notīriet to, pirms ierīci uzglabājat sausā vietā.

PRODUKTA UN LIETOTĀJA DROŠĪBAS NORĀDES

1. Ja attēls kļūst neskaidrs, uzmanīgi notīriet objektīvu ar vates tamponu.
2. Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet apkārtni. Nelietojiet ierīci, ja kāds no tuvumā esošajiem cilvēkiem kustas, jo tas var izraisīt nejaušu traumu.
3. Šis produkts nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 5 gadiem.
4. Bērni nedrīkst lietot šo produktu vieni paši. To drīkst lietot tikai pieaugušo uzraudzībā.
5. Glabājiēt produktu bērniem nepieejamā vietā.
6. Nenemērciet endoskopu šķidrumā, jo tas var sabojāt ierīci.
7. Neliels objektīva uzsildīšanās lietošanas laikā ir normāla parādība.
8. Šis produkts ir paredzēts tikai personīgajai lietošanai un to nedrīkst izmantot kā medicīnas aprīkojumu.
9. Glabājiēt produktu vēsā, sausā vietā, tālu no uguns un kodīgām vielām.

UZLĀDES NORĀDĪJUMI

1. Pirms uzlādēšanas nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, lai pārlicinātos, ka ierīce ir izslēgta.
2. Uzlādes laikā sarkanais indikatorgaismas signāls paliks ieslēgts.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, sarkanais indikatorgaismas signāls izslēdzas.

PROBLĒMU RISINĀŠANA

Ekrāns ir iesaldējies

1. Datu pārraides attālums var būt pārāk liels. Lietojiet produktu tuvāk mobilajam telefonam.
2. Baterijas uzlāde var būt zema. Lūdzu, uzlādējiēt ierīci.

Wi-Fi signāls netiek pārraidīts vai ir pārtraukts

1. Zems akumulatora uzlādes līmenis var vājināt Wi-Fi signālu. Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiēt ierīci.
2. Wi-Fi signāla pārraides attālums var būt pārsniegts. Lietojiet produktu tuvāk mobilajam telefonam.
3. Tuvumā var būt pārāk daudz Wi-Fi signālu. Lietojiet produktu vietā, kur ir mazāk bezvadu signālu.

Netiek parādīts attēls

1. Pārliecinieties, ka tālrunis ir savienots ar pareizo produkta Wi-Fi tīkla nosaukumu.
2. Ja deg zils indikatorgaismas signāls, bet attēls netiek parādīts, izslēdziet gan lietotni, gan ierīci, pēc tam atkārtoti palaidiet tās un atkārtoti izveidojiet savienojumu.
3. Izslēdziet **viedo tīkla pārslēgšanu**:
 - **iOS**: atveriet **Iestatījumi** → **WLAN** → pieskarieties tīkla ikonai → izslēdziet **Automātiska pievienošanās**.
 - **Android**: atveriet **Iestatījumi** → **WLAN** → **Tīkla paātrinājums** → izslēdziet **Pārslēgties starp tīkliem**.
 - **Huawei HarmonyOS**: atveriet **Iestatījumi** → **WLAN** → **Papildu iestatījumi** → **WLAN+** → izslēdziet **WLAN+**.
 - **Citi mobilie tālruņi**: WLAN iestatījumos meklējiet opciju, kas līdzīga **Smart Network Switching (Viedā tīkla pārslēgšana)**, un izslēdziet to.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Address: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District,
Shenzhen, China
Phone:8613122811873
Email:632814589@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: EARSCAN (NE3 wireless visible earpick)
Model no.: NE3

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Place and date of issue: Shenzhen Guangdong 28Jan2026

Name, function: Hua Zhang, Manager

Signature:

Stamp: 张华

深圳市华杰伟科技有限公司
Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

张华

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Saskaņā ar EK direktīvu – CE

Ražotājs: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Adrese: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District, Shenzhen, China
Tālrunis: 8613122811873
E-pasts: 632814589@qq.com

Šī atbilstības deklarācija ir izsniegta ražotāja vienīgā atbildībā.

Produkta nosaukums: EARSCAN (NE3 bezvadu redzamais ausu tīrītājs)

Modeļa numurs: NE3

Iepriekš aprakstītā deklarācija atbilst attiecīgajiem Savienības harmonizācijas tiesību aktiem:

EMC direktīva 2014/30/ES

Radioiekārtu direktīva 2014/53/ES

RoHS direktīva 2011/65/ES II pielikums, ar ko groza pielikumu (ES) 2015/863

Atsauces uz attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem, kas izmantoti, vai atsauces uz citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz kurām ir deklarēta atbilstība:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

EN IEC 62311:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020

IEC 62321-4:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Importētājs: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovēnija, ES

Parakstīts (uzņēmuma nosaukums) vārdā un uzdevumā: Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Izdošanas vieta un datums: Shenzhen Guangdong, 28. janvāris 2026

Vārds, uzvārds, amats: Hua Zhang, vadītājs

Paraksts:

Zīmogs: