

NL: EARSCAN – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTPARAMETERS

Productfunctie: Draadloze visuele oordopjes

Netwerkstandaard: IEEE 802.11b/g/n

Antenne: Ingebouwde antenne

Werkfrequentie: 2,4 GHz

Maximaal RF-uitgangsvermogen: ≤20 dBm

Transmissiesnelheid: 30 fps

Beeldsensor: CMOS

Werktemperatuur: -10 °C ~ 50 °C

Batterijcapaciteit: 130 mAh

Werktijd: 35 minuten

Oplaadtijd: ~60 min

Ingangsstroom: DC 5 V / 150 mA

Binnendiameter lens: 3,6 mm

Brandpuntsafstand: 15 mm ~ 20 mm

Beeldkwaliteit: HD

Zwaartekrachtsensor: 3-assig

Productinhoud: Verpakking, hoofdunit, producthandleiding, oordopjes (5×), oordopjeshouder, USB Type-C-oplaadkabel



APP DOWNLOADMETHODE

Zoek naar **HND** in de App Store of Google Play om de applicatie te downloaden en te installeren. U kunt ook de QR-code scannen met de browser van uw mobiele telefoon om de app te downloaden en te installeren.


- **iOS:** Open na het scannen van de QR-code de iOS App Store om de applicatie te downloaden en te installeren. U kunt ook rechtstreeks in de App Store naar **HND** zoeken.
- **Android:** Open **Google Play** na het scannen van de QR-code om de applicatie te downloaden en te installeren.



Let op: als er tijdens de installatie een beveiligingsherinnering verschijnt, selecteer dan '**Doorgaan met installatie**' om door te gaan.

iOS-SYSTEEMVERBINDING


1. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt totdat het blauwe indicatielampje begint te knipperen. Dit geeft aan dat de earpick klaar is om verbinding te maken met de app.
2. Tik op het **APP-pictogram** om de applicatie te openen.
3. Selecteer de WLAN-optie en schakel deze in.
4. Maak verbinding met het wifi-netwerk: **HNDEC_55-XXXXXX**.
5. Ga terug naar de app om het apparaat te gaan gebruiken. Het blauwe lampje verandert van knipperen naar continu branden, wat aangeeft dat de verbinding is gelukt.

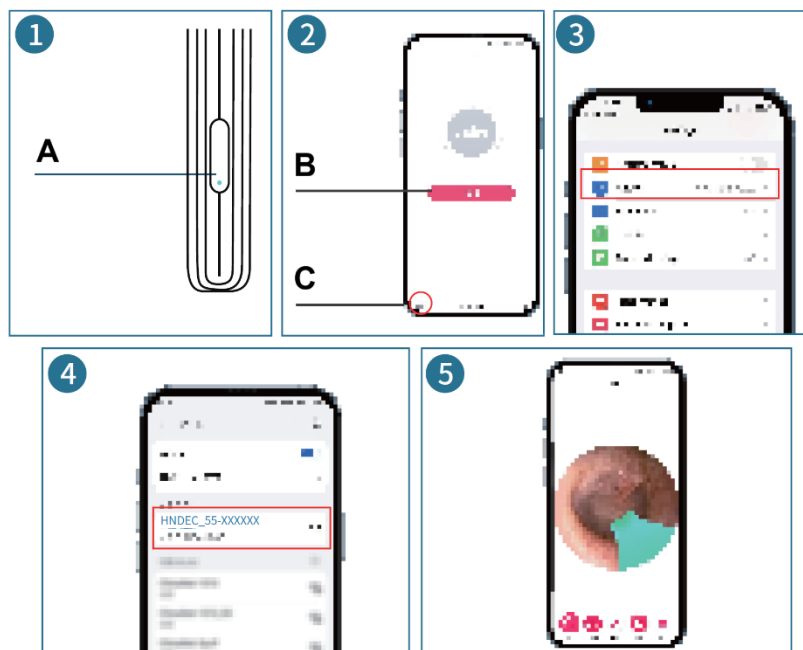

- A. Aan/uit-knop / indicatielampje
- B. Klik om door te gaan
- C. Klik hier om de taal te wijzigen

ANDROID-SYSTEEMVERBINDING

1. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt totdat het blauwe indicatielampje begint te knipperen. Dit geeft aan dat de earpick klaar is om verbinding te maken met de app.
2. Tik op het **APP-pictogram** om de applicatie te openen.
3. Maak verbinding met het wifi-netwerk: **HNDEC_55-XXXXXX**.
4. Ga terug naar de app om het apparaat te gaan gebruiken. Het blauwe lampje verandert van knipperen naar continu branden, wat aangeeft dat de verbinding tot stand is gebracht.

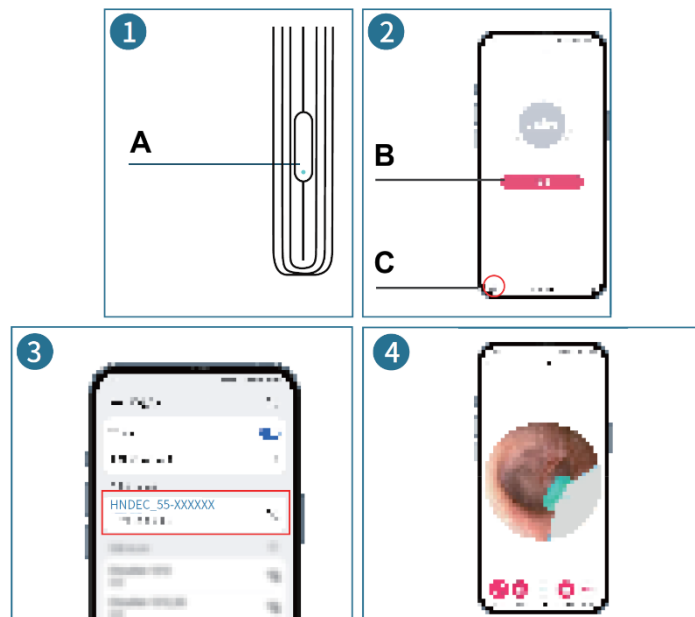

- A. Aan/uit-knop / indicatielampje
- B. Klik
- C. Klik hier om de taal te wijzigen

OVERZICHT VAN DE APP-INTERFACE



1. Afbeelding draaien
2. Spiegelbeeld
3. Zoomen
4. Foto maken
5. Video opnemen

GEBRUIKSAANWIJZING

Bevestig een schone siliconen oorschep stevig aan het uiteinde van het apparaat en zet de oorreiniger aan. Zodra het live camerabeeld op uw telefoon verschijnt, brengt u het uiteinde langzaam en voorzichtig in de gehoorgang terwijl u het scherm in de gaten houdt voor begeleiding. Beweeg de oortrommel voorzichtig om zichtbaar oorsmeer te lokaliseren en verwijder dit met langzame, gecontroleerde bewegingen. Steek het apparaat niet te diep in het oor en raak het trommelvlies niet aan. Verwijder het apparaat na het reinigen uit het oor, schakel het uit, maak de oorschep los en reinig deze voordat u het apparaat op een droge plaats opbergt.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HET PRODUCT EN DE GEBRUIKER

1. Als het beeld onduidelijk wordt, reinig dan de lens voorzichtig met een wattenstaafje.
2. Controleer altijd uw omgeving voordat u het apparaat gebruikt. Gebruik het apparaat niet terwijl er iemand in de buurt beweegt, omdat dit ongelukken kan veroorzaken.
3. Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 5 jaar.
4. Kinderen mogen dit product niet alleen gebruiken. Het mag alleen onder toezicht van een volwassene worden gebruikt.
5. Houd het product buiten het bereik van kinderen.
6. Dompel de endoscoop niet onder in vloeistof, omdat dit het apparaat kan beschadigen.
7. Het is normaal dat de lens tijdens gebruik licht warm wordt.
8. Dit product is uitsluitend bedoeld voor persoonlijke verzorging en mag niet worden gebruikt als medisch hulpmiddel.
9. Bewaar het product op een koele, droge plaats, uit de buurt van vuur en bijtende stoffen.

OPLADINGSINSTRUCTIES

1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om ervoor te zorgen dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het oplaadt.
2. Tijdens het opladen blijft het rode indicatielampje branden.
3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat het rode indicatielampje uit.

PROBLEEMOPLOSSING

Het scherm is bevroren

1. De afstand voor gegevensoverdracht is mogelijk te groot. Gebruik het product dichterbij de mobiele telefoon.
2. De batterij is mogelijk bijna leeg. Laad het apparaat opnieuw op.

Het wifi-signaal kan niet worden verzonden of is onderbroken

1. Een laag batterijniveau kan het wifi-signaal verzwakken. Laad het apparaat volledig op voordat u het gebruikt.

2. De afstand voor het verzenden van het wifi-signaal is mogelijk overschreden. Gebruik het product dicht bij de mobiele telefoon.
3. Er zijn mogelijk te veel wifi-signalen in de buurt. Gebruik het product in een gebied met minder draadloze signalen.

Er wordt geen beeld weergegeven

1. Controleer of de telefoon is verbonden met de juiste wifi-netwerkn naam van het product.
2. Als het blauwe indicatielampje brandt maar er geen beeld wordt weergegeven, schakelt u zowel de app als het apparaat uit, start u ze opnieuw op en maakt u opnieuw verbinding.
3. Schakel **Intelligent Network Switching** uit:

- **iOS:** Ga naar **Instellingen** → **WLAN** → tik op het netwerkpictogram → schakel **Automatisch verbinden** uit.
- **Android:** Ga naar **Instellingen** → **WLAN** → **Netwerkversnelling** → schakel **Schakelen tussen netwerken** uit.
- **Huawei HarmonyOS:** Ga naar **Instellingen** → **WLAN** → **Meer instellingen** → **WLAN+** → schakel **WLAN+** uit.
- **Andere mobiele telefoons:** zoek een optie die lijkt op **Smart Network Switching** in de WLAN-instellingen en schakel deze uit.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Address: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District,
Shenzhen, China
Phone:8613122811873
Email:632814589@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: EARSCAN (NE3 wireless visible earpick)
Model no.: NE3

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Place and date of issue: Shenzhen Guangdong 28Jan2026

Name, function: Hua Zhang, Manager

Signature:

Stamp: 张华

深圳市华杰伟科技有限公司
Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

张华

EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Volgens EG-richtlijn - CE

Fabrikant: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Adres: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District, Shenzhen, China
Telefoon: 8613122811873
E-mail: 632814589@qq.com

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Productnaam: EARSCAN (NE3 draadloze zichtbare oortelefoon)
Modelnummer: NE3

Het hierboven beschreven object van de verklaring is in overeenstemming met de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie:

EMC-richtlijn 2014/30/EU

Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur

RoHS-richtlijn 2011/65/EU Bijlage II tot wijziging van bijlage (EU) 2015/863

Verwijzingen naar de relevante geharmoniseerde normen die zijn gebruikt of verwijzingen naar andere technische specificaties in verband waarmee de conformiteit wordt verklaard:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Geïmporteerd door: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenië, EU

Ondertekend namens (bedrijfsnaam): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD
Plaats en datum van uitgifte: Shenzhen Guangdong, 28 januari 2026
Naam, functie: Hua Zhang, Manager
Handtekening:
Stempel: