

PL: EARSCAN – INSTRUKCJA OBSŁUGI

PARAMETRY PRODUKTU

Funkcja produktu: bezprzewodowa wizualna słuchawka douszna

Standard sieciowy: IEEE 802.11b/g/n

Antena: wbudowana antena

Częstotliwość robocza: 2,4 GHz

Maksymalna moc wyjściowa RF: ≤20 dBm

Szybkość transmisji: 30 klatek na sekundę

Czujnik obrazu: CMOS

Temperatura pracy: -10 °C ~ 50 °C

Pojemność baterii: 130 mAh

Czas pracy: 35 minut

Czas ładowania: ~60 min

Prąd wejściowy: DC 5 V / 150 mA

Wewnętrzna średnica obiektywu: 3,6 mm

Ogniskowa: 15 mm ~ 20 mm

Jakość obrazu: HD

Czujnik grawitacyjny: 3-osiowy

Zawartość opakowania: opakowanie detaliczne, urządzenie główne, instrukcja obsługi, wkładki douszne (5 szt.), pojemnik na wkładki douszne, kabel ładujący USB typu C



SPOSÓB POBIERANIA APLIKACJI

Wyszukaj **HND** w App Store lub Google Play, aby pobrać i zainstalować aplikację. Możesz również użyć przeglądarki w telefonie komórkowym, aby zeskanować kod QR i pobrać oraz zainstalować aplikację.


- **iOS:** Po zeskanowaniu kodu QR otwórz sklep iOS App Store, aby pobrać i zainstalować aplikację. Możesz również wyszukać **HND** bezpośrednio w App Store.
- **Android:** Po zeskanowaniu kodu QR otwórz **Google Play**, aby pobrać i zainstalować aplikację.



Uwaga: Jeśli podczas instalacji pojawi się przypomnienie dotyczące bezpieczeństwa, wybierz opcję **Kontynuuj instalację**, aby kontynuować.

POŁĄCZENIE Z SYSTEMEM iOS


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aż niebieska dioda zacznie migać. Oznacza to, że earpick jest gotowy do połączenia z aplikacją.
2. Naciśnij **ikonę aplikacji**, aby ją otworzyć.
3. Wybierz opcję **WLAN** i włącz ją.
4. Połącz się z siecią Wi-Fi: **HNDEC_55-XXXXXX**.
5. Wróć do aplikacji, aby rozpocząć korzystanie z urządzenia. Niebieska dioda przestanie migać i zacznie świecić światłem ciągłym, co oznacza, że połączenie zostało nawiązane.

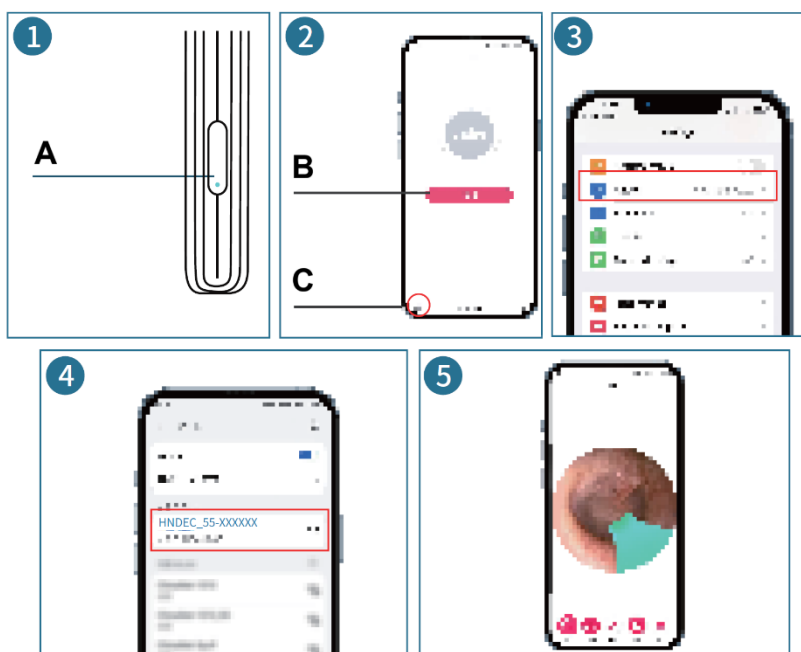

- A. Przycisk zasilania / dioda kontrolna
 - B. Kliknij, aby kontynuować
 - C. Kliknij tutaj, aby zmienić język
-

POŁĄCZENIE Z SYSTEMEM ANDROID

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aż niebieska kontrolka zacznie migać. Oznacza to, że słuchawka jest gotowa do połączenia z aplikacją.
2. Naciśnij **ikonę APLIKACJA**, aby otworzyć aplikację.
3. Połącz się z siecią Wi-Fi: **HNDEC_55-XXXXXX**.
4. Wróć do aplikacji, aby rozpocząć korzystanie z urządzenia. Niebieska dioda przestanie migać i zacznie świecić światłem ciągłym, co oznacza, że połączenie zostało nawiązane.

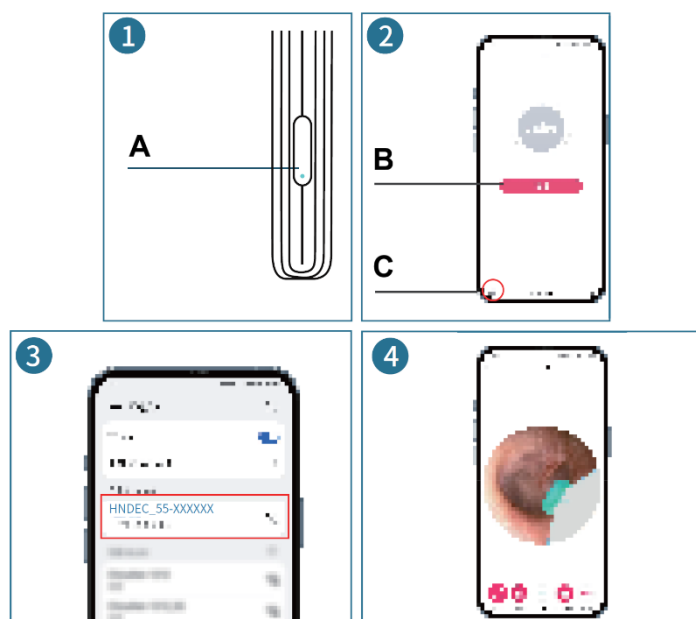

- A. Przycisk zasilania / dioda kontrolna
- B. Kliknij
- C. Kliknij tutaj, aby zmienić język

PRZEGLĄD INTERFEJSU APLIKACJI



1. Obróć obraz
2. Odbicie lustrzane
3. Powiększ
4. Zrób zdjęcie
5. Nagraj film

SPOSÓB UŻYCIA

Przymocuj czystą silikonową łyzeczkę do ucha do końcówki urządzenia i włącz wycior do uszu. Gdy na ekranie telefonu pojawi się obraz z kamery, powoli i delikatnie włóż końcówkę do kanału słuchowego, obserwując ekran w celu uzyskania wskazówek. Ostrożnie poruszaj szpatułką, aby zlokalizować widoczną woskowinę, a następnie usuń ją powolnymi, kontrolowanymi ruchami. Unikaj zbyt głębokiego wprowadzania urządzenia lub dotykania błony bębenkowej. Po czyszczeniu wyjmij urządzenie z ucha, wyłącz je, odłącz końcówkę i wyczyść ją przed przechowywaniem urządzenia w suchym miejscu.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU I UŻYTKOWNIKA

1. Jeśli obraz staje się nieostry, należy ostrożnie wyczyścić soczewkę za pomocą wacika.
2. Przed użyciem zawsze sprawdź otoczenie. Nie używaj urządzenia, gdy w pobliżu porusza się ktoś, ponieważ może to spowodować przypadkowe obrażenia.
3. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 5 roku życia.
4. Dzieci nie mogą używać tego produktu samodzielnie. Produkt powinien być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
5. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Nie zanurzaj endoskopu w płynach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
7. Nieznaczne nagrzewanie się soczewki podczas użytkowania jest zjawiskiem normalnym.
8. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego i nie może być używany jako sprzęt medyczny.
9. Produkt należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od ognia i substancji żrących.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

1. Przed ładowaniem należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aby upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Podczas ładowania czerwona kontrolka będzie świecić się.
3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, czerwona kontrolka zgaśnie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ekran się zawiesił

1. Odległość transmisji danych może być zbyt duża. Użyj produktu bliżej telefonu komórkowego.
2. Być może poziom naładowania baterii jest zbyt niski. Naładuj urządzenie.

Sygnał Wi-Fi nie może być transmitowany lub jest przerywany

1. Niski poziom naładowania baterii może osłabiać sygnał Wi-Fi. Przed użyciem należy całkowicie naładować urządzenie.

2. Odległość transmisji sygnału Wi-Fi może być przekroczona. Używaj produktu bliżej telefonu komórkowego.
3. W pobliżu może być zbyt wiele sygnałów Wi-Fi. Użyj produktu w miejscu, gdzie jest mniej sygnałów bezprzewodowych.

Nie wyświetla się obraz

1. Sprawdź, czy telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi o prawidłowej nazwie.
2. Jeśli niebieska kontrolka świeci się, ale nie wyświetla się obraz, wyłącz aplikację i urządzenie, a następnie uruchom je ponownie i połącz się ponownie.
3. Wyłącz **inteligentne przełączanie sieci**:
 - **iOS:** Przejdź do **Ustawienia** → **WLAN** → **dotknij ikony sieci** → **wyłącz opcję Automatyczne łączenie**.
 - **Android:** Przejdź do **Ustawienia** → **WLAN** → **Przyspieszenie sieci** → **wyłącz Przełączanie między sieciami**.
 - **Huawei HarmonyOS:** Przejdź do **Ustawienia** → **WLAN** → **Więcej ustawień** → **WLAN+** → **wyłącz WLAN+**.
 - **Inne telefony komórkowe:** Znajdź opcję podobną do **inteligentnego przełączania sieci** w ustawieniach WLAN i wyłącz ją.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Address: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District,
Shenzhen, China
Phone:8613122811873
Email:632814589@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: EARSCAN (NE3 wireless visible earpick)
Model no.: NE3

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Place and date of issue:Shenzhen Guangdong 28Jan2026

Name, function:Hua Zhang,Manager

Signature:

Stamp: 张华

深圳市华杰伟科技有限公司
Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

张华

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Zgodnie z dyrektywą WE – CE

Producent: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

Adres: 5,6,8/F, Block 2, TENGHONGXING Science park, Jiazitang, Guangming District, Shenzhen, Chiny

Telefon: 8613122811873

E-mail: 632814589@qq.com

Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Nazwa produktu: EARSCAN (bezprowadowa widoczna słuchawka douszna NE3)

Numer modelu: NE3

Obiekt oświadczenia opisanego powyżej jest zgodny z odpowiednim unijnym prawem harmonizacyjnym:

Dyrektywa EMC 2014/30/UE

Dyrektywa 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE załącznik II zmieniający załącznik (UE) 2015/863

Odniesienia do stosowanych odpowiednich norm zharmonizowanych lub odniesienia do innych specyfikacji technicznych, w odniesieniu do których deklaruje się zgodność:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

EN IEC 62311:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020

IEC 62321-4:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Importowane przez: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Słowenia, UE

Podpisano w imieniu i na rzecz (nazwa firmy): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Miejsce i data wystawienia: Shenzhen Guangdong, 28 stycznia 2026 r.

Imię i nazwisko, stanowisko: Hua Zhang, kierownik

Podpis:

Pieczęć: