

PT: EARSCAN – MANUAL DO UTILIZADOR

PARÂMETROS DO PRODUTO

Função do produto: Aspirador de ouvidos visual sem fios

Padrão de rede: IEEE 802.11b/g/n

Antena: Antena integrada

Frequência de funcionamento: 2,4 GHz

Potência máxima de saída de RF: ≤20 dBm

Velocidade de transmissão: 30 fps

Sensor de imagem: CMOS

Temperatura de funcionamento: -10 °C ~ 50 °C

Capacidade da bateria: 130 mAh

Tempo de funcionamento: 35 minutos

Tempo de carregamento: ~60 min

Corrente de entrada: CC 5 V / 150 mA

Diâmetro interno da lente: 3,6 mm

Distância focal: 15 mm ~ 20 mm

Qualidade da imagem: HD

Sensor de gravidade: 3 eixos

Conteúdo do produto: Caixa de retalho, unidade principal, manual do produto, cotonetes (5×), recipiente para cotonetes, cabo de carregamento USB tipo C



MÉTODO DE DESCARREGAMENTO DA APLICAÇÃO

Procure por **HND** na App Store ou Google Play para descarregar e instalar a aplicação. Também pode usar o navegador do seu telemóvel para digitalizar o código QR e descarregar e instalar a aplicação.


- **iOS:** Após digitalizar o código QR, abra a App Store do iOS para descarregar e instalar a aplicação. Também pode pesquisar **HND** diretamente na App Store.
- **Android:** Após digitalizar o código QR, abra o **Google Play** para baixar e instalar o aplicativo.



Atenção: Se um lembrete de segurança aparecer durante a instalação, selecione **Continuar instalação** para prosseguir.

LIGAÇÃO AO SISTEMA iOS


1. Mantenha premido o botão de alimentação durante 2 segundos até que a luz indicadora azul comece a piscar. Isto indica que o earpick está pronto para se ligar à aplicação.
2. Toque no **ícone** do aplicativo para abri-lo.
3. Selecione a opção **WLAN** e ative-a.
4. Ligue à rede Wi-Fi: **HNDEC_55-XXXXXX**.
5. Volte ao aplicativo para começar a usar o dispositivo. A luz azul deixará de piscar e ficará acesa, indicando que a conexão foi bem-sucedida.

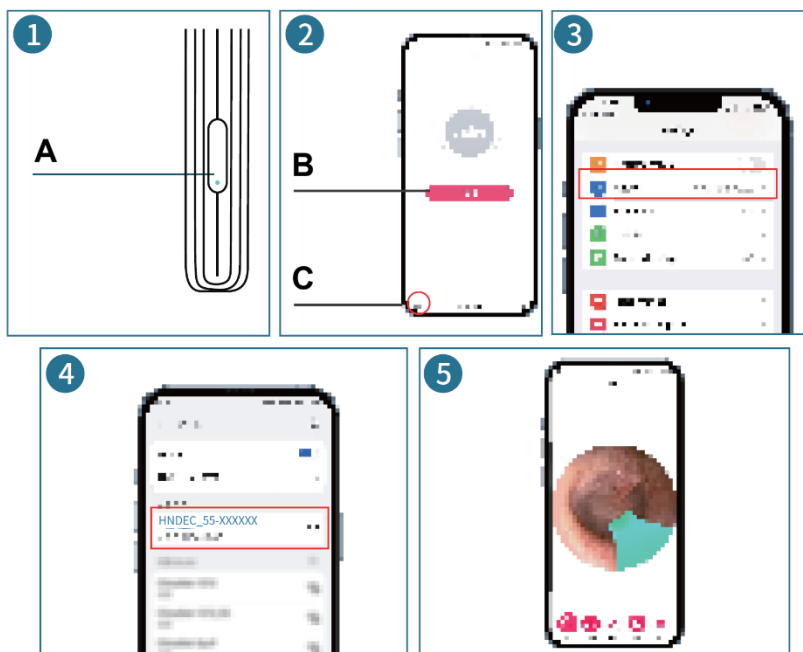

- A. Botão liga/desliga/luz indicadora
 - B. Clique para continuar
 - C. Clique aqui para alterar o idioma
-

LIGAÇÃO AO SISTEMA ANDROID

1. Mantenha pressionado o botão liga/desliga por 2 segundos até que a luz indicadora azul comece a piscar. Isso indica que o earpick está pronto para se conectar ao aplicativo.
2. Toque no **ícone** do aplicativo para abri-lo.
3. Ligue-se à rede Wi-Fi: **HNDEC_55-XXXXXX**.
4. Volte ao aplicativo para começar a usar o dispositivo. A luz azul deixará de piscar e ficará acesa, indicando que a conexão foi bem-sucedida.

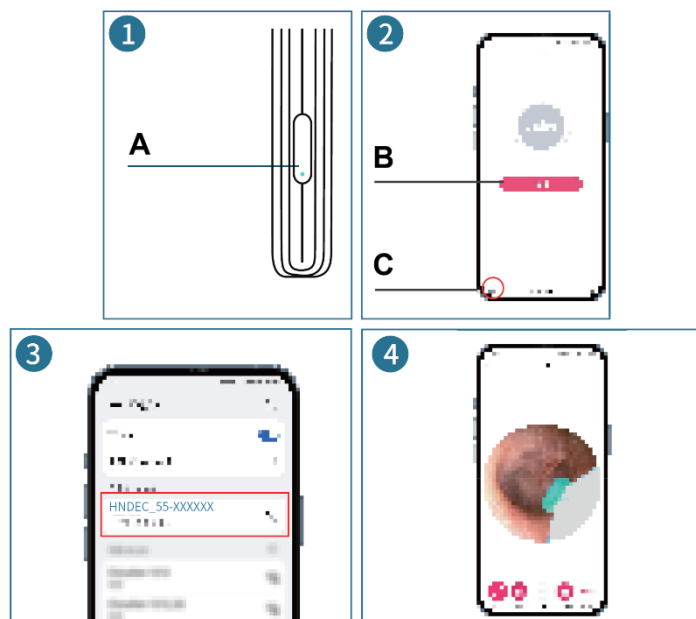

- A. Botão liga/desliga/luz indicadora
- B. Clique
- C. Clique aqui para alterar o idioma

VISÃO GERAL DA INTERFACE DA APLICAÇÃO



1. Rodar imagem
2. Espelhar imagem
3. Ampliar
4. Capturar foto
5. Capturar vídeo

COMO USAR

Prenda uma espátula de silicone limpa com segurança na ponta do dispositivo e ligue o limpador de ouvidos. Quando a imagem da câmara ao vivo aparecer no seu telemóvel, insira lenta e suavemente a ponta no canal auditivo enquanto observa a tela para orientação. Mova cuidadosamente o aspirador de cera para localizar a cera visível e remova-a com movimentos lentos e controlados. Evite inserir o dispositivo muito profundamente ou tocar no tímpano. Após a limpeza, remova o dispositivo da orelha, desligue-o, retire a espátula auricular e limpe-a antes de guardar o dispositivo num local seco.

NOTAS DE SEGURANÇA DO PRODUTO E DO UTILIZADOR

1. Se a imagem ficar desfocada, limpe cuidadosamente a lente com um cotonete.
2. Verifique sempre o ambiente ao seu redor antes de usar. Não use o dispositivo enquanto alguém estiver se movendo nas proximidades, pois isso pode causar ferimentos acidentais.
3. Este produto não é adequado para crianças com menos de 5 anos de idade.
4. As crianças não devem utilizar este produto sozinhas. Deve ser utilizado apenas sob a supervisão de um adulto.
5. Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
6. Não mergulhe o endoscópio em líquido, pois isso pode danificar o dispositivo.
7. É normal que a lente aqueça ligeiramente durante a utilização.
8. Este produto destina-se apenas a cuidados pessoais e não deve ser utilizado como equipamento médico.
9. Guarde o produto num local fresco e seco, longe do fogo e de substâncias corrosivas.

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

1. Mantenha premido o botão de alimentação para garantir que o dispositivo está desligado antes de carregar.
2. Durante o carregamento, a luz indicadora vermelha permanecerá acesa.
3. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz indicadora vermelha apagará.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O ecrã está congelado

1. A distância de transmissão de dados pode estar muito grande. Use o produto mais próximo do telemóvel.
2. A bateria pode estar fraca. Recarregue o dispositivo.

O sinal Wi-Fi não pode ser transmitido ou é intermitente

1. A bateria fraca pode enfraquecer o sinal Wi-Fi. Carregue totalmente o dispositivo antes de usar.

2. A distância de transmissão do sinal Wi-Fi pode estar excedida. Utilize o produto mais perto do telemóvel.
3. Pode haver muitos sinais Wi-Fi nas proximidades. Utilize o produto numa área com menos sinais sem fios.

Não é apresentada nenhuma imagem

1. Confirme se o telemóvel está conectado ao nome correto da rede Wi-Fi do produto.
2. Se a luz indicadora azul estiver acesa, mas não houver exibição de imagem, desligue o aplicativo e o dispositivo, reinicie-os e reconecte-os.
3. Desligue a **comutação inteligente de rede**:
 - **iOS:** Vá para **Definições** → **WLAN** → toque no ícone da rede → desligue a opção **Auto-Join**.
 - **Android:** Vá para **Definições** → **WLAN** → **Aceleração de rede** → desligue **Alternar entre redes**.
 - **Huawei HarmonyOS:** Vá para **Definições** → **WLAN** → **Mais definições** → **WLAN+** → desligue **WLAN+**.
 - **Outros telemóveis:** procure uma opção semelhante a **Comutação de rede inteligente** nas definições de WLAN e desligue-a.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Address: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District,
Shenzhen, China
Phone:8613122811873
Email:632814589@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: EARSCAN (NE3 wireless visible earpick)
Model no.: NE3

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Place and date of issue: Shenzhen Guangdong 28Jan2026

Name, function: Hua Zhang, Manager

Signature:

Stamp: 张华

深圳市华杰伟科技有限公司
Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

张华

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE
De acordo com a Diretiva CE - CE

Fabricante: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Endereço: 5,6,8/F, Bloco 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District, Shenzhen, China
Telefone: 8613122811873
E-mail: 632814589@qq.com

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Nome do produto: EARSCAN (limpador de ouvidos sem fios visível NE3)

N.º do modelo: NE3

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União Europeia aplicável:

Diretiva EMC 2014/30/UE

Diretiva 2014/53/UE relativa aos equipamentos de rádio

Diretiva RoHS 2011/65/UE Anexo II que altera o Anexo (UE) 2015/863

Referências às normas harmonizadas relevantes utilizadas ou referências a outras especificações técnicas em relação às quais é declarada a conformidade:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

EN IEC 62311:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020

IEC 62321-4:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Importado por: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Eslovénia, UE

Assinado em nome e por conta de (nome da empresa): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Local e data de emissão: Shenzhen Guangdong, 28 de janeiro de 2026

Nome, função: Hua Zhang, Gerente

Assinatura:

Carimbo: