

SI: EARSCAN – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PARAMETRI IZDELKA

Funkcija izdelka: Brezžična vizualna naprava za čiščenje ušes

Omrežni standard: IEEE 802.11b/g/n

Antena: Vgrajena antena

Delovna frekvenca: 2.4 GHz

Največja RF izhodna moč: ≤20 dBm

Hitrost prenosa: 30 fps

Senzor slike: CMOS

Delovna temperatura: -10 °C ~ 50 °C

Kapaciteta baterije: 130 mAh

Čas delovanja: 35 minut

Čas polnjenja: ~60 min

Vhodni tok: DC 5 V / 150 mA

Notranji premer leče: 3.6 mm

Goriščna razdalja: 15 mm ~ 20 mm

Kakovost slike: HD

Senzor gravitacije: 3-osni

Vsebina paketa: Prodajna škatla, glavna enota, navodila za uporabo, nastavki za uho (5×), posodica za nastavke, USB Type-C kabel za polnjenje



NAČIN PRENOSA APLIKACIJE

V App Store ali Google Play poiščite **HND**, da prenesete in namestite aplikacijo. Aplikacijo lahko prenesete tudi tako, da z mobilnim telefonom skenirate QR kodo v brskalniku.


- **iOS:** Po skeniranju QR kode odprite iOS App Store za prenos in namestitev aplikacije. Aplikacijo lahko tudi neposredno poiščete z imenom **HND** v App Store.
- **Android:** Po skeniranju QR kode odprite Google Play za prenos in namestitev aplikacije.



Pozor: Če se med namestitvijo pojavi varnostno opozorilo, izberite **Continue Installation**, da nadaljujete.

POVEZAVA SISTEMA iOS


1. Pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi, dokler modra indikatorska lučka ne začne utripati. To pomeni, da je naprava pripravljena za povezavo z aplikacijo.
2. Tapnite ikono aplikacije, da jo odprete.
3. Izberite možnost **WLAN** in jo omogočite.
4. Povežite se z Wi-Fi omrežjem: **HNDEC_55-XXXXXX**.
5. Vrnite se v aplikacijo in začnite uporabljati napravo. Modra lučka se bo iz utripanja spremenila v stalno svetlobo, kar pomeni uspešno povezavo.

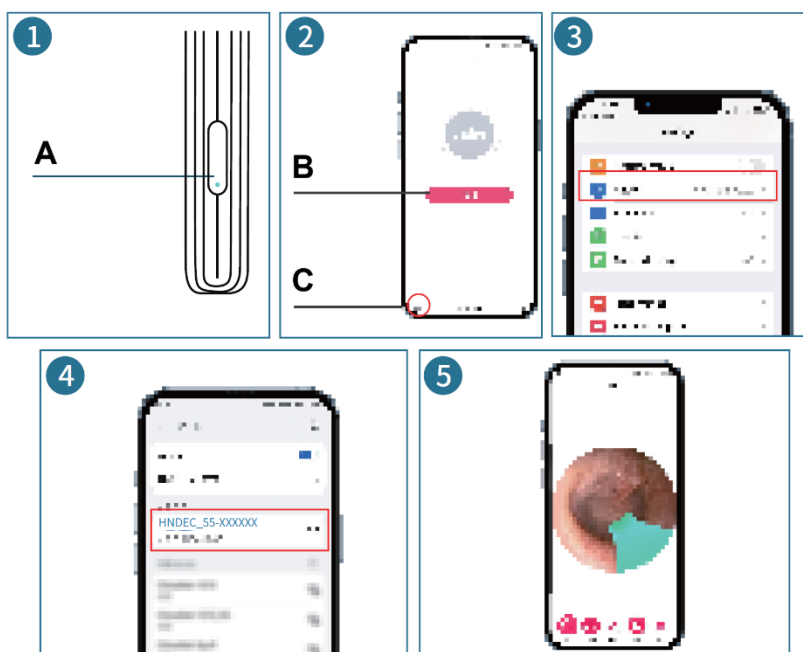

- A. Gumb za vklop / indikatorska lučka
 - B. Kliknite za nadaljevanje
 - C. Kliknite tukaj za spremembo jezika
-

POVEZAVA SISTEMA ANDROID

1. Pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi, dokler modra indikatorna lučka ne začne utripati. To pomeni, da je naprava pripravljena za povezavo z aplikacijo.
2. Tapnite **ikono aplikacije**, da jo odprete.
3. Povežite se z Wi-Fi omrežjem: **HNDEC_55-XXXXXX**.
4. Vrnite se v aplikacijo in začnite uporabljati napravo. Modra lučka se bo iz utripanja spremenila v stalno svetlobo, kar pomeni uspešno povezavo.

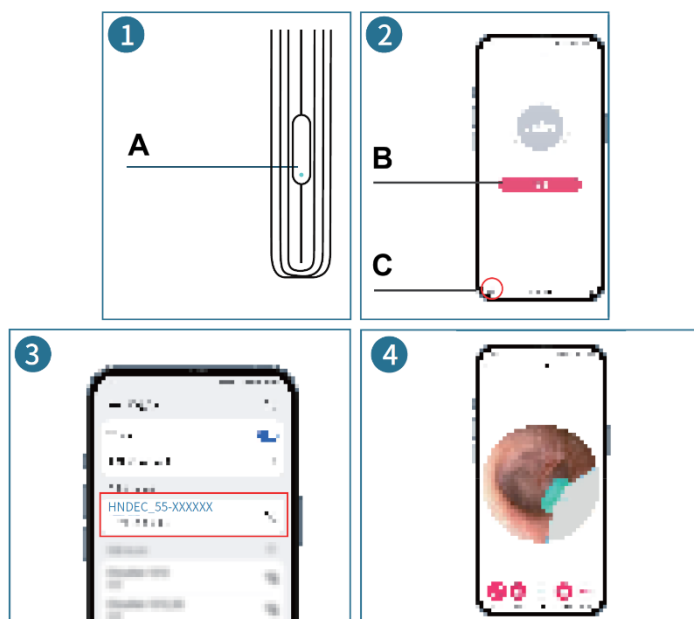

- A. Gumb za vklop / indikatorna lučka
B. Kliknite
C. Kliknite tukaj za spremembo jezika

PREGLED VMESNIKA APLIKACIJE



1. Obrni sliko
 2. Zrcali sliko
 3. Povečava
 4. Zajem fotografije
 5. Zajem videa
-

KAKO UPORABLJATI

Na konico naprave varno namestite čist silikonski nastavek za uho in vklopite napravo. Ko se na telefonu prikaže slika kamere v živo, konico počasi in nežno vstavite v ušesni kanal ter pri tem spremljajte zaslon telefona. Napravo premikajte počasi in previdno, da poiščete vidni ušesni vosek in ga odstranite z nežnimi, nadzorovanimi gibi. Naprave ne vstavljajte pregloboko in se izogibajte dotiku bobniča. Po čiščenju napravo odstranite iz ušesa, jo izklopite, odstranite nastavek in ga očistite, nato napravo shranite na suhem mestu.

VARNOSTNA OPOZORILO ZA IZDELEK IN UPORABNIKA

1. Če slika postane nejasna, previdno očistite lečo z vatirano palčko.
 2. Pred uporabo vedno preverite okolico. Naprave ne uporabljajte, če se v bližini kdo premika, saj lahko pride do nenamerne poškodbe.
 3. Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 5 let.
 4. Otroci ne smejo uporabljati izdelka sami. Uporaba je dovoljena le pod nadzorom odrasle osebe.
 5. Izdelek hranite izven dosega otrok.
 6. Endoskopa ne potaplajte v tekočino, saj lahko to poškoduje napravo.
 7. Rahlo segrevanje leče med uporabo je normalno.
 8. Izdelek je namenjen izključno osebni negi in se ne sme uporabljati kot medicinska oprema.
 9. Izdelek hranite na hladnem in suhem mestu, stran od ognja in korozivnih snovi.
-

NAVODILA ZA POLNJENJE

1. Pred polnjenjem pritisnite in držite gumb za vklop, da se prepričate, da je naprava izklopljena.
 2. Med polnjenjem bo rdeča indikatorska lučka stalno svetila.
 3. Ko je baterija popolnoma napolnjena, se rdeča indikatorska lučka ugasne.
-

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Zaslon je zamrznjen

1. Razdalja prenosa podatkov je lahko prevelika. Napravo uporabljajte bližje mobilnemu telefonu.
2. Baterija je lahko skoraj prazna. Napravo ponovno napolnite.

Wi-Fi signal se ne prenaša ali je nestabilen

1. Nizka raven baterije lahko oslabi Wi-Fi signal. Pred uporabo popolnoma napolnite napravo.
2. Razdalja prenosa Wi-Fi signala je lahko presežena. Napravo uporabljajte bližje mobilnemu telefonu.
3. V bližini je lahko preveč Wi-Fi signalov. Napravo uporabljajte na območju z manj brezžičnimi signali.

Slika se ne prikaže

1. Preverite, ali je telefon povezan z ustreznim Wi-Fi omrežjem naprave.
2. Če modra indikatorska lučka sveti, vendar slike ni, izklopite aplikacijo in napravo, nato ju ponovno zaženite in ponovno povežite.
3. Izklopite funkcijo **Intelligent Network Switching**
 - **iOS:** Pojdite v **Settings** → **WLAN** → tapnite ikono omrežja → izklopite **Auto-Join**
 - **Android:** Pojdite v **Settings** → **WLAN** → **Network Acceleration** → izklopite **Switch Between Networks**
 - **Huawei HarmonyOS:** Pojdite v **Settings** → **WLAN** → **More Settings** → **WLAN+** → izklopite **WLAN+**
 - **Drugi telefoni:** V nastavitvah WLAN poiščite možnost podobno **Smart Network Switching** in jo izklopite.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Address: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District,
Shenzhen, China
Phone:8613122811873
Email:632814589@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: EARSCAN (NE3 wireless visible earpick)
Model no.: NE3

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Place and date of issue: Shenzhen Guangdong 28Jan2026

Name, function: Hua Zhang, Manager

Signature:

Stamp: 张华

深圳市华杰伟科技有限公司
Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

张华

EU IZJAVA O SKLADNOSTI
V skladu z direktivo ES – CE

Proizvajalec: Shenzhen HuajieWei Technology Co., LTD
Naslov: 5,6,8/F, Block 2, Zhongyingking Science park, Jiazitang, Guangming District, Shenzhen, Kitajska
Telefon: 8613122811873
Email: 632814589@qq.com

Ta izjava o skladnosti je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.

Ime izdelka: EARSCAN (NE3 brezžični vizualni čistilec ušes)
Model št.: NE3

Predmet zgoraj opisane izjave je v skladu z ustrezno harmonizirano zakonodajo Unije:

EMC Direktiva 2014/30/EU

Direktiva o radijski opremi 2014/53/EU

RoHS Direktiva 2011/65/EU Priloga II, ki spreminja Prilogo (EU) 2015/863

Sklici na ustrezne harmonizirane standarde ali druge tehnične specifikacije, na podlagi katerih je razglašena skladnost:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Uvoznik: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenija, EU

Podpisano za in v imenu (ime podjetja): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD
Kraj in datum izdaje: Shenzhen Guangdong, 28. jan 2026
Ime, funkcija: Hua Zhang, Vodja
Podpis:
Žig: