

SK: EARSCAN – NÁVOD NA POUŽITIE

PARAMETRE PRODUKTU

Funkcia produktu: Bezdrôtová vizuálna ušná tyčinka

Sieťový štandard: IEEE 802.11b/g/n

Anténa: Vstavaná anténa

Pracovná frekvencia: 2,4 GHz

Maximálny výstupný výkon RF: ≤20 dBm

Rýchlosť prenosu: 30 fps

Obrazový senzor: CMOS

Pracovná teplota: -10 °C ~ 50 °C

Kapacita batérie: 130 mAh

Pracovná doba: 35 minút

Doba nabíjania: ~60 min

Vstupný prúd: DC 5 V / 150 mA

Vnútorný priemer objektívu: 3,6 mm

Ohnisková vzdialenosť: 15 mm ~ 20 mm

Kvalita obrazu: HD

Gravitačný senzor: 3-osový

Obsah balenia: Maloobchodná krabička, hlavná jednotka, návod na použitie, ušné tyčinky (5×), nádoba na ušné tyčinky, nabíjací kábel USB typu C



SPÔSOB STIAHNUTIA APLIKÁCIE

Vyhľadajte **HND** v obchode App Store alebo Google Play, aby ste mohli stiahnuť a nainštalovať aplikáciu. Môžete tiež použiť prehliadač v mobilnom telefóne na naskenovanie QR kódu a stiahnutie a inštaláciu aplikácie.


- **iOS:** Po naskenovaní QR kódu otvorte iOS App Store, aby ste stiahli a nainštalovali aplikáciu. Môžete tiež vyhľadať **HND** priamo v App Store.
- **Android:** Po naskenovaní QR kódu otvorte **Google Play**, aby ste stiahli a nainštalovali aplikáciu.



Upozornenie: Ak sa počas inštalácie zobrazí bezpečnostná pripomienka, vyberte možnosť **Pokračovať v inštalácii**, aby ste mohli pokračovať.

PRIPOJENIE SYSTÉMU iOS


1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd, kým nezačne blikáť modrá kontrolka. To znamená, že slúchadlo je pripravené na pripojenie k aplikácii.
2. Kliknite na **ikonu APP**, aby ste otvorili aplikáciu.
3. Vyberte možnosť **WLAN** a aktivujte ju.
4. Pripojte sa k sieti Wi-Fi: **HNDEC_55-XXXXXX**.
5. Vráťte sa do aplikácie a začnite používať zariadenie. Modré svetlo prestane blikáť a svietiť bude nepretržite, čo znamená, že pripojenie bolo úspešné.

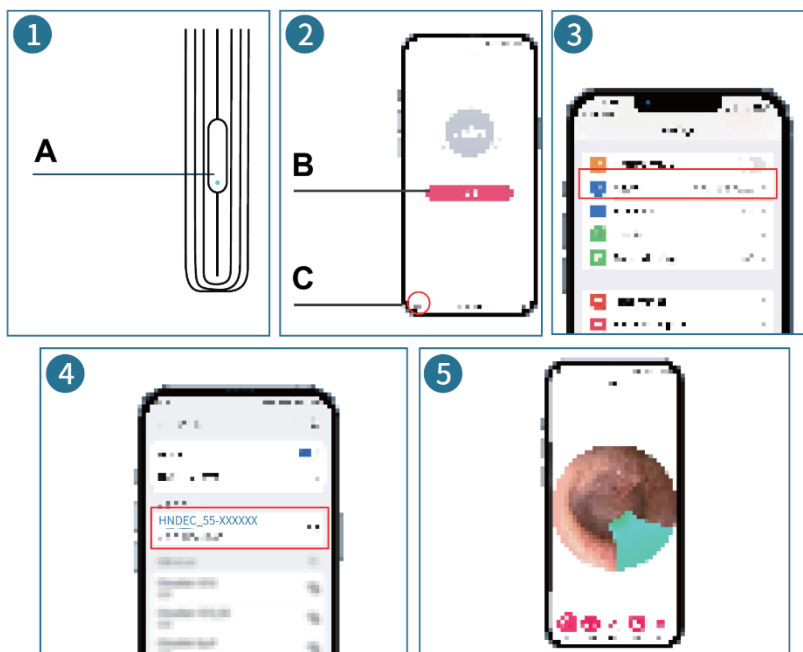

- A. Tlačidlo napájania / kontrolka
 - B. Kliknite pre pokračovanie
 - C. Kliknite sem, aby ste zmenili jazyk
-

PRIPOJENIE SYSTÉMU ANDROID

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd, kým modrá kontrolka nezačne blikať. To znamená, že slúchadlo je pripravené na pripojenie k aplikácii.
2. Kliknutím na **ikonu APP** otvoríte aplikáciu.
3. Pripojte sa k sieti Wi-Fi: **HNDEC_55-XXXXXX**.
4. Vráťte sa do aplikácie a začnite používať zariadenie. Modré svetlo prestane blikať a svietiť bude nepretržite, čo znamená, že pripojenie bolo úspešné.

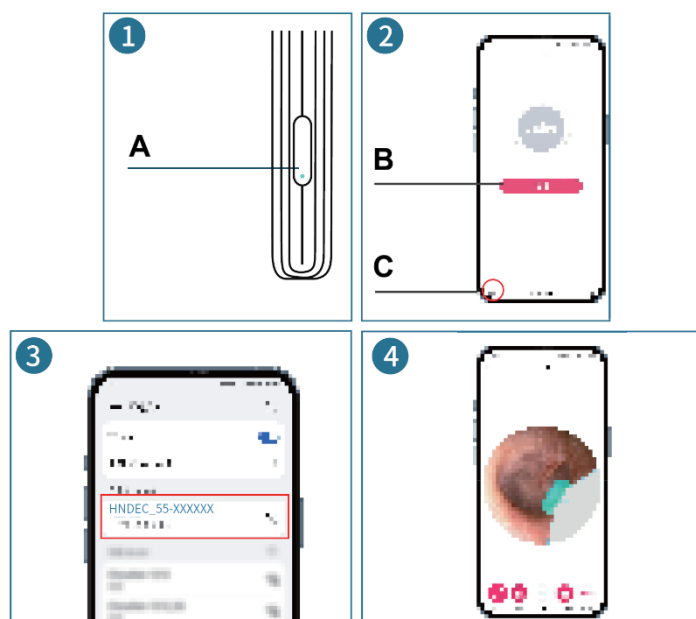

- A. Tlačidlo napájania / kontrolka
- B. Kliknite
- C. Kliknite sem, aby ste zmenili jazyk

PREHĽAD ROZHRANIA APLIKÁCIE



1. Otočiť obrázok
2. Zrkadliť obrázok
3. Zväčšiť
4. Zachytiť fotografiu
5. Zachytiť video

AKO POUŽÍVAŤ

Pripevnite čistú silikónovú ušnú lyžičku bezpečne na špičku zariadenia a zapnite ušný špachtľu. Akonáhle sa na telefóne zobrazí živý obraz z kamery, pomaly a opatrne vložte špičku do ušného kanála a sledujte obrazovku, kde nájdete pokyny. Opatrne pohybujte ušnou lyžičkou, aby ste našli viditeľný ušný maz, a odstráňte ho pomalými, kontrolovanými pohybmi. Nezasúvajte zariadenie príliš hlboko a nedotýkajte sa ušného bubienka. Po vyčistení vyberte zariadenie z ucha, vypnite ho, odpojte ušnú lyžičku a vyčistite ju, než zariadenie uložíte na suchom mieste.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA PRODUKTU A POUŽÍVATEĽA

1. Ak je obraz nejasný, opatrne očistite šošovku pomocou vatovej tyčinky.
2. Pred použitím vždy skontrolujte svoje okolie. Nepoužívajte zariadenie, ak sa niekto v blízkosti pohybuje, pretože by mohlo dôjsť k náhodnému zraneniu.
3. Tento výrobok nie je vhodný pre deti mladšie ako 5 rokov.
4. Deti nesmú tento produkt používať samy. Mal by sa používať iba pod dohľadom dospelých.
5. Produkt uchováajte mimo dosahu detí.
6. Endoskop neponárajte do tekutiny, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie zariadenia.
7. Mierne zahrievanie šošovky počas používania je normálne.
8. Tento produkt je určený iba na osobnú starostlivosť a nesmie sa používať ako zdravotnícky prostriedok.
9. Produkt skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu ohňa a korozívnych látok.

POKYNY NA NABÍJANIE

1. Pred nabíjaním stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste sa uistili, že je zariadenie vypnuté.
2. Počas nabíjania bude svietiť červená kontrolka.
3. Keď je batéria úplne nabitá, červená kontrolka zhasne.

ODSTRÁNENIE PORÚCH

Obrazovka zamrzla

1. Vzdialenosť prenosu dát môže byť príliš veľká. Použite produkt bližšie k mobilnému telefónu.
2. Batéria môže byť slabá. Nabite zariadenie.

Signál Wi-Fi sa nedá prenášať alebo je prerušovaný

1. Nízka úroveň nabitia batérie môže oslabiť signál Wi-Fi. Pred použitím zariadenie úplne nabite.
2. Vzdialenosť prenosu signálu Wi-Fi môže byť prekročená. Používajte produkt bližšie k mobilnému telefónu.
3. V okolí môže byť príliš veľa signálov Wi-Fi. Používajte produkt v oblasti s menším počtom bezdrôtových signálov.

Nezobrazuje sa žiadny obraz

1. Skontrolujte, či je telefón pripojený k správnomu názvu siete Wi-Fi produktu.
2. Ak svieti modrá kontrolka, ale nezobrazuje sa obraz, vypnite aplikáciu aj zariadenie, potom ich reštartujte a znovu pripojte.
3. Vypnite funkciu **Inteligentné prepínanie sietí**:
 - **iOS**: Prejdite do **Nastavenia** → **WLAN** → **ťuknite na ikonu siete** → **vypnite Automatické pripojenie**.
 - **Android**: Prejdite do **Nastavenia** → **WLAN** → **Zrýchlenie siete** → **vypnite Prepínanie medzi sieťami**.
 - **Huawei HarmonyOS**: Prejdite do **Nastavenia** → **WLAN** → **Ďalšie nastavenia** → **WLAN+** → **vypnite WLAN+**.
 - **Iné mobilné telefóny**: V nastaveniach WLAN vyhľadajte možnosť podobnú **Inteligentnému prepínaniu sietí** a vypnite ju.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Address: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District,
Shenzhen, China
Phone:8613122811873
Email:632814589@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: EARSCAN (NE3 wireless visible earpick)
Model no.: NE3

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD

Place and date of issue: Shenzhen Guangdong 28Jan2026

Name, function: Hua Zhang, Manager

Signature:

Stamp: 张华

深圳市华杰伟科技有限公司
Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD

张华

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ
Podľa smernice ES – CE

Výrobca: Shenzhen HuaJieWei Technology Co., LTD
Adresa: 5,6,8/F, Block 2, Tenghongxing Science park, Jiazitang, Guangming District, Shenzhen, Čína
Telefón: 8613122811873
E-mail: 632814589@qq.com

Toto vyhlásenie o zhode vydáva výrobca na vlastnú zodpovednosť.

Názov výrobku: EARSCAN (NE3 bezdrôtová viditeľná ušná tyčinka)
Číslo modelu: NE3

Predmet vyhlásenia opísaný vyššie je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica EMC 2014/30/EÚ

Smernica o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ

Smernica RoHS 2011/65/EÚ Príloha II, ktorou sa mení a dopĺňa príloha (EÚ) 2015/863

Odkazy na príslušné harmonizované normy, ktoré sa použili, alebo odkazy na iné technické špecifikácie, vo vzťahu ku ktorým sa deklaruje zhoda:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Dovozca: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovinsko, EÚ

Podpísané za a v mene (názov spoločnosti): Shenzhen Huajiewei Technology Co., LTD
Miesto a dátum vydania: Shenzhen Guangdong, 28. január 2026
Meno, funkcia: Hua Zhang, manažér
Podpis:
Pečiatka: