

DK: EARSIO – BRUGERVEJLEDNING

Elektrisk ørevoksrensers i lommestørrelse

BRUGERVEJLEDNING

Tak fordi du har købt vores produkt.

PAKKENS INDHOLD:

1 x Elektrisk ørevoksrensers (hovedenhed)

2 x Sugenhoved

1 x Rensebørste

1 x Beskyttelsesæske

SPECIFIKATIONER

Materiale: Plastik, silikone

Strømkilde: Batteridrevet, 1 AAA-batteri (medfølger ikke)

Størrelse: Ca. 11,5 x 5,5 x 3 cm

Egnet til både børn og voksne

ADVARSLER

- Under brug må enheden ikke berøres af andre personer eller genstande. Sæt dig ned et sikkert sted under brug.
- Når produktet bruges af børn, skal det betjenes af en voksen/væрге.
- Ved fjernelse af våd ørevoks skal du kontrollere, om sugenhovedet og filteret er blokeret.
- Hvis trommehinden er beskadiget, må produktet ikke anvendes.
- Hvis der er smerter i øret eller andre skader, må produktet kun anvendes efter konsultation med en læge.
- Brug kun enheden til det formål, den er designet til.

BRUGSANVISNING

Bemærk: Tænd for enheden. Når du hører lyden af motoren, indsæt den langsomt og vandret i øret, så sugenhovedet er korrekt rettet mod øret. Ørevoks fjernes ved blide vibrationer, som tiltrækker ørevoksen og hurtigt suger snavs inde i øret ind i enhedens opsamlingsbeholder. Samtidig giver det en let massage af øret.

Hold ørevoksrenseren vandret i hånden under brug. Før forsigtigt sugenhovedet ved fronten ind i øret, og bevæg det frem og tilbage et par gange. Ørevoksen kan derefter nemt fjernes.

Ørevoksen opsuges ved fronten af sugenhovedet. Under rengøring skal sugenhovedet placeres korrekt i øret.

OBS: For at undgå skader på øret må enheden ikke indsættes for dybt i øregangen.



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Filteret kan afmonteres og vaskes med vand, det samme gælder sugehovedet.
- I nogle tilfælde kan filteret være vanskeligt at fjerne.
- Bemærk, at alle andre dele end filteret og sugehovedet ikke må vaskes med vand.



INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.