


AT: EASYBREATHE – BENUTZERHANDBUCH

WAS IST ENTHALTEN?

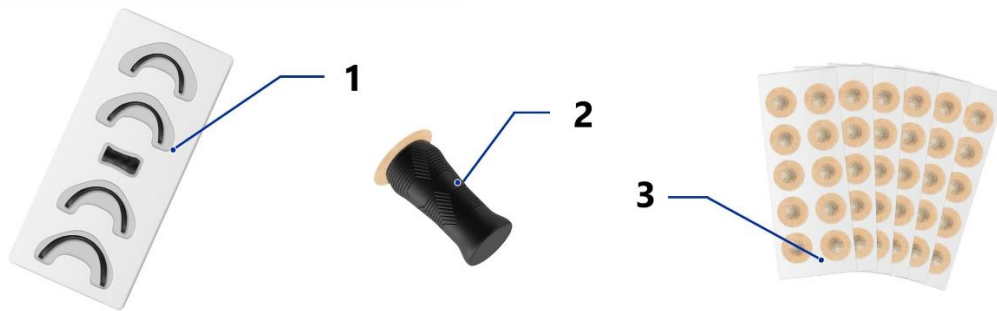

1. **4 NASENBÄNDER:** Verstellbare Nasenclips in verschiedenen Größen, passend für die meisten Benutzer.
2. **1 MAGNETISCHER APPLIKATOR:** Hilft bei der präzisen Platzierung jedes Nasenstreifens.
3. **15 MAGNETISCHE LASCHEN:** Selbstklebende Laschen für eine sichere Befestigung der Nasenbänder.

GEBRAUCHSANWEISUNG



1. **REINIGUNG:** Waschen Sie den Nasenbereich, um Schmutz und Fett zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass die Haut vollständig trocken ist, bevor Sie die magnetischen Nasenstreifen anbringen.
2. **ANBRINGEN:** Verwenden Sie den Applikator, um eine magnetische Lasche auf jeder Seite der Nase direkt über den Nasenlöchern zu positionieren. Drücken Sie sie fest an, um eine vollständige Haftung zu gewährleisten.
3. **PLATZIERUNG DER LASCHEN:** Setzen Sie die Stahlscheiben leicht oberhalb jeder Nasenöffnung an (nicht direkt darauf) und achten Sie darauf, dass die geformte Vertiefung richtig ausgerichtet ist.
4. **BEFESTIGEN:** Platzieren Sie das EASYBREATHE-Band über der Nase, sodass die magnetischen Enden sicher an den Laschen einrasten.