


NL: EASYBREATHE – GEBRUIKSAANWIJZING

WAT ZIT ERIN?

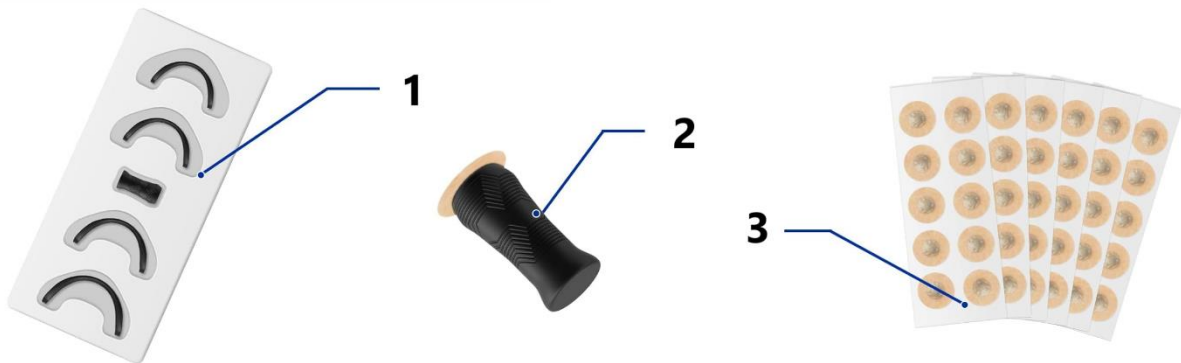

1. **4 NEUSBANDEN:** Verstelbare neusclips in verschillende maten om de meeste gebruikers te passen.
2. **1 MAGNETISCHE APPLICATOR:** Helpt bij het nauwkeurig plaatsen van elke neusstrip.
3. **15 MAGNETISCHE TABS:** Zelfklevende tabs ontworpen voor een stevige bevestiging van de neusbanden.

GEBRUIKSAANWIJZING



1. **REINIGING:** Was het neusgebied om vuil en olie te verwijderen. Zorg ervoor dat de huid volledig droog is voordat u de magnetische neusstrips aanbrengt.
2. **AANBRENGEN:** Gebruik de applicator om een magnetische tab aan elke kant van de neus te plaatsen, net boven de neusgaten. Druk stevig aan voor een goede hechting.
3. **PLAATSEN VAN DE TABS:** Plaats de stalen schijf iets boven elk neusgat (niet direct erop) en zorg ervoor dat de gevormde inkeping correct uitgelijnd is.
4. **BEVESTIGEN:** Plaats de EASYBREATHE-band over de neus, zodat de magnetische uiteinden stevig op de tabs klikken.