


## EE: EASYBREATHE – KASUTUSJUHEND

### MIS ON KAASAS?

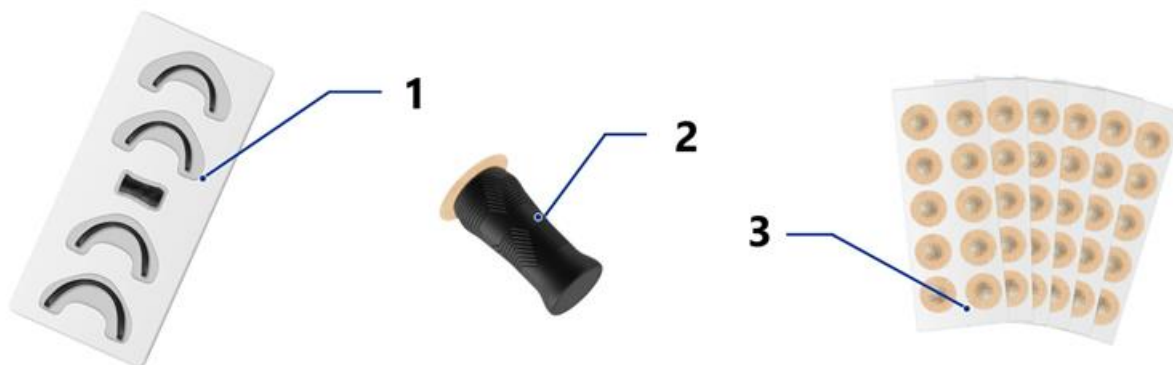

1. **4 NENAKINNITITIT:** Erinevas suuruses reguleeritavad ninaklambrid, mis sobivad enamikule kasutajatele.
2. **1 MAGNEETILINE KINNITUS:** Aitab iga ninariba kinnitada täpselt sinna, kuhu vaja.
3. **15 MAGNETILIST NINAOTSAKUT:** Liimikinnitusega keeled, mis on mõeldud ninaribade turvaliseks kinnitamiseks.

### KASUTUSJUHEND



1. **PUHASTUS:** Peske oma nina piirkonda, et eemaldada mustus ja õli. Veenduge, et teie nahk on enne magnetiliste ninaribade kinnitamist täiesti kuiv.
2. **KASUTAGE:** Kasutades aplikaatorit, asetage magnetiline ribake mõlemale poolele nina, veidi ninasõõrmete kohal. Vajutage tugevalt, et see kinnituks täielikult.
3. **TABI PAIGALDAMINE:** Asetage terasketas veidi kummagi ninasõõrme kohale (mitte otse selle peale), tagades, et kontuurne süvend on õigesti joondatud.
4. **KINNITAMINE:** Asetage EASYBREATHE rihm üle nina, lastes magnetilistel otstel kindlalt nipsu külge haakuda.