


## ES: EASYBREATHE – MANUAL DE USUARIO

### ¿QUÉ INCLUYE?

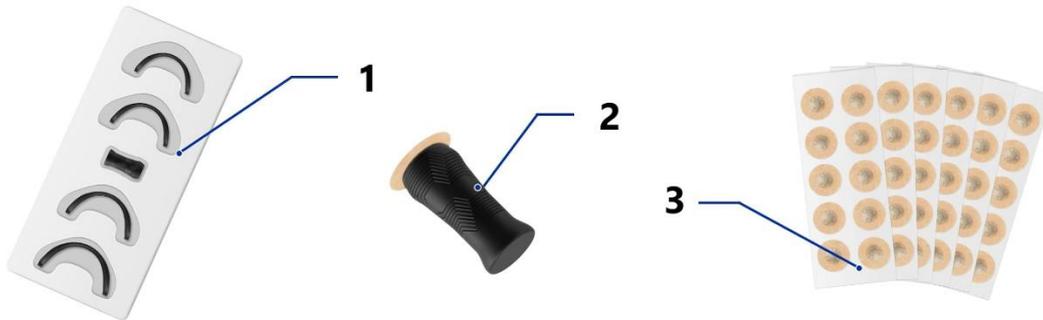

1. **4 BANDAS NASALES:** Clips nasales ajustables en varios tamaños para adaptarse a la mayoría de los usuarios.
2. **1 APLICADOR MAGNÉTICO:** Ayuda a colocar con precisión cada banda nasal.
3. **15 PESTAÑAS MAGNÉTICAS:** Pestañas adhesivas diseñadas para una fijación segura de las bandas nasales.

### INSTRUCCIONES DE USO



1. **LIMPIEZA:** Lave la zona de la nariz para eliminar la suciedad y la grasa. Asegúrese de que la piel esté completamente seca antes de aplicar las bandas nasales magnéticas.
2. **APLICACIÓN:** Usando el aplicador, coloque una pestaña magnética a cada lado de la nariz, justo por encima de las fosas nasales. Presione firmemente para asegurar una buena adhesión.
3. **COLOCACIÓN DE LAS PESTAÑAS:** Coloque el disco de acero ligeramente por encima de cada fosa nasal (no directamente sobre ella) y asegúrese de que la hendidura contorneada esté alineada correctamente.
4. **FIJACIÓN:** Coloque la banda EASYBREATHE sobre la nariz, permitiendo que los extremos magnéticos se adhieran firmemente a las pestañas.