


PT: EASYBREATHE – MANUAL DO USUÁRIO

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?

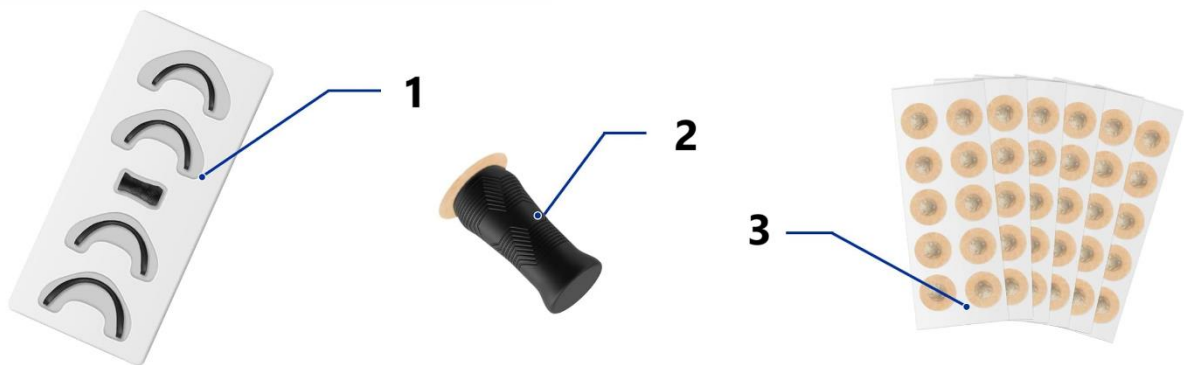

1. **4 TIRAS NASAIS:** Clipes nasais ajustáveis em vários tamanhos para se adaptar à maioria dos usuários.
2. **1 APLICADOR MAGNÉTICO:** Auxilia na colocação precisa de cada tira nasal.
3. **15 ABA MAGNÉTICAS:** Abas adesivas projetadas para fixação segura das tiras nasais.

INSTRUÇÕES DE USO



1. **LIMPEZA:** Lave a área do nariz para remover sujeira e oleosidade. Certifique-se de que a pele esteja completamente seca antes de aplicar as tiras nasais magnéticas.
2. **APLICAÇÃO:** Usando o aplicador, posicione uma aba magnética em cada lado do nariz, logo acima das narinas. Pressione firmemente para garantir uma fixação segura.
3. **POSICIONAMENTO DAS ABAS:** Coloque o disco de aço ligeiramente acima de cada narina (não diretamente sobre ela) e certifique-se de que o encaixe contornado esteja corretamente alinhado.
4. **FIXAÇÃO:** Posicione a tira EASYBREATHE sobre o nariz, permitindo que as extremidades magnéticas se fixem firmemente às abas.