


RO: EASYBREATHE – MANUAL DE UTILIZARE

CE ESTE INCLUS?

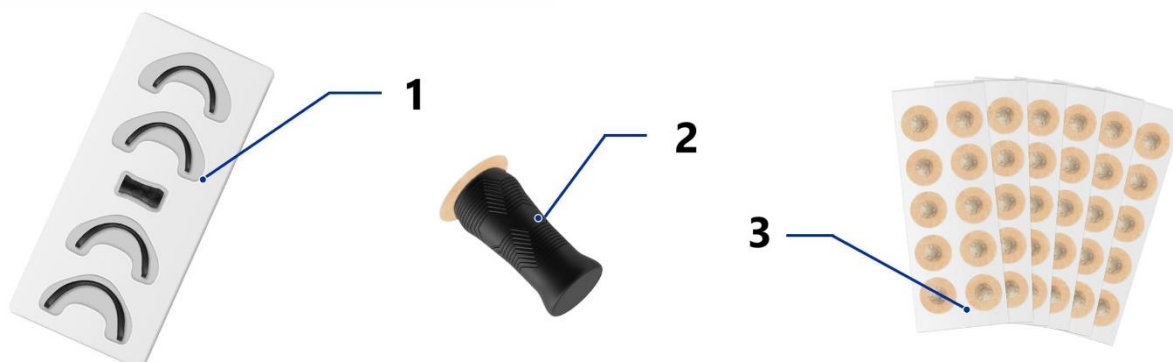

1. **4 BENZI NAZALE:** Clipsuri nazale ajustabile în diverse dimensiuni, potrivite pentru majoritatea utilizatorilor.
2. **1 APLICATOR MAGNETIC:** Ajută la plasarea precisă a fiecărei benzi nazale.
3. **15 PASTILE MAGNETICE:** Pastile autoadezive concepute pentru fixarea sigură a benzilor nazale.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



1. **CURĂȚARE:** Spălați zona nasului pentru a îndepărta murdăria și excesul de sebum. Asigurați-vă că pielea este complet uscată înainte de aplicarea benzilor nazale magnetice.
2. **APLICARE:** Folosind aplicatorul, poziționați o pastilă magnetică pe fiecare parte a nasului, chiar deasupra nărilor. Apăsați ferm pentru o aderență maximă.
3. **PLASAREA PASTILELOR:** Așezați discul de oțel ușor deasupra fiecărei nări (nu direct pe ea) și asigurați-vă că adâncitura conturată este aliniată corect.
4. **FIXARE:** Plasați banda EASYBREATHE peste nas, permițând capetelor magnetice să se fixeze ferm pe pastile.