


IT: EASYBREATHE – MANUALE D'USO

COSA È INCLUSO?

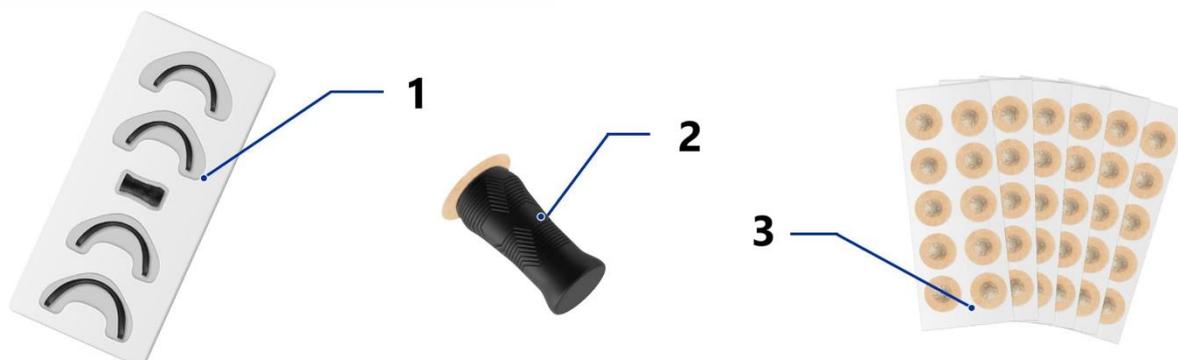

1. **4 FASCETTE NASALI:** Clip nasali regolabili in varie dimensioni per adattarsi alla maggior parte degli utenti.
2. **1 APPLICATORE MAGNETICO:** Aiuta a posizionare con precisione ogni striscia nasale.
3. **15 LINGUETTE MAGNETICHE:** Linguette adesive progettate per fissare saldamente le fascette nasali.

ISTRUZIONI PER L'USO



1. **PULIZIA:** Lavare la zona del naso per rimuovere sporco e sebo. Assicurarsi che la pelle sia completamente asciutta prima di applicare le strisce nasali magnetiche.
2. **APPLICAZIONE:** Utilizzando l'applicatore, posizionare una linguetta magnetica su ciascun lato del naso, appena sopra le narici. Premere saldamente per garantire una perfetta adesione.
3. **POSIZIONAMENTO DELLE LINGUETTE:** Collocare il disco in acciaio leggermente sopra ogni narice (senza coprirlo direttamente) e assicurarsi che la rientranza sagomata sia allineata correttamente.
4. **FISSAGGIO:** Posizionare la fascia EASYBREATHE sopra il naso, permettendo agli estremi magnetici di agganciarsi saldamente alle linguette.