


CZ: EASYBREATHE – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ?

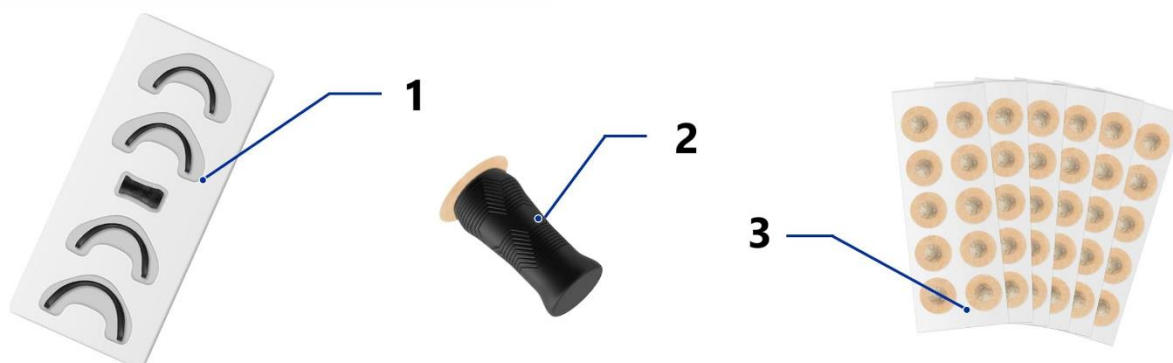

1. **4 NOSNÍ PÁSKY:** Nastavitelné nosní klipy v různých velikostech, vhodné pro většinu uživatelů.
2. **1 MAGNETICKÝ APLIKÁTOR:** Pomáhá s přesným umístěním každého nosního pásku.
3. **15 MAGNETICKÝCH PŘÍLEPKŮ:** Samolepicí příchytky navržené pro bezpečné uchycení nosních pásků.

NÁVOD K POUŽITÍ



1. **ČIŠTĚNÍ:** Umyjte oblast nosu, abyste odstranili nečistoty a mastnotu. Před aplikací magnetických nosních pásků se ujistěte, že je pokožka zcela suchá.
2. **APLIKACE:** Pomocí aplikátoru umístěte magnetický přítisk na každou stranu nosu, těsně nad nosní dírkou. Pevně přitiskněte pro dokonalé přilnutí.
3. **UMÍSTĚNÍ PŘÍLEPKŮ:** Ocelový disk umístěte mírně nad každou nosní dírkou (ne přímo na ni) a ujistěte se, že konturovaný zářez je správně zarovnán.
4. **PŘIPEVNĚNÍ:** Položte pásku EASYBREATHE na nos a ujistěte se, že magnetické konce pevně přilnou k příchýtkám.