


SK: EASYBREATHE – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ČO JE SÚČASŤOU BALENIA?

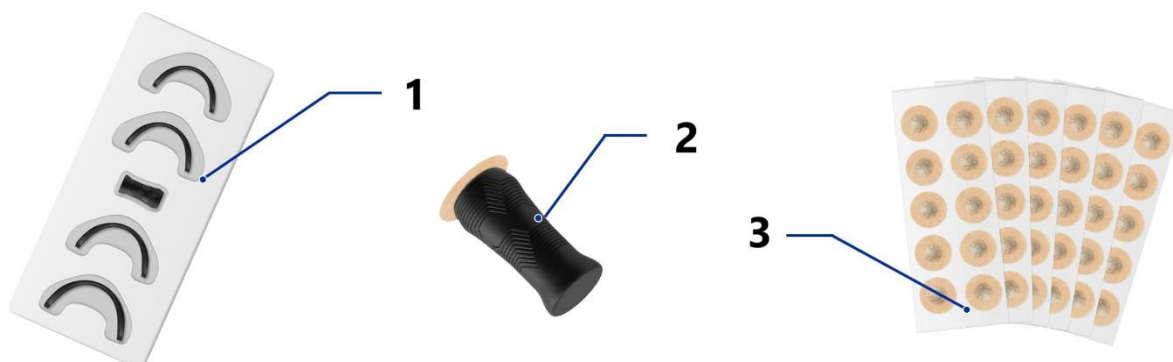

1. **4 NOSOVÉ PÁSKY:** Nastaviteľné nosové klipy v rôznych veľkostiach, vhodné pre väčšinu používateľov.
2. **1 MAGNETICKÝ APLIKÁTOR:** Pomáha s presným umiestnením každého nosového pásika.
3. **15 MAGNETICKÝCH PÁSOV:** Samolepiace pásiky navrhnuté na bezpečné upevnenie nosových pášikov.

NÁVOD NA POUŽITIE



1. **ČISTENIE:** Umyte oblasť nosa, aby ste odstránili nečistoty a mastnotu. Pred aplikáciou magnetických nosových pášikov sa uistite, že je pokožka úplne suchá.
2. **APLIKÁCIA:** Pomocou aplikátora umiestnite magnetický pás na každú stranu nosa, tesne nad nosné dierky. Pevne pritlačte, aby ste zabezpečili dokonalé priľnutie.
3. **UMIESTNENIE PÁSKOV:** Oceľový disk umiestnite mierne nad každú nosnú dierku (nie priamo na ňu) a uistite sa, že tvarovaný zárez je správne zarovnaný.
4. **PRIPEVNENIE:** Položte pásku EASYBREATHE na nos a uistite sa, že magnetické konce pevne priľnú k pášikom.