


PL: EASYBREATHE – INSTRUKCJA OBSŁUGI

CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE?

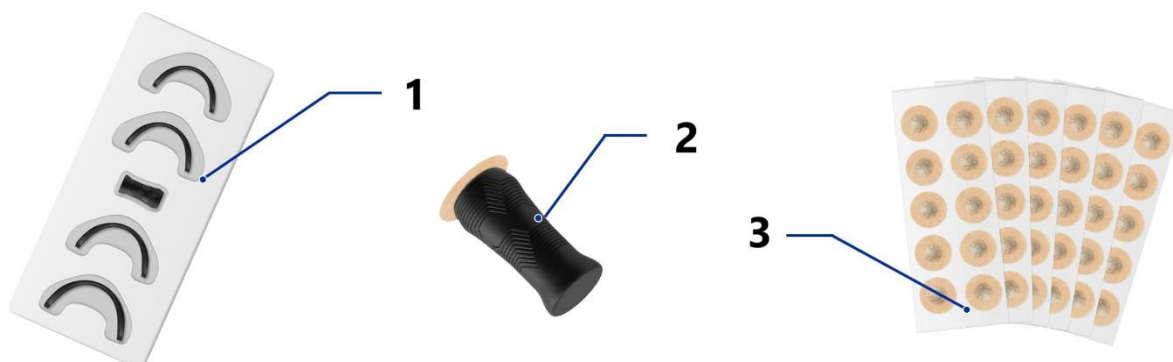

1. **4 PASKI NOSOWE:** Regulowane klipsy na nos w różnych rozmiarach, odpowiednie dla większości użytkowników.
2. **1 APLIKATOR MAGNETYCZNY:** Pomaga w precyzyjnym umiejscowieniu każdego paska nosowego.
3. **15 MAGNETYCZNYCH WKLEJEK:** Samoprzylepne wkładki zaprojektowane do bezpiecznego mocowania pasek nosowych.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



1. **CZYSZCZENIE:** Umyj okolice nosa, aby usunąć brud i sebum. Upewnij się, że skóra jest całkowicie sucha przed nałożeniem magnetycznych pasek nosowych.
2. **APLIKACJA:** Za pomocą aplikatora umieść magnetyczną wkładkę po obu stronach nosa, tuż nad nozdrzami. Mocno dociśnij, aby zapewnić pełne przyleganie.
3. **UMIEJSCOWIENIE WKLEJEK:** Umieść stalowy dysk nieco powyżej każdej nozdrzy (nie bezpośrednio na niej) i upewnij się, że profilowane wgłębienie jest prawidłowo wyrównane.
4. **MOCOWANIE:** Umieść pasek EASYBREATHE na nosie, pozwalając magnetycznym końcom na bezpieczne zaczeplenie się o wkładki.