


SI: EASYBREATHE – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

KAJ JE VKLJUČENO?

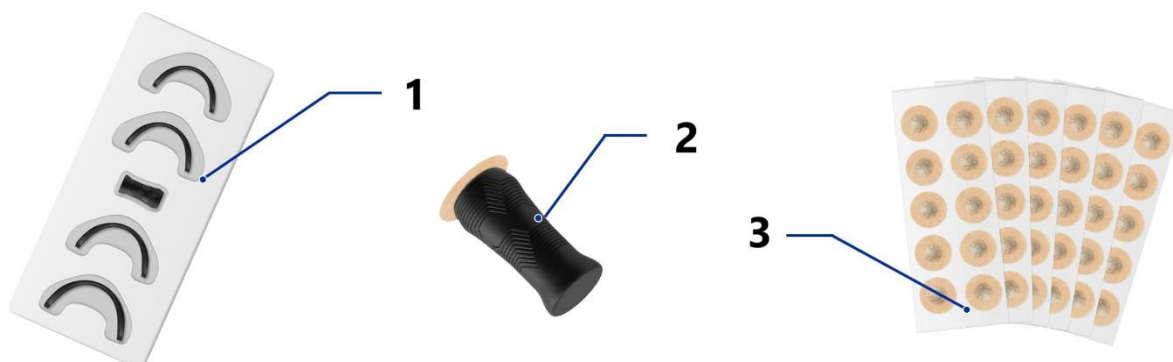

1. **4 NOSNI TRAKOVI:** Nastavljive nosne sponke različnih velikosti, primerne za večino uporabnikov.
2. **1 MAGNETNI APLIKATOR:** Pomaga pri natančni namestitvi vsakega nosnega traku.
3. **15 MAGNETNIH JEZIČKOV:** Samolepilni jezički, zasnovani za varno pritrditev nosnih trakov.

NAVODILA ZA UPORABO



1. **ČIŠČENJE:** Operite predel nosu, da odstranite umazanijo in maščobo. Pred nanosom magnetnih nosnih trakov mora biti koža popolnoma suha.
2. **NAMESTITEV:** S pomočjo aplikatorja namestite magnetni jeziček na vsako stran nosu, tik nad nosnici. Trdno pritisnite za popolno oprijemljivost.
3. **NAMESTITEV JEZIČKOV:** Jekleni disk postavite nekoliko nad vsako nosnico (ne neposredno nanjo) in se prepričajte, da se konturirana vdolbina pravilno poravna.
4. **PRITRDITEV:** Namestite trak EASYBREATHE preko nosu, tako da se magnetni konci varno pritrdijo na jezičke.