


HR: EASYBREATHE – KORISNIČKI PRIRUČNIK

ŠTO JE UKLJUČENO?

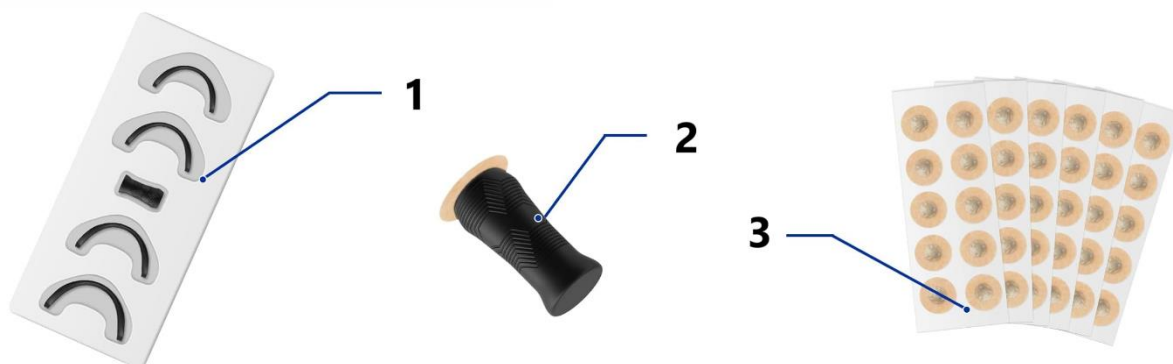

1. **4 NOSNA TRAKA:** Podesive nosne kopče različitih veličina koje odgovaraju većini korisnika.
2. **1 MAGNETNI APLIKATOR:** Pomaže u preciznom postavljanju svakog nosnog traka.
3. **15 MAGNETNIH JASTUČIĆA:** Ljepljivi jastučići dizajnirani za sigurno pričvršćivanje nosnih traka.

UPUTE ZA UPORABU



1. **ČIŠĆENJE:** Operite područje nosa kako biste uklonili prljavštinu i masnoću. Prije nanošenja magnetnih nosnih traka, koža mora biti potpuno suha.
2. **PRIMJENA:** Uz pomoć aplikatora postavite magnetni jastučić na svaku stranu nosa, neposredno iznad nosnice. Čvrsto pritisnite kako biste osigurali dobro prijanjanje.
3. **POSTAVLJANJE JASTUČIĆA:** Čelični disk postavite malo iznad svake nosnice (ne izravno na nju) i provjerite je li udubljenje pravilno poravnano.
4. **PRIČVRŠĆIVANJE:** Postavite EASYBREATHE traku preko nosa, tako da se magnetski krajevi sigurno pričvrste na jastučice.