


BG: EASYBREATHE – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО?

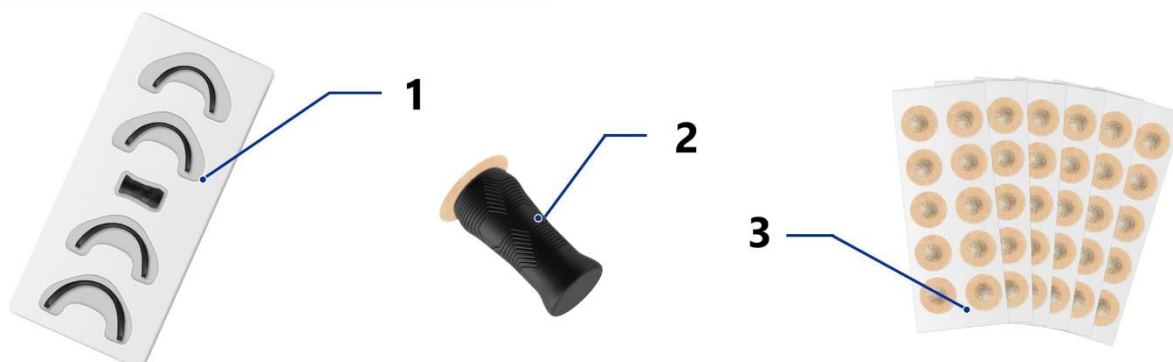

1. **4 НОСНИ ЛЕНТИ:** Регулируеми носни клипове с различни размери, подходящи за повечето потребители.
2. **1 МАГНИТЕН АПЛИКАТОР:** Помага за точното позициониране на всяка носна лента.
3. **15 МАГНИТНИ ПОДЛОЖКИ:** Самозалепващи се подложки, предназначени за сигурно закрепване на носните ленти.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА



1. **ПОЧИСТВАНЕ:** Измийте областта на носа, за да премахнете замърсяванията и омазняването. Уверете се, че кожата е напълно суха преди поставянето на магнитните носни ленти.
2. **ПРИЛАГАНЕ:** С помощта на апликатора поставете магнитна подложка от всяка страна на носа, точно над ноздрите. Натиснете здраво за сигурно прилепване.
3. **ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПОДЛОЖКИТЕ:** Поставете стоманения диск малко над всяка ноздра (не директно върху нея) и се уверете, че вдлъбнатината е правилно подравнена.
4. **ЗАКРЕПВАНЕ:** Поставете лентата EASYBREATHE върху носа, като позволите на магнитните краища да се закрепят стабилно към подложките.