


LV: EASYBREATHE - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

KAS IR IEKĻAUTS?

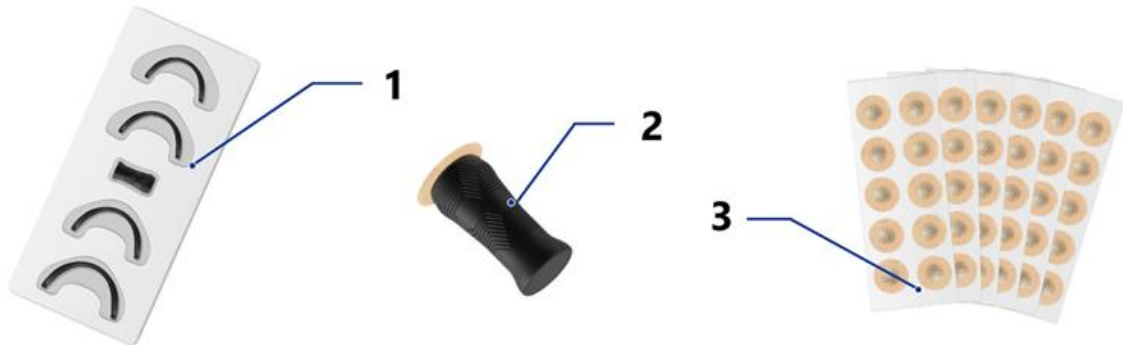

1. **4 NOSA KLPASES:** Regulējamas dažādu izmēru deguna klipsas, kas piemērotas lielākajai daļai lietotāju.
2. **1 MAGNETISKAIS APLIKATORS:** palīdz nostiprināt katru deguna sloksni tieši tur, kur nepieciešams.
3. **15 MAGNĒTISKĀS PLĀKSNĪTES:** Magnētiskās plāksnītes ar lipīgu pamatni, kas paredzētas drošai deguna lenšu piestiprināšanai.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



1. **Tīrīt:** nomazgājiet deguna zonu, lai noņemtu netīrumus un eļļu. Pirms magnētisko deguna joslu uzlikšanas pārļiecinieties, ka āda ir pilnīgi sausa.
2. **PIELIETOŠANA:** Izmantojot aplikatoru, novietojiet magnētisko plāksnīti katrā deguna pusē, tieši virs nāsīm. Spiediet cieši, lai pilnībā pieliptu.
3. **IELIETOŠANA:** Novietojiet tērauda disku nedaudz virs katras nāsis (nevis tieši uz tās), pārļiecinoties, ka kontūrveida ievilkums ir pareizi izlīdzināts.
4. **PIELIEGOJUMS:** Novietojiet EASYBREATHE lentu virs deguna, ļaujot magnētiskajiem galiem droši piestiprināties pie cilpiņām.